

Předpokládaný účel

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Indikace

Prostředek je indikován pro stomiky.

Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, protože může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Informace

Stomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Zvláštní podmínky uchování

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.


Uchovávat mimo sluneční záření.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobcí a vašemu státnímu orgánu.

Aplikace a odstranění

Příprava

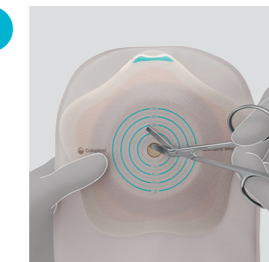


Vystříhnete v lepicím materiálu otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce.

Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.


Tvar stomie se může měnit, proto ji doporučujeme měřit, když je největší. Většinou to bývá, když právě sedíte.



Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

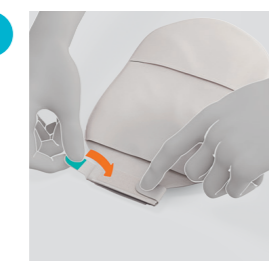


Umístěte sáček na rovný povrch, lepicí stranou směrem dolů.

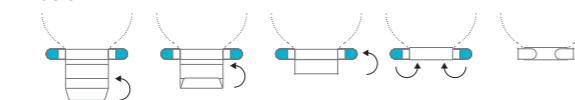


Zavřete výpust trojnásobným složením spodní části výpustě nahoru tak, aby byl viditelný suchý zip Velcro®.

Přeložte obě chlopně dovnitř a zajistěte suchý zip Velcro®.


Aplikace

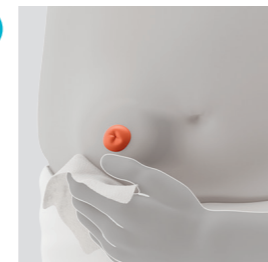


Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací lepicího materiálu na podložce zcela suchá.

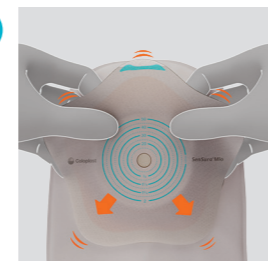

Překlopením všech 5 chlopní připravte lepicí materiál k aplikaci.

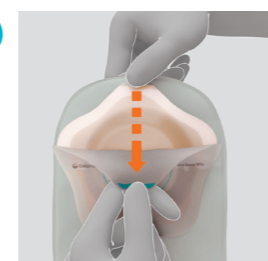


Z lepicího materiálu odlepte ochrannou fólii.

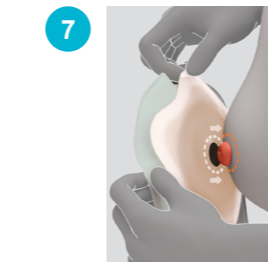


Lepicí materiál držte tak, aby chlopně byly ohnuté směrem dozadu. Otvor ve středu lepicího materiálu nasadte na stomii.


Opatrně přitlačte vnitřní středovou část kolem stomie na kůži. Poté překlopte chlopně dolů přes vnější část.

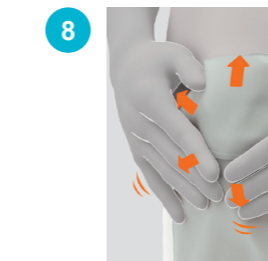

Pevně přitlačte lepicí materiál na pokožku od středu směrem ven.

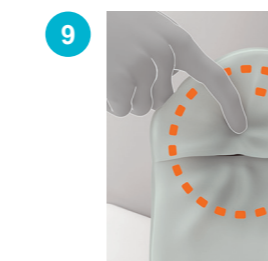

Ukazovákem najděte měkký stabilizační kroužek kolem stomie. Opatrným zatlačením na lepicí materiál mezi kroužkem a stomii (nebo přímo na stabilizační kroužek) zajistěte, aby středová část lepicího materiálu neprodyšně přilnula ke kůži.

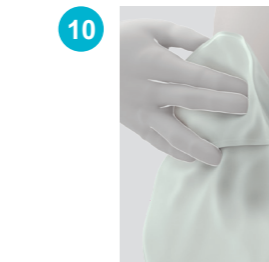

Aplikujte tlak od středu lepicího materiálu a směrem ven ve více směrech, abyste dosáhli pevného přilnutí lepicího materiálu k pokožce kolem stomie.




Pokud chcete dočasně zabránit úniku plynu ze sáčku, uzavřete filtr tím, že jej přelepíte jednou z přiložených samolepek na filtr. Uzavření filtru na delší dobu by způsobilo nafouknutí sáčku, a proto byste jej měli nechat přelepený samolepkou jen krátce.



Návod k použití je dostupný i na videu


Chcete-li se podívat na instruktážní video, oskenujte QR kód nebo přejděte na www.coloplast.cz/concave1d/vyp

Popis sáčku

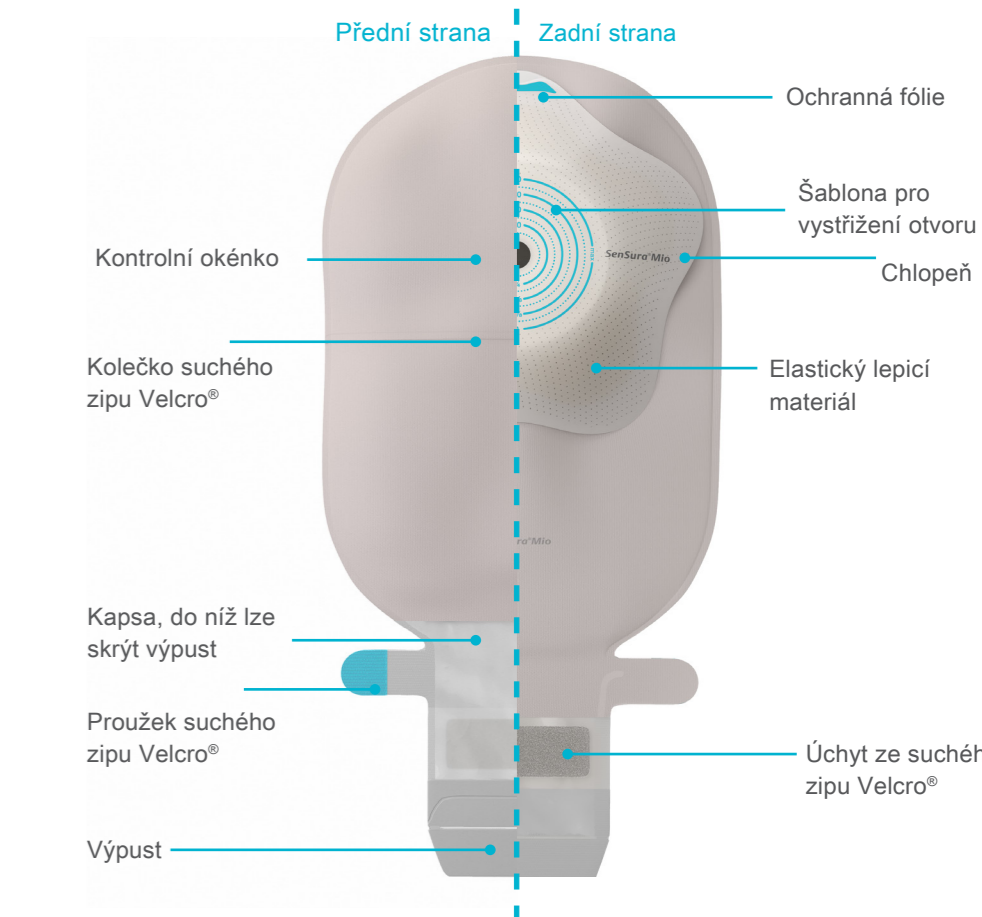

Vyprazdňování

11

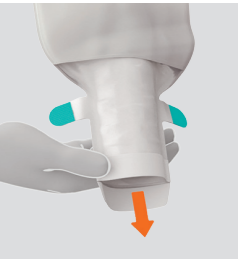

Otevřete výpust a vyprázdněte sáček do toalety, je-li třeba.

12



Vyčistěte výpust, například toaletním papírem.

Po vyprázdnění sáčku podle kroků 3 a 4 výpust složte a znovu připevněte.

13



Výpust lze skrýt buď pomocí kolečka suchého zipu Velcro® přímo nad výpustí ...

14



... nebo složením sáčku a připevněním výpusti ke kolečku suchého zipu Velcro®.

Odstraňování



Opatrně odstraňte sáček zatažením za poutko na lepicím materiálu směrem od břicha a srolujte lepicí materiál pomalu směrem dolů.

Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Řešení opakujících se problémů

?

Lepicí materiál na kůži špatně drží

Je nezbytné dodržovat pokyny k použití uvedené v této příbalové informaci a zajistit, aby kůže byla před aplikací zcela čistá a suchá. Je důležité, aby lepicí materiál zcela přilnul ke každému záhybu kůže. Při aplikaci na lepicí materiál tlačte, abyste zajistili dostatečné přilnutí.

?

Pokožka je pod stomickou podložkou červená a/nebo podrážděná

Podráždění pokožky může mít mnoho příčin. Může být způsobeno podtékáním, které vzniká proto, že jste použili nesprávnou pomůcku nebo nesprávně zvolenou velikost šablony. Důvodem může však být i nedostatečné čištění nebo rychlé odstranění lepicího materiálu, které může kůži podráždit. Je-li kůže červená, mohlo by pomoci používání odstraňovače adheziv. Takový problém co nejdříve proberte se stomickou sestrou.

?

Podtékání pod lepicím materiálem

Podtékání může mít mnoho příčin. Může vznikat kvůli měnícímu se tvaru nebo výšce těla nebo stomie či kvůli nesprávné aplikaci lepicího materiálu. Zkuste podstoupit samovyšetření BodyCheck na webových stránkách www.bodycheck.coloplast.com, abyste zjistili, zda se nezměnil váš tělesný profil. Pokud se tak stalo, možná budete potřebovat jinou pomůcku nebo by vám mohla pomoci další pomůcka z řady příslušenství pro péči o stomie a kůži kolem stomie. Takový problém je třeba co nejdříve probrat se stomickou sestrou.

Vysvětlení symbolů

MD

Zdravotnický prostředek

CE

Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky

REF

Katalogové číslo

Hourglass icon

Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)

LOT

Kód šarže

Calendar icon

Datum výroby (RRRR-MM-DD)

Factory icon

Výrobce

Information icon

Přečtěte si návod k použití

One-time use icon

Určeno na jedno použití

UDI

Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení

GTIN

(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky

Lightbulb icon

Uchovávat mimo sluneční záření

Upward arrow icon

Neklopit

Recycling icon

Recyklovatelný obal

MR

Bezpečné při vyšetření MR

CE

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Návod k použití

23325208 Version 2

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti

Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-01-08

Velcro® vlastní společnost Velcro Industries B.V

 Coloplast

SenSura® Mio Concave

Konkávni stomický sáček

1-dílný výpustný sáček



Návod k použití