

Brava[®]



Čistící roztok na kůži

Vytáhněte jeden ubrousek navlhčený čistícím roztokem na kůži Brava.

Ubrouskem očistěte kůži. Použijte tolik ubrousků, kolik potřebujete.

Před aplikací lepicího materiálu/pomůcky nechte kůži oschnout.

Balení znovu zalepte, aby se ubrousky navlhčené čistícím roztokem na kůži Brava udržely vlhké.

Likvidace

Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem nebo podle místních směrnic.

Produkt nesplachujte do toalety.

Složení

Polyethylentereftalát/viskóza (ubrousek), voda, dexpanthenol, citran sodný, kyselina citrónová, glukonát sodný, konzervační činidla.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.



Návod k použití

23327590

Version 1 Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-03-30

Určený účel

Čistící roztok na kůži Brava je určen k čištění neporušené kůže během péče o stomii a o kontinenci.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele. Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Upozornění

Pouze pro vnější použití.

Informace

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Způsob použití

Balení otevřete tak, že zatáhnete za opakovaně lepicí štítek. Neodstraňujte celý štítek, aby jej bylo možné znovu přilepit.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal