

Bariérový krém



Coloplast A/S
Høfledam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Návod k použití

23325549 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.

Všechna práva vyhrazena. © 2021-02-03

Určený účel

Bariérový krém Brava je určen k ochraně neporušené kůže kolem stomie, která je v kontaktu s obsahem střev, močí a hněsem.

Indikace

Bariérový krém Brava je indikován pro stomiky.

Upozornění

Uchovávejte mimo sluneční záření, protože může ovlivnit kvalitu produktu.

Informace

Produkt umožňuje přilnutí lepicího materiálu.

Složení

voda, cetearyl olivát, sorbitan olivát, tetrahydroxypropyl etylendiamin, konzervační látka, emulgátor

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávat mimo sluneční záření.

Způsob použití

Jemně vtěrete velmi tenkou vrstvu do čisté kůže. Než budete aplikovat stomický lepicí materiál, odstraňte nadbytečné množství krému papírovým kapesníkem.

Likvidace

Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem nebo podle místních směrnic. Produkt nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal