

Lubrikační deodorant

Péče o stonii



Coloplast A/S
Hofvedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Návod k použití

23325878 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.

Všechna práva vyhrazena. © 2021-01-28

Určený účel

Lubrikační deodorant Brava je určen k odstraňování pachů a lubrikaci obsahu stomického sáčku.

Upozornění

Uchovávat mimo sluneční záření.


Informace

Složení:

Voda, kokamidopropyl betain, hydroxypropyl guarová guma, vonná látka, tetrasodná EDTA, imidiazolidinyl urea, kyselina citronová.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Způsob použití

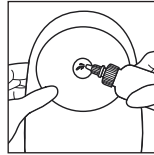

Do stomického sáčku přidejte 5–10 ml nebo jeden sáček lubrikačního deodorantu Brava a jemným třením ho rovnoměrně rozprostřete.

Množství upravte podle velikosti vašeho stomického sáčku.



Pokud používáte výpustný sáček, můžete deodorant přidat také výpustí.

Po vyprázdnění sáčku to proveďte znovu.

Likvidace

Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem nebo podle místních směrnic.

Produkt nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal