

## Ochranný film ve spreji



### Návod k použití

23323562 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2020-06-10

### Předpokládaný účel

Produkt je určen k ochraně neporušené kůže před poškozujícími účinky tělesných výměšků a zdravotnických lepicích materiálů.

### Upozornění

Vyvarujte se přímého použití na jinou tkáň, než je neporušená kůže, např. na spodinu rány a sliznice (oči, uši, nos, ústa, vagina), protože to může způsobit podráždění kůže.

Vyvarujte se přímého vdechování, které může způsobit dočasné podráždění dýchacích cest.

Nedoporučuje se používat u nedonošených kojenců, novorozenců nebo kojenců do 4 kg z důvodu nedostatečné vyzrálosti jejich kůže.

Vysoce hořlavé.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Nestříkejte na otevřený oheň a jiné zdroje zapálení.

Nepropichujte a nespalujte, ani po použití.

### Informace

Produkt je na bázi silikonu a je určen pro opakované použití. Vysychá během několika sekund a neovlivňuje adhezi dalších prostředků.

Složky: Obsahuje směs alkylosiloxanů.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

### Způsob použití

1. Ujistěte se, že je kůže okolo čistá a suchá.
2. Produkt nastříkejte rovnoměrně na neporušenou kůži ze vzdálenosti cca 10 cm (pokryjte neporušenou kůži).
3. Jakmile kůže zcela vyschne, je možné aplikovat stomický sáček obvyklým způsobem.

Ochranný film je třeba aplikovat vždy při každé výměně stomického sáčku nebo podložky.

### Likvidace

Přípravek by se měl zlikvidovat s dalšími sprejovými nádobami v souladu s místními předpisy.

### Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

## Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Označuje horní mez teploty, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven



Upozornění



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal



Vysoce hořlavé