

Odstraňovač adheziv v ubrouscích



Návod k použití

23323680 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2020-05-25

Předpokládaný účel

Ubrousek Brava na odstraňování lepicích materiálů je určen k odstraňování lékařských lepicích materiálů z neporušené kůže.

Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, což může mít za následek zvýšené riziko fyzické újmy nebo infekce uživatele.

Upozornění

Vyvarujte se přímého použití na jinou tkáň, než je neporušená kůže, např. na spodinu rány a sliznice (oči, uši, nos, ústa, vagína), protože to může způsobit podráždění kůže.

Nedoporučuje se používat u nedonošených kojenců, novorozenců nebo kojenců do 4 kg z důvodu nedostatečné vyzrálosti jejich kůže.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Informace

Přípravek je vyroben na bázi silikonu. Vysychá během několika sekund a neovlivňuje adhezi dalších prostředků.

Složky: Obsahuje směs alkylsiloxanů.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Způsob použití

1. Roztrhněte sáček, vyjměte ubrousek a rozbalte ho.
2. Odstraňte ubrouskem zbytky lepicího materiálu.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Produkt nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal