

Pasta v prouzcích

Vyplnění prohlubní a záhybů

Péče o stomii



Návod k použití

23325831 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-01-25


Informace

Pokud potřebujete menší množství, než je celý proužek, jednoduše potřebné množství z proužku odlomte. Pokud potřebujete větší množství, můžete prsty stlačit dva proužky pasty k sobě.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Způsob použití


Příprava

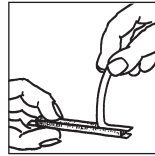

Zajistěte, aby byla kůže okolo stomie čistá a suchá. Uchopte tyrkysovou chlopeč a stažením chlopně balení otevřete.

Vyjměte proužek pasty. Po odstranění ochranné fólie je proužek pasty připraven k použití.

Aplikace

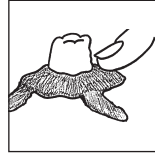

Položte kousek proužku pasty na nerovnou kůži. Pastu na kůži vytvarujte. Pasta musí vyplnit celou dutinu/celý ohyb, aby pasta a kůže byly zarovnané.

Pro snazší aplikaci si před modelováním proužku pasty můžete navlhčit prsty. Pak aplikujte stomickou pomůcku.

Určený účel

Produkt má vyplnit vpadliny/rýhy v neporušené kůži okolo vývodu. Tak se zajistí utěsnění mezi stomií a stomickou podložkou a kůže bude chráněná před podtečením.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele.

Obnova, čištění, dezinfekce a/nebo sterilizace mohou zhoršit vlastnosti produktu, a tyto zhoršené vlastnosti potom mohou pro uživatele představovat další riziko fyzické újmy nebo infekce.

Upozornění

Tento nesterilní produkt obsahuje suroviny přírodního původu a existuje určité riziko, že tyto materiály mohou přenášet patogeny, které nelze zcela odstranit ani nejpřísnějšími výrobními procesy. Proto je produkt u zranitelných skupin pacientů spojen se zvýšeným rizikem infekce a musí se používat obezřetně u předčasně narozených dětí a kojenců, kteří ještě nemají plně vyvinutý imunitní systém, a u kojenců léčených imunosupresivou.

Pouze pro vnější použití.

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Odstraňování

Pastu lze z kůže kdykoli odstranit. Na kůži obvykle nezůstanou žádné zbytky, protože pasta se z kůže odstraní spolu s lepicím materiálem.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR