

Pasta

Vyplnění prohlubní a záhybů


Péče o stomii

Příprava


Aby nedošlo ke kontaminaci pasty,

- držte tubu dále od vody a zabraňte kontaktu tuby s vývodem;
- před aplikací a po aplikaci pasty si umyjte ruce vodou a mýdlem.


Zajistěte, aby kůže okolo vývodu byla před aplikací pasty čistá a suchá.

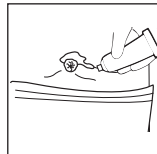Aplikace

Pastu aplikujte na kůži, abyste vyrovnali hluboké kožní záhyby, jizvy a nerovný povrch, nebo aplikujte přímo na lepicí materiál/podložku. Pastu neaplikujte na celou adhezivní plochu.

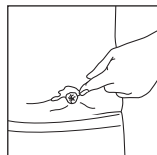

V případě potřeby pastu vyrovnejte opatrným rozetřením stěrkou nebo navlhčeným prstem.

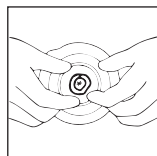

Po nalepení podložky/lepicího materiálu zajistěte dokonalé utěsnění kolem stomie tím, že pastu přitlačíte prsty.

Po použití odstraňte pastu, která zůstala na tubě, čistým papírovým kapesníkem. Tubu znovu pevně uzavřete, abyste zabránili kontaktu obsahu s vlhkostí.

Odstraňování

Pastu lze snadno odstranit vlažnou vodou a žínkou. Mastné zbytky pasty lze na kůži před další aplikací ponechat.

Je lepší na kůži ponechat nepatrné zbytky, než riskovat podráždění kůže při důkladném odstraňování.

Likvidace

Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem nebo podle místních směrnic.

Produkt nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

**Návod k použití**

23325795 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-01-22

Malkol CZO spol. s.r.o.,
Bušovice 4,
338 24 Břasy 1,
Česká republika
TEL: +420 371 781 294
FAX: +420 371 781 293

Určený účel

Produkt má vyplnit vpádliny/rýhy v neporušené kůži okolo vývodu. Tak se zajistí utěsnění mezi stomii a stomickou podložkou a kůže bude chráněná před podtečením.

Upozornění

Tento nesterilní produkt obsahuje suroviny přírodního původu a existuje určité riziko, že tyto materiály mohou přenášet patogeny, které nelze zcela odstranit ani nejpřísnějšími výrobními procesy.

Proto je produkt u zranitelných skupin pacientů spojen se zvýšeným rizikem infekce a musí se používat obezřetně u předčasně narozených dětí a kojenců, kteří ještě nemají plně vyvinutý imunitní systém, a u kojenců léčených imunosupresivou.

Pouze pro vnější použití.

Uchovávat mimo sluneční záření.

Informace

Pokud se od pasty oddělí vodnatá složka, vodnatou složku zlikvidujte.

Pokud pasta ztmavne, tubu zlikvidujte.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Upozornění



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR