

Coloplast®

Coloplast

Stomická ochranná destička
Zásobník se stomickou ochrannou destičkou



Coloplast A/S
Holtevej 1
3050 Humlebaek
Denmark

Návod k použití

23315055 Version 2

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena.

Značku Vaseline® vlastní společnost Unilever B.V. [2013-10]

Indikace

Určeno pro ochranu intaktní kůže před poškozením výměšky ze stomie a na dalších místech, kde může stolice poškodit kůži.

Informace

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Stomická ochranná destička je vysoce adhezivní tak, aby poskytovala nejvyšší možnou bezpečí a je velmi důležité, aby byla před aplikací destičky kůže důkladně oholena. Adheze a bezpečí jsou sníženy, pokud se použije krém. Tenká vrstva krému se však může použít v určitých případech, pokud zjistíte, že je stomická ochranná destička příliš lepkavá.

Upozornění

Není doporučeno pro děti o hmotnosti menší než 10 kg.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele. Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Jak se používá ochranná destička



1. Odstraňte ochranný papír z neadhezivní strany destičky (ohněte dělicí čáru a odstraňte ochranný papír).



2. Označte požadovanou velikost otvoru perem.



3. Vystříhnete nůžkami požadovanou velikost otvoru podle označení.



4. Kůži okolo stomie očistěte a vysušte. Odstraňte ochranný papír z lepicí strany.



5. Naneste lepicí stranou na kůži a silně přitlačte svými prsty ke kůži. Elasticita listu umožňuje rozšíření otvoru, když se umístí například kolem stomie. Okamžitě se stáhne a zajistí, že doléhá těsně kolem stomie.

Odstraňování:

Ochranná destička by se měla odstraňovat pomalu a opatrně.

Jak se používá zásobník se stomickou ochrannou destičkou



1. Odstraňte víko z dávkovače. Vytáhněte pouze požadovanou délku.



2. K ustřížení pásky kolem okraje dávkovače použijte nůžky. Pokud se nůžky přilepí k materiálu, natřete je tenkou vrstvou oleje, přípravkem Vaseline® nebo podobnými přípravky, abyste odstranili residua.

3. Vyměňte víko na dávkovači.



4. Postupujte dle popisu v části „Jak se používá ochranná destička“

Likvidace

Produkty je třeba likvidovat spolu s domácím odpadem. Produkt nesplachujte do toalety.