

### Urostomický noční sáček



#### Návod k použití

23323922 Version 2

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.

Všechna práva vyhrazena. © 2020-07-15

#### Předpokládaný účel

Urostomický noční sáček je určen k pasivnímu shromažďování moči.

#### Indikace

Urostomický noční sáček je určen pro osoby trpící močovou inkontinencí a / nebo retencí jakékoli etiologie.

#### Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, což může mít za následek zvýšené riziko fyzické újmy nebo infekce uživatele.

#### Informace

Sáček je nesterilní a je určen na jedno použití.

Výrobek má kapacitu 2000 ml.

Urostomický noční sáček lze použít společně se všemi urostomickými sáčky společnosti Coloplast.


Integrovaný konektor nočního sáčku se bezpečně připojuje k výpusti urostomických sáčků společnosti Coloplast.

Tištěný indikátor objemu je pouze orientační měrnou stupnicí objemu.


Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


#### Příprava

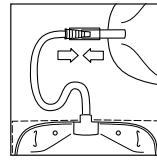


Při použití během noci musí být k urostomickému nočnímu sáčku připojena ohebná výstupní hadička vložená do krabice.

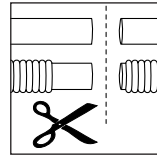


Když zkracujete vlnitou hadičku, ponechte rovnou část co nejdelší. Tím se při nasazování konektoru zajistí bezpečné propojení mezi hadičkou a konektorem.

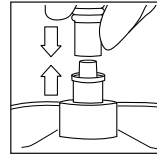

Připojte hadičku k sáčku pevným zatlačením jejího ustríženého konce do připojovacího vstupu sáčku.

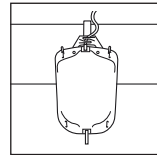


K zavěšení drenážního sáčku u lůžka můžete použít držák sáčku k lůžku nebo stojan Conveen.

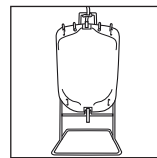

Nasadte sáček bezpečně na držák nebo stojan zasunutím zubů držáku nebo stojanu do otvorů v horní části sáčku. Zavěste věšák se sáčkem na lůžko nebo postavte stojan na podlahu u lůžka.

K zajištění optimálního vypouštění je důležité, aby byl drenážní sáček zavěšen níže, než je vaše poloha vleže na lůžku.

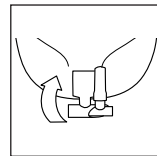


2-stupňový výstup

Ujistěte se, že je výpustný ventil uzavřený.

Když je ventil zavřený, směruje nahoru.


Urostomický noční sáček je nyní připraven k připojení k urostomickému sáčku.

#### Aplikace

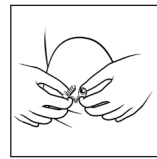


Držte zátku / konec výpusti urostomického sáčku obrácený směrem nahoru a stiskněte vnější konec výpusti, vytáhněte zátku a výpust dále přidržujte.

Před připojením k urostomickému nočnímu sáčku můžete svůj urostomický sáček vyprázdnit.

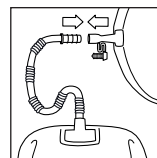

Hadička s předem upevněným konektorem

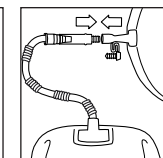


Zkrácená hadička s upevněnými konektory

Připojte urostomický noční sáček k výpusti urostomického sáčku.

Systém sběru moči je nyní funkční.

## Vyprazdňování

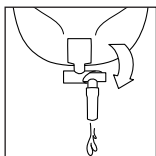

Otevřete a vyprázdněte sáček ve dvou krocích.


- 1) Zatlačte ventil směrem dolů
- 2) Vyprázdněte sáček zatlačením ze strany

Doporučujeme vyprázdnit sáček, když je zaplněný o něco více než do poloviny, zajistíte tím optimální odvod moči.

## Odstraňování

Pokud je urostomický noční sáček připojen k urostomickému sáčku, uzavřete výpustný ventil urostomického sáčku. Poté odpojte noční sáček. Nedotýkejte se otevřeného konce výpustní hadičky urostomického sáčku.

## Likvidace

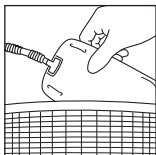

Vyměňujte noční sáček podle místních pokynů a doporučení.

Sáček vyprázdněte před likvidací.

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Produkt nesplachujte do toalety.

## Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobcí a vašemu státnímu orgánu.

## Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Recyklovatelný obal