

Kombinovaný sáček (sáček připevněný k noze / drenážní sáček k lůžku)

Conveen®

Popruh k sáčku připevněnému k noze

Conveen®

Držák sáčku k lůžku



Návod k použití

23322793 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.

Všechna práva vyhrazena. © 2020-02-06

Předpokládaný účel

Močový sběrný sáček je určen k pasivnímu shromažďování moči.

Indikace

Močové sběrné sáčky jsou určeny pro pacienty trpící močovou inkontinencí a / nebo retencí jakékoli etiologie.

Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, což může mít za následek zvýšené riziko fyzické újmy nebo infekce uživatele.

Informace

Sáček je nesterilní a je určen na jedno použití.

Sáček je navržen s objemovou kapacitou 1500 ml.

Tištěný indikátor objemu je pouze orientační měrnou stupnicí objemu.

Tento kombinovaný sáček je určen k použití jako sáček připevněný k noze během pobytu a pohybu mimo lůžko, a jako sáček u lůžka během pobytu na lůžku a spánku.

Tento sáček je navržen k použití v kombinaci se permanentními nebo intermitentními močovými katétry, alternativně s urinálním kondomem. Sáček lze také připojit k jinému sáčku pro sběr moči, aby se rozšířila kapacita systému.

Popruhy lze prát při teplotě 40°C/104 °F nebo nižší.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


Maximální počet opakovaných použití

Maximální počet povolených opakovaných použití věšáku sáčku je jedno použití denně po dobu 5 let.


Pokud jeho pružnost klesá, je třeba jej vyměnit.

Způsob použití

Příprava

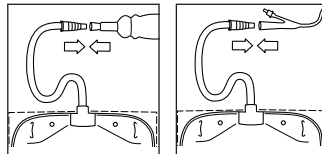


Kombinovaný sáček se může připojit přímo k urinálnímu kondomu nebo permanentnímu katéttru, a aby nebyla drenáž přerušena, může být nošen na noze, zatímco se pacient pohybuje mimo lůžko.

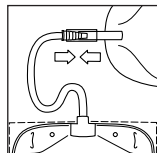


Může se také připojit k sáčku určenému k připevnění k noze a zavěsit na lůžko k vypouštění dalšího objemu během pobytu na lůžku a během spánku.

Intermitentní katetrizace


Sáček se také může připojit k intermitentnímu katéttru ke shromažďování moči během intermitentní katetrizace.

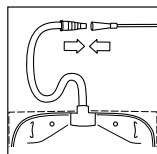


Sáček má vstupní hadičku. Pokud sáček používáte připevněný k noze, délka hadičky určuje, kde může být sáček k noze připevněn.

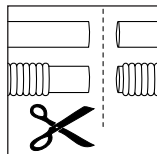


Hadíčku můžete zkrátit na požadovanou délku. Hadíčku jednoduše na volném konci přestříhnete nůžkami.

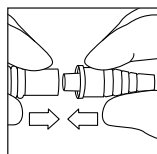

Sáček je dodáván se samostatným vstupním konektorem. Připojte konektor k hadičce tak, že tenký konec konektoru zatlačíte nadoraz do hadičky.

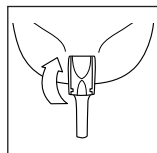


Ujistěte se, že je výpustný ventil uzavřený.

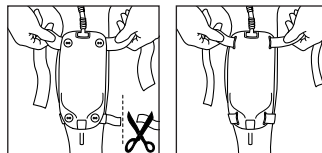

Pokud chcete sáček připevnit k noze, použijte popruhy Conveen. Připevněte si sáček k noze. Jakýkoli přebytečný popruh můžete odstříhnout.

Silikonizovaný pásek Conveen

Použijte delší popruh v horní části sáčku. Pokud si sáček připevňujete k lýtku, zavažte horní popruh přes koleno do tvaru osmičky.

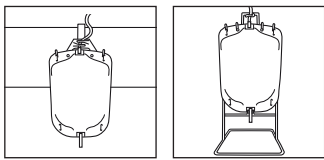

Pokud chcete sáček použít jako drenážní sáček u lůžka, použijte k jeho zavěšení na lůžko věšák nebo stojan Conveen.


Zajistěte sáček bezpečně na držáku zasunutím zoubku držáku do štěrbin v horní části sáčku. Zahákněte držák sáčku na postelový rám nebo umístěte stojan na podlahu vedle postele.

Chcete-li zajistit optimální odvod moči, je důležité, aby byl sběrný sáček k lůžku umístěn níže než vy, když ležíte v posteli.

Intermitentní katetrizace


Podepřete nebo umístěte sáček tak, jak se vám zdá nejpříznivější, a ujistěte se, že je sáček níže než oblast pánve, dle toho, zda preferujete katetrizaci v sedě, ve stoje nebo v leže.

Aplikace

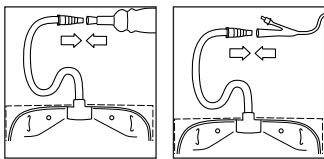


Pokud má konektor ochranný kryt, odstraňte ho.

Připevněte konektor k urinálnímu kondomu nebo permanentnímu katétru.

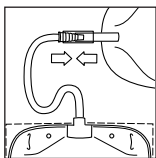

Nebo připevněte konektor k vypouštěcí hadičce stehenního nebo lýtkového sběrného sáčku. Otevřete výpustný ventil lýtkového nebo stehenního sáčku.


Močový sběrný systém je nyní funkční.

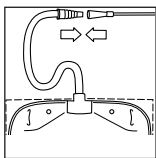

Intermitentní katetrizace

Připevněte konektor k intermitentnímu katétru.

Jakmile začnete katetrizaci, moč začne vytékat do sběrného sáčku k lůžku.

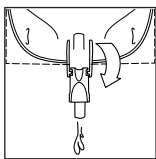

Doporučujeme vyprázdnění sáčku, jakmile je lehce nad polovinou, aby byl zajištěn optimální odvod moči.

Intermitentní katetrizace

Vyprázdněte sběrný sáček k lůžku po každé intermitentní katetrizaci.

Odstraňování

Odpojte sáček od urinálního kondomu nebo katétru.


Pokud je sáček připojen k jinému močovému sběrnému sáčku z důvodu většího objemu, vypouštění, uzavřete vývod sáčku spojený s urinálním kondomem nebo katétre, aniž byste se dotkli otevřeného konce vývodu hadičky. Pak sáčky odpojte.

Pokud se sáček používá sáček připevněný k noze, uvolněte popruhy a sáček z nohy odstraňte. Pokud se sáček používá u lůžka, sejměte jej z věšáku nebo stojanu.

Intermitentní katetrizace

Po dokončení katetrizace odpojte sáček od intermitentního katétru.

Likvidace

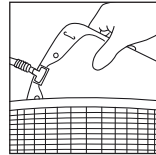

Vyměňte sáček dle místních postupů a doporučení.

Popruhy a věšák nebo stojan na sáček se mohou používat opakovaně.

Sáček vyprázdněte před likvidací.

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobcí a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky.



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Nesterilní



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



Global Trade Item Number



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal