

Katetr
Močový katétr pro intermitentní katetrizaci.


Jak se používá potažený močový katétr EasiCath.

Začněte omytím vašich rukou a oblasti kolem ústí močové trubice. Je důležité, abyste se vyhnuli přenosu bakterií z vašich rukou na katétr.


1. Otevřete sáček 2 - 3 cm.



2. Nalejte vodu z kohoutku do sáčku, dokud nedosáhne ke konektoru. Připravte vše pro katetrizaci.

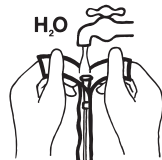

3. Katétr je nutné ponechat ve vodě minimálně po dobu 30 sekund. Zavěste sáček na háček nebo přilepte lepicím bodem na hladký povrch.

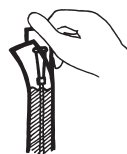

Můžete změnit tuhost katetru. Studená voda způsobí, že katétr ztuhne a vlažná voda způsobí jeho změknutí. Pokud je svěrač vašeho močového měchýře příliš sevřený nebo úzký, je lepší použít relativně tuhý katétr.

Pokud zjistíte, že katétr při manipulaci příliš klouže nebo pokud si přejete použít "bezdotykovou" techniku, je možné otevřít sáček ve spodní části, což umožní odtok vody. Částečně odstraňte obal, přidrže katétr přes obal a přitom jemně zasouvajte katétr do močové trubice.




MIN. 30 SEC.

4A. (Ženy) Vytáhněte katétr z obalu. Roztáhněte stydké pysky jednou rukou, abyste odkryly ústí močové trubice. Použijte druhou ruku pro zasunutí katetru jemně do močové trubice. Ženská močová trubice je téměř rovná a 3 až 4 cm dlouhá. Pokud není v blízkosti toaleta, můžete katétr připojit k urinálnímu sáčku a nechat moč odtékat do sáčku.



4B. (Muži) Vjměte katétr z obalu. Zvedněte svůj penis jednou rukou, abyste narovnali močovou trubici. Použijte druhou ruku pro zavedení katetru do uretry - zasouvajte postupně asi po 2 cm. Mužská močová trubice má tvar podobný písmenu S a je 15 - 20 cm dlouhá. Předtím, než katétr dosáhne močového měchýře, můžete pocítovat lehký odpor působením svěrače. Penis nemačkejte, můžete tím ztížit zavedení katetru. Pokud není v blízkosti toaleta, můžete katétr připojit k urinálnímu sáčku a nechat moč odtékat do sáčku.

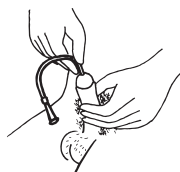

5. Zavedte katétr do močové trubice, dokud nezačne vytékat moč. Jakmile přestane moč vytékat, povytáhněte katétr asi 2 až 3 cm. Pokud začne znovu moč téct, počkejte několik sekund před povytážením katetru o další 1 - 2 cm. Jakmile je močový měchýř úplně prázdný, pomalu katétr vyjměte a hygienicky zlikvidujte. Pokud jste připojili urinální sáček, vyhodte ho spolu s katetrem nebo urinální sáček vypusťte do toalety a použijte znovu.



Návod k použití

23314533 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. [2013-03]

Indikace

Sterilní močový katétr pro intermitentní použití.

Informace

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Katetrizace by měla proběhnout co nejdříve po otevření obalu. Katétr je třeba vždy po vyprázdnění měchýře vyjmout.

Upozornění

Nepoužívejte, je-li balení poškozené.

Obratťe se na svého zdravotníka před provedením první samokatetrizace.

Obratťe se na svého zdravotníka, pokud:

- pokud se u vás vyskytnou příznaky jako je teplota, potíže s vyprazdňováním měchýře, častá potřeba močit nebo krev v moči.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele. Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Tento produkt obsahuje ftaláty a neměl by se používat u dětí nebo těhotných nebo kojících žen bez předchozí konzultace se zdravotníkem.

Symbols



DEHP
DBP

Obsahuje nebo je přítomen ftalát: Kombinace bis-(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) a dibutyl-ftalátu (DBP)



Nepoužívejte, je-li balení poškozené.