

Dvoudílný výpustný stomický sáček

Stomická podložka

Péče o stomii

**Návod k použití**

23324947 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.

Všechna práva vyhrazena. © 2020-11-13

Velcro® vlastní společnost Velcro Industries B.V

Předpokládaný účel

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Indikace

Prostředek je indikován pro stomiky.

Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Upozornění

Než začnete používat konvexní produkt, poraďte se se svým zdravotnickým pracovníkem o náležitém způsobu používání.

Tento nesterilní produkt obsahuje suroviny přírodního původu a existuje určité riziko, že tyto materiály mohou přenášet patogeny, které nelze zcela odstranit ani sebepřísnějšími výrobními postupy.

Proto je produkt u zranitelných skupin pacientů spojen se zvýšeným rizikem infekce a měl by se používat obezřetně u malých dětí a kojenců, kteří ještě nemají plně vyvinutý imunitní systém, a u kojenců, kteří dostávají imunosupresiva.

Informace


Stomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


Stomickou podložku uchovávejte ve vodorovné poloze.

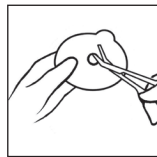Aplikace a odstranění**Příprava**

Vystříhnete v podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a stříhací šablony na podložce.


Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

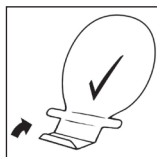


Umístěte sáček na rovný povrch otočený lepícím materiálem směrem dolů.


Zavřete výpust trojnásobným složením spodní části výpustě nahoru tak, aby byl viditelný suchý zip Velcro®.

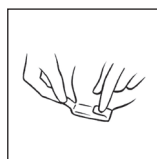


Přeložte obě chlopně dovnitř a zajistěte suchý zip Velcro®.

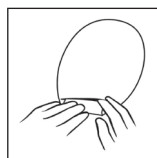


Výpust lze ukrýt pod netkanou textilií.

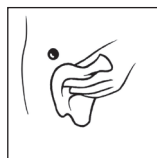

Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací podložky zcela suchá.

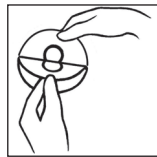
Aplikace

Sejměte ochrannou folii z lepícího materiálu na podložce.

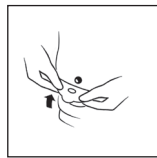

Srovnejte podložku kolem stomie a zatlačte na podložku, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepícího materiálu ke kůži kolem stomie.


Lepicí materiál musí přesně padnout kolem stomie. Aby nedocházelo k podtékání, je důležité zajistit těsné přilnutí lepícího materiálu kolem stomie. Při nalepování podložky přitlačte lepící materiál na břicho nejprve v oblasti kolem stomie. Přejeďte prsty po lepícím materiálu kolem celé stomie, aby byl vývod řádně utěsněn. Podložku uhladte od stomie směrem k vnějším okrajům, aby lepící materiál dokonale přilnul k pokožce.

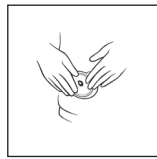


Podložka musí být suchá a čistá (podložku čistěte výhradně vodou).

Odstraňte ochranný papír z lepícího kroužku sáčku.

Netahejte ani nenatahujte pěnovou lepící vrstvu sáčku.

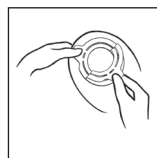

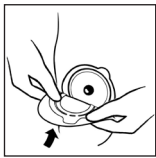


Zarovnejte spodní část upínání sáčku s barevnou čarou na vnějším lemu podložky. Začněte dole, lehce zatlačte prsty na sáček a podložku, a vyhladte spoj směrem nahoru kolem zajišťovacího kroužku.



Těsně po aplikaci je možné jednou změnit polohu sáčku. Ujistěte se, že je obruba při nové aplikaci čistá.

Vyprázdnění sáčku

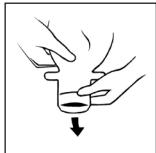

Otevřete výpust a dle potřeby vyprázdněte sáček do toalety.




Očistěte výpust, například toaletním papírem. Složte a znovu zajistěte výpust poté, co jste vyprázdnili sáček.

Odstraňování



Jednou rukou mírně přitlačte na obrubu a sáček odstraňujte druhou rukou, zatažením za tyrkysovou chlopeň. Proveďte to pomalu, aby se sáček snadno odlepil.

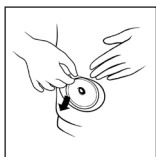

Opatrně odstraňte podložku zatažením za poutko na podložce směrem od břicha a srolujte podložku pomalu směrem dolů. Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Produkt nesplachujte do toalety.

Štítek filtru



Pokud je třeba zabránit úniku plynu, umístěte jeden z přiložených štítků filtru na filtr.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečný při vyšetření MR