

Pooperační stomický sáček Péče o stomii



Návod k použití

23324739 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2020-10-01

Indikace

Sterilní stomický sáček je určen ke sběru výměšků ze stomie. Lepicí materiál je určen k upevnění sáčku a k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Informace

Sterilizováno zářením (R).

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.

Stupnice vytištěná na přední straně sáčku umožňuje vizuální kontrolu výstupního objemu. Stupnici nelze použít pro účely přesného měření.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Upozornění


Nepoužívejte, je-li balení poškozené.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele. Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Výpustný sáček - aplikace a odstranění

Příprava

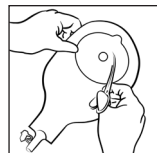


Vystříhnete v lepicím materiálu na podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce.

Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.


Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací lepicího materiálu na podložce zcela suchá.

Aplikace

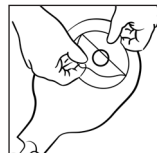


Sejměte ochrannou folii z lepicího materiálu na podložce.

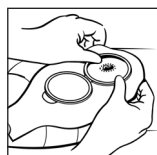

Lepicí materiál nalepte kolem stomie a pevně přitlačte na kůži.

Lepicí materiál musí přesně padnout kolem stomie. Aby nedocházelo k podtékání, je důležité zajistit těsné přilnutí lepicího materiálu kolem stomie. Při nalepování podložky/sáčku přitlačte lepicí materiál na břicho nejprve v oblasti kolem stomie. Přejed'te prsty po lepicím materiálu kolem celé stomie, abyste se ujistili o přilnutí lepicí podložky. Lepicí podložku uhlad'te počínaje od stomie směrem k vnějším okrajům, abyste se ujistili, že je zcela v kontaktu s pokožkou.

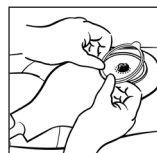

Při zavírání okénka postupujte tak, že ohnete víčko, aby zakrylo okénko, vložte prsty pod ohebnou přírubu / kroužek a zavřete okénko přesunutím prstů k horní části upínání.


Okénko se s klapnutím zavře. Při otvírání okénka postupujte tak, že položíte prsty na ouško okénka, zatímco druhou rukou přidržujete ohebnou přírubu / kroužek a jemně odtáhnete okénko od sáčku.

Vyprázdnění/Vypuštění



Držte výpustný ventil směrem nahoru a zmáčkněte jeho zevní konec, vytáhněte zátku, uvolněte svůj stisk a sáček vypust'te. Po dokončení vypouštění sáčku zajistěte, aby byl výpustný ventil pevně uzavřený kompletně zasunutou zátkou.

Odstraňování

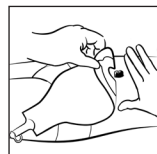

Opatrně odstraňte sáček tažením za odstraňovací ouško na lepicím materiálu směrem od kůže a pak sviňte lepicí materiál pomalu dolů.


Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Produkt nesplachujte do toalety.

Sběrný sáček k lůžku

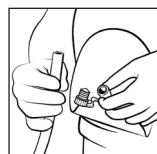

Pro zajištění větší bezpečnosti doporučujeme použít drenážní sáček k lůžku Coloplast Bedside, speciálně navržený pro přímé připojení k pooperačnímu stomickému sáčku SenSura Mio Post Op.

Symbyly



Nepoužívejte, je-li balení poškozené