

Dvoudílný stomický sáček

Stomická podložka

Péče o stomii

**Návod k použití**

23340571 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-11-08

Indikace

Stomický sáček je určen ke sběru výměšků ze stomie. Lepicí materiál je určen k upevnění sáčku a k přilepení k intaktní pokožce kolem stomie/stomie.

Sterilní stomický sáček usnadňuje podávání střevní tráveniny do vyloučeného úseku střeva - mukózní píštěle.

Pokud nejsou přítomny komplikující faktory, produkt lze použít pro předčasně narozené děti od 30. týdne těhotenství až do 6 měsíců věku.

Kontraindikace

SenSura Mio Baby nelze používat u kojenců narozených před 30. týdnem těhotenství z důvodu nezralosti jejich pokožky.

Informace

Sáček je sterilizován ethylenoxidem (EO).

Povrch stomické podložky je ošetřen ultrafialovým zářením typu C (UVC), aby se zajistila čistota produktu. Stomická podložka je nesterilní.

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Upozornění

Při manipulaci s produktem je nutné dodržovat místní hygienické předpisy a nařízení, aby se minimalizovalo riziko kontaminace.

Aplikace tráveniny do mukózní píštěle musí být prováděna v souladu s místními, standardními lékařskými postupy a pod dohledem zdravotnického pracovníka.

Aby nedošlo k obstrukci stomie/stomie, vystříhnete malými zaoblenými nůžkami ve stomické podložce otvor, který bude přesně odpovídat velikosti a tvaru stomie/stomie. Při stříhání nenechávejte na stomické podložce ostré okraje.

Při manipulaci s produktem a při péči o kojence věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste sáček neodtáhli od stomické podložky, protože by to mohlo způsobit poranění pokožky kojence.

Výstrahy

Výpust nepřipojujte k intravenózním (IV) systémům, protože tento typ nesprávného připojení může mít pro kojence fatální následky.


Tento produkt obsahuje nízkou hladinu zbytkových sloučenin z procesu výroby a sterilizace. U kojenců s velmi nízkou porodní hmotností proto existují omezení týkající se počtu výrobků, které by se měly použít. Příslušné pokyny naleznete v části „Způsob použití“.

Opakované použití produktu na jedno použití může kojenci způsobit potenciální újmu. Obnova, čištění, dezinfekce a/nebo sterilizace mohou zhoršit vlastnosti produktu, a tyto zhoršené vlastnosti potom mohou pro kojence představovat další riziko fyzické újmy nebo infekce.

Zrání pokožky (vývoj plné kožní bariéry) extrémně předčasně narozených kojenců může trvat až 8 týdnů po porodu. Použití produktů pro péči o stomii a intaktní pokožku by měl schválit odborník.

Ochranná fólie lepicího materiálu může způsobit udušení z důvodu své malé velikosti, a proto se musí uchovávat mimo dosah dětí.

Stomickou podložku je nutné odstranit pouze vhodným prostředkem k odstraňování lepicího materiálu na bázi oleje, jako je Brava® odstraňovač adheziv pro děti, jinak může být jemná pokožka dítěte vystavena stresu, jako např. podráždění kůže, zarudnutí kůže / mikrokrvácení.

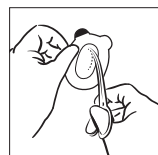
**Způsob použití
Příprava**

Důkladně si očistěte ruce.


Podle linek pro vystřížení vystříhnete ve stomické podložce malými zaoblenými nůžkami otvor, který přesně odpovídá velikosti a tvaru stomie/stomie.

Ke změření velikosti a tvaru stomie/stomie můžete použít přiloženou pomůcku pro měření stomie.


Je důležité, aby otvor přesně dosedl na stomii/stomie a snížilo se tak riziko podtékání, kožních problémů a poranění stomie/stomie.

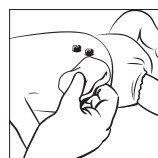

Stomii/stomie a okolní pokožku důkladně očistěte. Před aplikací stomické podložky musí být pokožka naprosto čistá, suchá a bez zbytků dětského pudru a mastných látek.

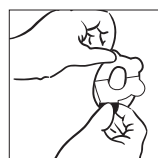
Aplikace

Sloupněte z lepicího materiálu ochrannou fólii a bezpečně ji zlikvidujte mimo dosah dětí.

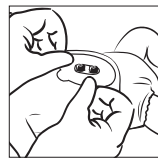

Vyrovnejte stomickou podložku kolem stomie/stomie a lehkým přitlačením na stomickou podložku zajistíte rychlé přilepení a dokonalé přilnutí lepicího materiálu k pokožce kolem stomie/stomie. Odnímací ouška musí směřovat vzhůru. Abyste předešli újmě, ujistěte se, že se stomická podložka nedotýká stomie/stomie.


Při nalepování stomické podložky přitlačte lepicí materiál na břicho nejprve v oblasti kolem stomie/stomie. Přejetím prstem po lepicím materiálu kolem celé stomie/celých stomii zajistíte jeho řádné utěsnění. Uhladte lepicí materiál směrem od stomie/stomie k vnějším okrajům, abyste zajistili jeho dokonalé přilnutí k pokožce.

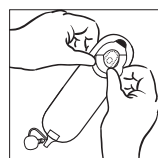


Podložka musí být suchá a čistá (podložku čistěte výhradně vodou).

Odstraňte z lepicího kroužku na sáčku ochranný papír a bezpečně ho zlikvidujte mimo dosah dětí.


Lepicí kroužek na sáčku nenatahujte ani nenapínejte.

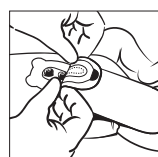


Zarovnejte spodní část lepicího kroužku na sáčku s tyrkysovou obrubou umístěnou na stomické podložce.

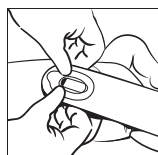

Začněte ve spodní části, kde prsty lehce zatlačte na sáček a stomickou podložku a vyhleďte lepicí kroužek na sáčku směrem nahoru, po celém obvodu obruby. Po aplikaci je možné změnit pozici sáčku. Při opětovné aplikaci musí být stomická podložka / obruba čistá. Před použitím nezapomeňte zavřít výpust.

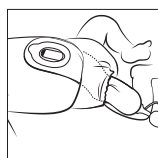

Za účelem zajištění sáčku je možné sáček zasunout pod plenu.

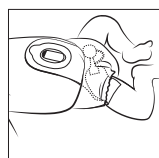


Při manipulaci s produktem a při péči o kojence věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste sáček neodtáhli od stomické podložky, protože by to mohlo způsobit poranění pokožky kojence.

Vyprazdňování



Držte výpustný ventil směrem nahoru a zmáčkněte jeho zevní konec, vytáhněte zátku, uvolněte svůj stisk a sáček vypusťte. Po dokončení vypouštění sáčku zajistěte, aby byl výpustný ventil pevně uzavřený kompletně zasunutou zátkou.

Usnadnění aplikace tráveniny do střívka

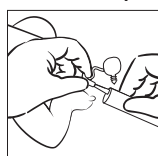

Pokud je nutné podat střevní tráveninu do vyloučeného úseku střeva - mukózní píštěle, použijte vhodnou injekční stříkačku, která bude pasovat do výpusti, a odveďte potřebné množství výměšků ze sáčku.

Doporučení, jak často měnit stomický sáček a podložku

Předčasně narození kojenci mají tenkou, citlivou pokožku a nižší tělesnou hmotnost než dospělí pacienti. Tento produkt obsahuje nízkou hladinu zbytkových sloučenin z procesu výroby a sterilizace. Aby nedošlo k překročení expozičních limitů, což může mít za následek krátkodobé a dlouhodobé účinky, jsou stanovena omezení týkající se modelu, jak často měnit stomickou pomůcku.

Výměna stomické podložky


U kojenců s velmi nízkou porodní hmotností (1–1,5 kg) by doba používání stomické podložky měla být minimálně 36 hodin.

Výměna sáčků

Platí následující model, jak často sáček vyměňovat:

| Hmotnost kojence | Maximální počet sáčků, které lze denně použít |
|------------------|---|
| 1-1.5 kg | 2 |
| 1.5-2 kg | 3 |
| >2 kg | 4 |

Odstraňování

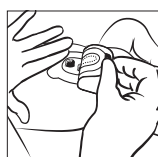

Sáček

Důkladně si očistěte ruce. Sáček opatrně odstraňte zatažením za jeho odnímací ouško směrem od stomické podložky a stahujte ho pomalu směrem dolů. Provedte to pomalu, aby se sáček snadno odlepil. Výměšky ze sáčku vypusťte podle požadavků nemocnice a pacienta (interval mezi vyprázdněním sáčku a jeho výměnou).



Stomická podložka

Stomickou podložku opatrně odstraňte pomocí prostředku k odstraňování lepicího materiálu na bázi oleje, jako např. Brava® odstraňovač adheziv pro děti. Otevřete sáček s odstraňovačem odtržením malé části prsty nebo odstřížením nůžkami.

Naneste odstraňovač adheziv na bázi oleje kolem okraje lepicího materiálu prstem nebo vatovým tamponem. Pokud je aplikace odstraňovače adheziv na bázi oleje přímo ze sáčku obtížná nebo nepohodlná, vylijte prostředek do nádoby a naneste prstem nebo vatovým tamponem. Nechte prostředek chvíli absorbovat a poté opatrně odstraňte lepicí materiál.


Opatrně odstraňte lepicí materiál odtahováním jednou rukou. V případě potřeby průběžně uvolňujte lepicí materiál odstraňovačem adheziv.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Okénko pro aplikaci tráveniny do střívka

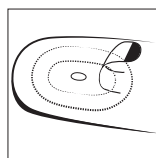

Do stomie se dostanete otevřením štítku na okénku pro aplikaci tráveniny do střívka.

Symbyly



Nepoužívejte, je-li balení poškozené



Neklopit