

SenSura[®] Mio Kids

Dvoudílný výpustný stomický sáček s adhezivním upínáním

Péče o stomii



Návod k použití

23328260 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-09-21

Velcro[®] vlastní společnost Velcro Industries B.V

Určený účel

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nepoškozené kůži kolem stomie.

Indikace

Tento prostředek je určen pro kojence a děti ve věku od 6 měsíců do 4 let.

Výstrahy

Opakované použití jednorázového produktu může dítěti potenciálně způsobit újmu.

Obnova, mytí, dezinfekce a sterilizace mohou narušit vlastnosti produktu a představovat tak další riziko fyzické újmy nebo infekce dítěte.

Upozornění

Aby nedošlo k obstrukci stomie, vystříhnete malými zahnutými nůžkami ve stomické podložce otvor, který bude přesně odpovídat velikosti a tvaru stomie. Při stříhání nenechávejte na stomické podložce ostré okraje.

Informace

Stomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


Zvláštní podmínky uchovávání

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.

Způsob použití


Příprava

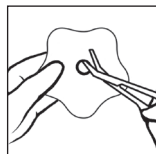

Vystříhnete v podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a stříhací šablony na podložce.


Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

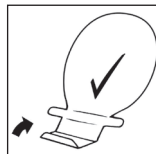


Umístěte sáček na rovný povrch, lepicí stranou směrem dolů.

Zavřete výpust trojnásobným složením spodní části výpustě nahoru tak, aby byl viditelný suchý zip Velcro[®].

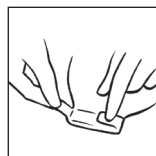


Přeložte obě chlopně dovnitř a zajistěte suchý zip Velcro[®].

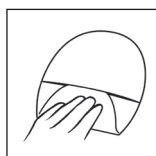

Výpust je možné skrýt pomocí bodu na suchý zip Velcro[®] těsně nad výpustí nebo pomocí Velcro[®] suchého zipu ve střední části sáčku.

(Toto se netýká průhledných sáčků, kde není žádný suchý zip Velcro[®] ve střední části sáčku.)

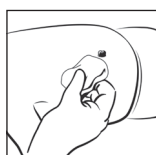

Důkladně si očistěte ruce, stomii a okolní kůži. Před aplikací stomické podložky musí být pokožka naprosto čistá, suchá a bez zbytků dětského pudru a mastných látek.

Aplikace




Sloupněte ze stomické podložky ochrannou fólii a bezpečně ji zlikvidujte mimo dosah dětí.



Srovnejte podložku kolem stomie a zatlačte na podložku, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepicího materiálu ke kůži kolem stomie.


Abyste předešli újmě, ujistěte se, že se stomická podložka nedotýká stomie.

Při nalepování stomické podložky / sáčku nejprve lehce přitlačte lepicí materiál na břicho v oblasti kolem stomie. Přejetím prstem po lepicím materiálu kolem celé stomie zajistěte jeho řádné utěsnění. Uhladte lepicí materiál směrem od stomie k vnějším okrajům, abyste zajistili jeho dokonalé přilnutí ke kůži.

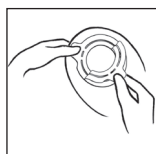


Podložka musí být suchá a čistá (podložku čistěte výhradně vodou).

Odstraňte z lepicího kroužku na sáčku ochranný papír a bezpečně ho zlikvidujte mimo dosah dětí. Pěnové lepidlo na sáčku nenatahujte ani nenapínejte.

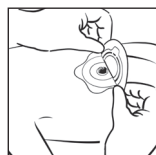


Zarovnejte spodní část upínání sáčku s obrubou/ upínáním umístěným na stomické podložce.

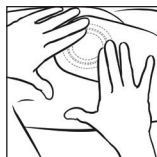

Mírným tlakem prstů na sáček a stomickou podložku vyhladíte upínání od spodní části kolem celého upínacího kroužku.
Hned po aplikaci je možné změnit jednu pozici sáčku. Při opětovném nalepování se ujistěte, že je obruba čistá. Při manipulaci s produktem a při péči o dítě věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste sáček neúmyslně neodtáhli od stomické podložky, protože by to mohlo způsobit poranění pokožky kojence.

Ke kontrole lze použít okénko (platí pouze pro sáčky s kontrolním okénkem).

Vyprázdnění sáčku

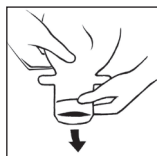


Otevřete výpust a dle potřeby vyprázdněte sáček do toalety.




Očistěte výpust, například toaletním papírem. Složte a znovu zajistěte výpust poté, co jste vyprázdnili sáček.

Odstraňování

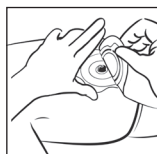

Odstranění sáčku

Jednou rukou mírně přitlačte na obrubu a druhou rukou odstraňujte sáček zatažením za chlopeň. Proveďte to pomalu, aby se sáček snadno odlepil.

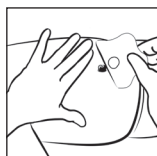

Odstranění stomické podložky


Opatrně odlepte stomickou podložku odtažením jejího odnímacího ouška směrem od břicha a pomalu ji srolujte směrem dolů.
Snímání si usnadníte, když kůži lehce volnou rukou přitlačíte.

Likvidace

Produkt je určen pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s běžným domácím odpadem.

Produkt nesplachujte do toalety.

Štítek filtru

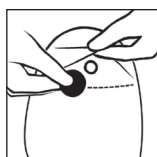

Pokud je třeba zabránit úniku plynu, umístěte jeden z přiložených štítků filtru na filtr.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR