

# SenSura<sup>®</sup> Mio Kids

Jednodílný výpustný stomický sáček

Péče o stomii



## Návod k použití

23328257 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-09-23

Velcro<sup>®</sup> vlastní společnost Velcro Industries B.V

## Určený účel

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nepoškozené kůži kolem stomie.

## Indikace

Tento prostředek je určen pro kojence a děti ve věku od 6 měsíců do 4 let.

## Výstrahy

Opakované použití jednorázového produktu může dítěti potenciálně způsobit újmu.

Obnova, mytí, dezinfekce a sterilizace mohou narušit vlastnosti produktu a představovat tak další riziko fyzické újmy nebo infekce dítěte.

## Upozornění

Aby nedošlo k obstrukci stomie, vystříhňte malými zahnutými nůžkami ve stomické podložce otvor, který bude přesně odpovídat velikosti a tvaru stomie. Při stříhání nenechávejte na stomické podložce ostré okraje.

## Informace

Stomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


## Zvláštní podmínky uchovávání

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.


Uchovávat mimo sluneční záření.

## Způsob použití


### Příprava

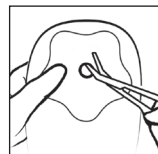


Vystříhňte v lepicím materiálu na podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce. Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie. Je důležité, aby otvor dosedl přesně na stomii a snížilo se tak riziko podtékání, kožních problémů a poranění stomie.

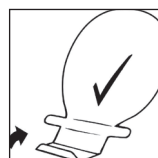

Umístěte sáček na rovný povrch, lepicí stranou směrem dolů. Zavřete výpust trojnásobným složením spodní části výpustě nahoru tak, aby byl viditelný suchý zip Velcro<sup>®</sup>.

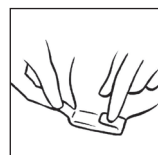


Přeložte obě chlopně dovnitř a zajistěte suchý zip Velcro<sup>®</sup>.

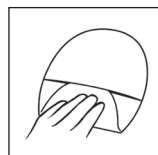

Výpust je možné skrýt pomocí bodu na suchý zip Velcro<sup>®</sup> těsně nad výpustí nebo pomocí Velcro<sup>®</sup> suchého zipu ve střední části sáčku.

(Toto se netýká průhledných sáčků, kde není žádný suchý zip Velcro<sup>®</sup> ve střední části sáčku.)

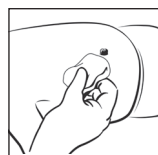

Důkladně si očistěte ruce, stomii a okolní kůži. Před aplikací lepicího materiálu musí být kůže naprosto čistá, suchá a bez zbytků dětského pudru a mastných látek.

### Aplikace




Sloupněte z lepicího materiálu ochrannou fólii a bezpečně ji zlikvidujte mimo dosah dětí.




Vyrovnejte lepicí materiál kolem stomie a přitlačením na lepicí materiál zajistěte rychlé přilepení a dokonalé přilnutí lepicího materiálu ke kůži kolem stomie. Abyste předešli újmě, ujistěte se, že se lepicí materiál nedotýká stomie.

S aplikací lepicího materiálu / sáčku na břicho začněte v oblasti kolem stomie a pokračujte jemným přitlačováním lepicího materiálu na kůži. Přejetím prstem po lepicím materiálu kolem celé stomie zajistěte jeho řádné utěsnění. Uhlazením lepicího materiálu směrem od stomie k vnějším okrajům zajistěte jeho dokonalé přilnutí ke kůži.

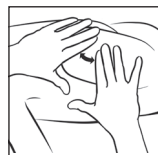

Zatlačte na sáček, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepicího materiálu ke kůži kolem stomie.

### Vyprázdnění sáčku

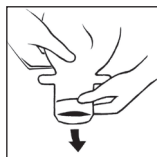

Otevřete výpusť a dle potřeby vyprázdněte sáček do toalety.



Očistěte výpusť, například toaletním papírem. Složte a znovu zajistěte výpusť poté, co jste vyprázdnili sáček.

### Odstraňování




Opatrně odstraňte sáček tažením za odstraňovací ouško na lepicím materiálu směrem od kůže, a pak sviňte lepicí materiál pomalu dolů. Snímání si usnadněte, když kůži lehce volnou rukou přitlačíte.

### Likvidace

Produkt je určen pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s běžným domácím odpadem.

Produkt nesplachujte do toalety.

### Štítek filtru

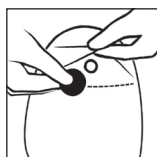

Pokud je třeba zabránit úniku plynu, umístěte jeden z přiložených štítků filtru na filtr.

### Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

### Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR