

SenSura[®] Mio Kids

Urostomický sáček, jednodílný

Péče o stomii



Návod k použití

23328258 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2021-09-23

Určený účel

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Indikace

Tento prostředek je určen pro kojence a děti ve věku od 6 měsíců do 4 let.

Výstrahy

Opakované použití jednorázového produktu může dítěti potenciálně způsobit újmu.

Obnova, mytí, dezinfekce a sterilizace mohou narušit vlastnosti produktu a představovat tak další riziko fyzické újmy nebo infekce dítěte.

Nenaplnějte sáček nad zpětný ventil, protože by to mohlo způsobit zpětný tok moči.

Použití stentu (stentů) nebo katétru (katétrů) v urostomickém sáčku může vést k případné újmě dítěte, protože oslabuje funkci ventilu proti zpětnému toku moči.

Upozornění

Aby nedošlo k obstrukci stomie, vystříhněte malými zahnutými nůžkami ve stomické podložce otvor, který bude přesně odpovídat velikosti a tvaru stomie. Při stříhání nenechávejte na stomické podložce ostré okraje.

Informace

Stomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


Zvláštní podmínky uchovávání

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.

Způsob použití


Příprava

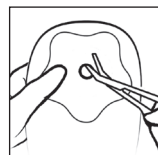

Vystříhněte v lepicím materiálu na podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce.

Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsností a kožních problémů.

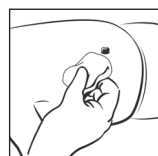

Důkladně si očistěte ruce, stomii a okolní kůži. Před aplikací lepicího materiálu musí být kůže naprosto čistá, suchá a bez zbytků dětského pudru a mastných látek.

Aplikace



Sloupněte z lepicího materiálu ochrannou fólii a bezpečně ji zlikvidujte mimo dosah dětí.



Vyrovnejte lepicí materiál kolem stomie a přitlačením na lepicí materiál zajistíte rychlé přilepení a dokonalé přilnutí lepicího materiálu ke kůži kolem stomie.

Abyste předešli újmě, ujistěte se, že se lepicí materiál nedotýká stomie.

S aplikací lepicího materiálu / sáčku na břicho začněte v oblasti kolem stomie a pokračujte jemným přitlačováním lepicího materiálu na kůži. Přejetím prstem po lepicím materiálu kolem celé stomie zajistíte jeho řádné utěsnění. Uhlazením lepicího materiálu směrem od stomie k vnějším okrajům zajistíte jeho dokonalé přilnutí ke kůži.



Zatlačte na sáček, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepicího materiálu ke kůži kolem stomie.


Před použitím nezapomeňte zavřít výpust.



Výpust lze ukryt do kapsy na přední straně, což je pohodlnější a diskrétnější.

(Týká se pouze sáčků s přední stranou z textilu.)

Vyprázdnění sáčku

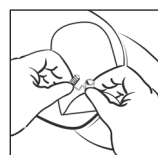

Držte výpustný ventil směrem nahoru a zmáčkněte jeho zevní konec, vytáhněte zátku, uvolněte svůj stisk a sáček vypusťte. Po dokončení vypouštění sáčku zajistěte, aby byl výpustný ventil pevně uzavřený kompletně zasunutou zátkou.

Odstraňování



Opatrně odstraňte sáček tažením za odstraňovací ouško na lepicím materiálu směrem od kůže, a pak sviňte lepicí materiál pomalu dolů.


Snímání si usnadníte, když kůži lehce volnou rukou přitlačíte.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Noční sběrný sáček

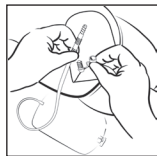

Vzhledem k objemu urostomického sáčku doporučujeme během spánku používat sběrný noční sáček Coloplast k použití u lůžka. Sběrný noční sáček Coloplast k použití u lůžka je speciálně navržený tak, aby se dal připojit přímo k urostomickému sáčku. Urostomické sáčky však lze pomocí dodaného konektoru připojit ke všem typům sběrných sáčků k použití u lůžka. Úzký konec konektoru se zatlačí do výpusti urostomického sáčku a druhý konec se připojí k nočnímu sběrnému sáčku k použití u lůžka.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobcí a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR