

# SenSura<sup>®</sup> Mio Concave

## Konkávní stomický sáček

Urostomický sáček, jednodílný



Návod k použití

## **Předpokládaný účel**

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

## **Indikace**

Prostředek je indikován pro stomiky.

## **Varování**

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, protože může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

## **Informace**

Urostomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

## **Zvláštní podmínky uchovávání**


Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.

## **Ohlašování nežádoucích příhod**

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.


# Popis sáčku

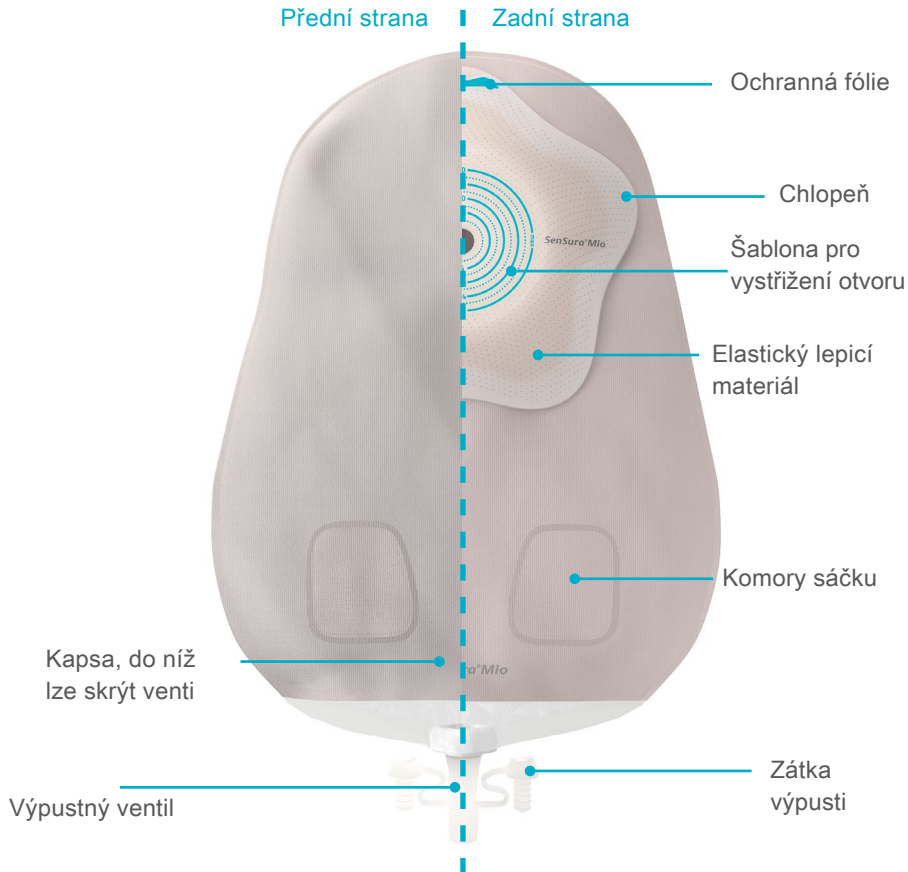

# Aplikace a odstranění

## Příprava

1

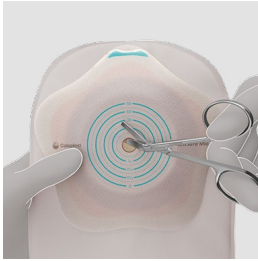

Vystříhnete v lepicím materiálu otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce.


Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Tvar stomie se může měnit, proto ji doporučujeme měřit, když je největší. Většinou to bývá, když právě sedíte.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

Zavřete výpustný ventil výpustě.

2

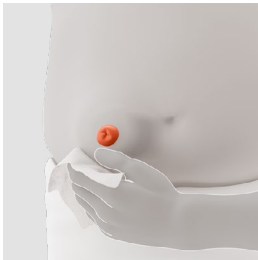

Důkladně stomii a okolní kůži očistěte.

Kůže musí být před aplikací lepicího materiálu zcela suchá.


## Aplikace

3




Překlopením všech 5 chlopní připravte lepicí materiál k aplikaci.

4

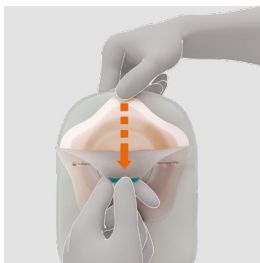

Sejměte ochrannou fólii z lepicího materiálu na podložce.

5

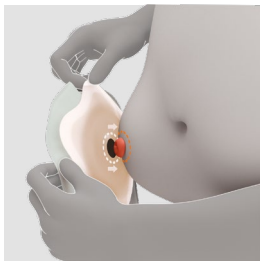


Lepicí materiál držte tak, aby chlopně byly ohnuté směrem dozadu. Otvor ve středu lepicího materiálu nasadte na stomii.

Opatrně přitlačte vnitřní středovou část kolem stomie na kůži.

Poté překlopte chlopně dolů přes vnější část.

6

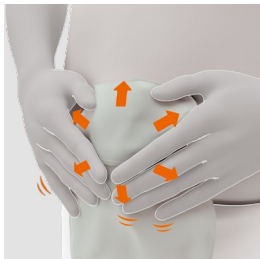

Pevně přitlačte lepicí materiál na pokožku od středu směrem ven.

7



Ukazováčkem najděte měkký stabilizační kroužek kolem stomie. Opatrným zatlačením na lepicí materiál mezi kroužkem a stomií (nebo přímo na stabilizační kroužek) zajistěte, aby středová část lepicího materiálu neprodyšně přilnula ke kůži.

8



Aplikujte tlak od středu lepicího materiálu a směrem ven ve více směrech, abyste dosáhli pevného přilnutí lepicího materiálu k pokožce kolem stomie.

# Vyprazdňování

9



Držte výpustný ventil směrem nahoru a zmáčkněte jeho zevní konec, vytáhněte zátku, uvolněte svůj stisk a sáček vypustíte. Po dokončení vypouštění sáčku zajistěte, aby byl výpustný ventil pevně uzavřený kompletně zasunutou zátkou.

10



Výpustný ventil je možné skrýt do kapsy vpředu, aby bylo nošení sáčku pohodlnější a diskrétnější. (Týká se pouze sáčků s přední stranou z textilu).

# Odstraňování



Opatrně odstraňte sáček zatažením za poutko na lepicím materiálu směrem od břicha a srolujte lepicí materiál pomalu směrem dolů.

Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

# Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.



# Řešení opakujících se problémů

?

## Lepicí materiál na kůži špatně drží

Je nezbytné dodržovat pokyny k použití uvedené v této příbalové informaci a zajistit, aby kůže byla před aplikací zcela čistá a suchá. Je důležité, aby lepicí materiál zcela přilnul ke každému záhybu kůže. Při aplikaci na lepicí materiál tlačte, abyste zajistili dostatečné přilnutí.

?

## Pokožka je pod stomickou podložkou červená a/nebo podrážděná

Podráždění pokožky může mít mnoho příčin. Může být způsobeno podtékáním, které vzniká proto, že jste použili nesprávnou pomůcku nebo nesprávně zvolenou velikost šablony. Důvodem může však být i nedostatečné čištění nebo rychlé odstranění lepicího materiálu, které může kůži podráždit. Je-li kůže červená, mohlo by pomoci používání odstraňovače lepicího materiálu. Takový problém co nejdříve proberte se stomickou sestrou.

?

## Podtékání pod lepicím materiálem

Podtékání může mít mnoho příčin. Může vznikat kvůli měnícímu se tvaru nebo výšce těla nebo stomie či kvůli nesprávné aplikaci lepicího materiálu. Zkuste podstoupit samovyšetření BodyCheck na webových stránkách [www.bodycheck.coloplast.com](http://www.bodycheck.coloplast.com), abyste zjistili, zda se nezměnil váš tělesný profil. Pokud se tak stalo, možná budete potřebovat jinou pomůcku nebo by vám mohla pomoci pomůcka z řady příslušenství pro péči o stomie a o kůži v okolí stomie. Takový problém je třeba co nejdříve probrat se stomickou sestrou.



### **Obtížné odstraňování ochranné fólie**

Před sloupnutím fólie je důležité obrátit všech pět chlopní. Viz pokyny k postupu odstranění v krocích 3 a 4 v tomto letáku nebo instruktážní video na <http://www.coloplast.cz/concave1d/uro>



### **Po aplikaci jsou na lepicím materiálu často záhyby**

Aby chlopně pevně a rovnoměrně přilnuly na případná vyboulení, uhlad'te veškeré záhyby a materiál na pokožku silně přitlačte. Pokud se stále potýkáte s potížemi, zvažte možnost samovyšetření BodyCheck na webu [www.bodycheck.coloplast.com](http://www.bodycheck.coloplast.com), kde můžete zjistit, zda pro váš tělesný profil není doporučen jiný produkt.



## Návod k použití je dostupný i na videu

Chcete-li se podívat na instruktážní video, oskenujte QR kód nebo  
přejděte na <http://www.coloplast.cz/concave1d/uro>

# Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number)  
Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR



Coloplast A/S  
Høtvedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

## Návod k použití

23325190 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti

Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2020-12-09



**Coloplast**