

Předpokládaný účel

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Indikace

Prostředek je indikován pro stomiky.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Informace

Stomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Zvláštní podmínky uchovávání

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.


Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobcí a vašemu státnímu orgánu.

Aplikace a odstranění

Příprava

1

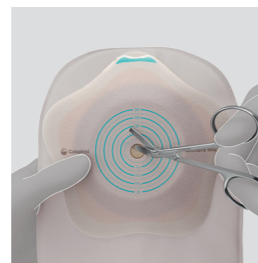

Vystříhnete v lepicím materiálu otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce.

Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Tvar stomie se může měnit, proto ji doporučujeme měřit, když je největší. Většinou to bývá, když právě sedíte.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.


2



Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací lepicího materiálu zcela suchá.


Aplikace

3

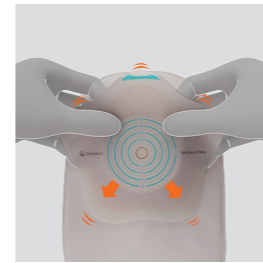


Překlopením všech 5 chlopní připravte lepicí materiál k aplikaci.

4

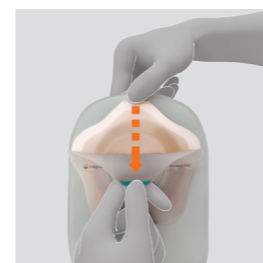


Sejměte ochrannou fólii z lepicího materiálu na podložce.

5

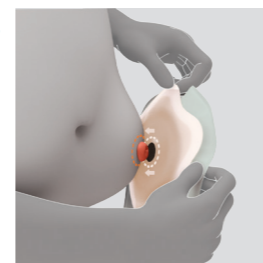


Lepicí materiál držte tak, aby chlopně byly ohnuté směrem dozadu. Otvor ve středu lepicího materiálu nasadte na stomii. Opatrně přitlačte vnitřní středovou část kolem stomie na kůži. Poté překlopte chlopně dolů přes vnější část.

6

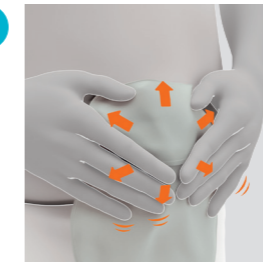

Pevně přitlačte lepicí materiál na pokožku od středu směrem ven.

7

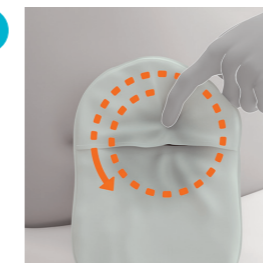


Ukazováčkem najděte měkký stabilizační kroužek kolem stomie. Opatrným zatlačením na lepicí materiál mezi kroužkem a stomií (nebo přímo na stabilizační kroužek) zajistěte, aby středová část lepicího materiálu neprodyšně přilnula ke kůži.

8



Aplikujte tlak od středu lepicího materiálu a směrem ven ve více směrech, abyste dosáhli pevného přilnutí lepicího materiálu k pokožce kolem stomie.

Štítek filtru

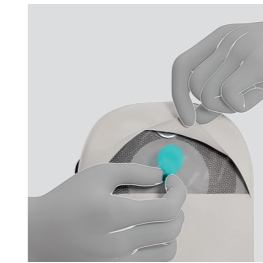

Pokud chcete dočasně zabránit úniku plynu ze sáčku, uzavřete fi ltr tím, že jej přelepíte jednou z přiložených samolepek na fi ltr. Uzavření fi ltru na delší dobu by způsobilo nafouknutí sáčku, a proto byste jej měli nechat přelepený samolepkou jen krátce.




Návod k použití je dostupný i na videu

Chcete-li se podívat na instruktážní video, oskenujte QR kód nebo přejděte na

www.coloplast.cz/concave1d/uzav

Popis sáčku

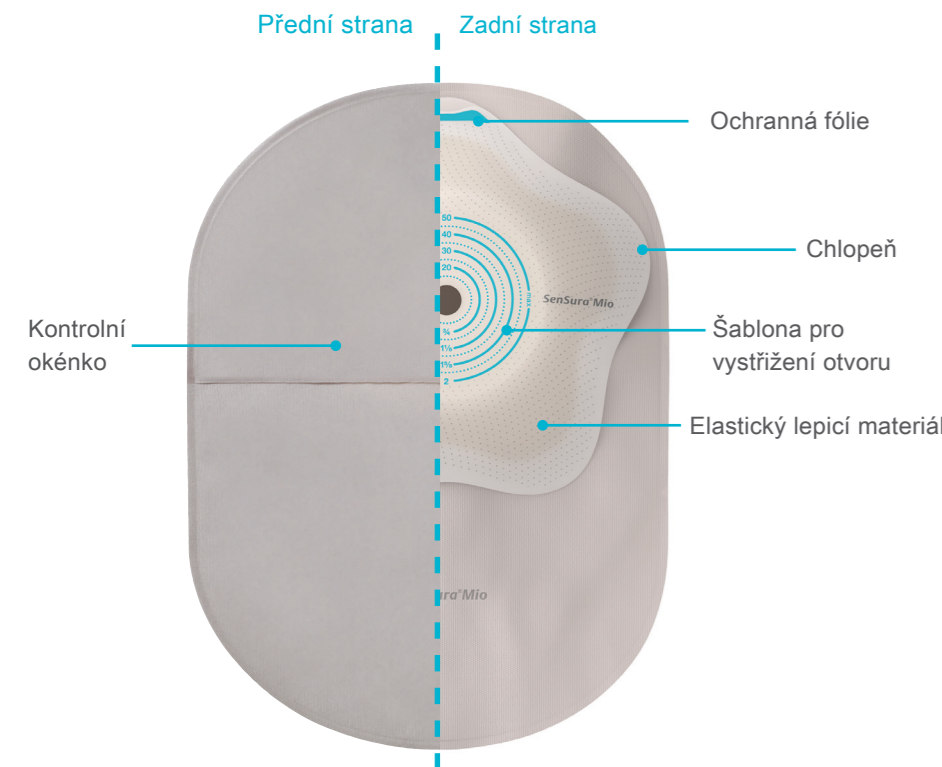

Odstraňování



Opatrně odstraňte sáček zatažením za poutko na lepicím materiálu směrem od břicha a srolujte lepicí materiál pomalu směrem dolů.

Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Řešení opakujících se problémů

? Lepicí materiál na kůži špatně drží

Je nezbytné dodržovat pokyny k použití uvedené v této příbalové informaci a zajistit, aby kůže byla před aplikací zcela čistá a suchá. Je důležité, aby lepicí materiál zcela přilnul ke každému záhybu kůže. Při aplikaci na lepicí materiál tlačte, abyste zajistili dostatečné přilnutí.

? Pokožka je pod stomickou podložkou červená a/nebo podrážděná

Podráždění pokožky může mít mnoho příčin. Může být způsobeno podtékáním, které vzniká proto, že jste použili nesprávnou pomůcku nebo nesprávně zvolenou velikost šablony. Důvodem může však být i nedostatečné čištění nebo rychlé odstranění lepicího materiálu, které může kůži podráždit. Je-li kůže červená, mohlo by pomoci používání odstraňovače lepicího materiálu. Takový problém co nejdříve proberte se stomickou sestrou.

? Podtékání pod lepicím materiálem

Podtékání může mít mnoho příčin. Může vznikat kvůli měnícímu se tvaru nebo výšce těla nebo stomie či kvůli nesprávné aplikaci lepicího materiálu. Zkuste podstoupit samovyšetření BodyCheck na webových stránkách www.bodycheck.coloplast.com, abyste zjistili, zda se nezměnil váš tělesný profil. Pokud se tak stalo, možná budete potřebovat jinou pomůcku nebo by vám mohla pomoci další pomůcka z řady příslušenství pro péči o stomie a o kůži v okolí stomie. Takový problém je třeba co nejdříve probat se stomickou sestrou.

Vysvětlení symbolů

MD Zdravotnický prostředek

CE Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky

REF Katalogové číslo

Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)

LOT Kód šarže

Datum výroby (RRRR-MM-DD)

Výrobce

Přečtěte si návod k použití

Určeno na jedno použití

UDI Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení

GTIN (Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky

Uchovávat mimo sluneční záření

Neklopit

Recyklovatelný obal

MR Bezpečné při vyšetření MR

CE Coloplast A/S
Holtevej 1
3050 Humlebaek
Denmark

Návod k použití

23325230 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti

Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2020-12-16



SenSura[®] Mio Concave

Konkávni stomický sáček

1-dílný uzavřený sáček



Návod k použití