

Předpokládaný účel

Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Indikace

Prostředek je indikován pro stomiky.

Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, protože může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Informace

Stomická podložka na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Zvláštní podmínky uchování

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.


Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Aplikace a odstranění

Příprava

1

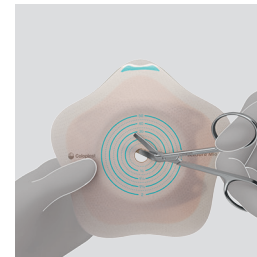


Vystříhnete v podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a stříhací šablony na podložce.

Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Tvar stomie se může měnit, proto ji doporučujeme měřit, když je největší. Většinou to bývá, když právě sedíte.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsností a kožních problémů.


2

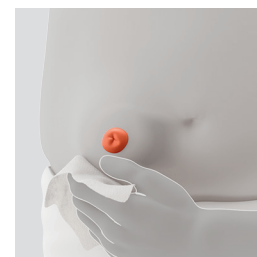

Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací lepicího materiálu na podložce zcela suchá.


Aplikace

3

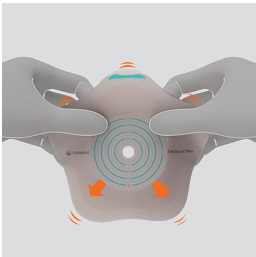


Překlopením všech 5 chlopní připravte stomickou podložku k aplikaci.

4

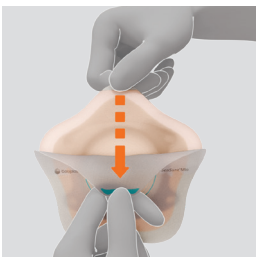

Odstraňte ochrannou fólii ze stomické podložky.


5

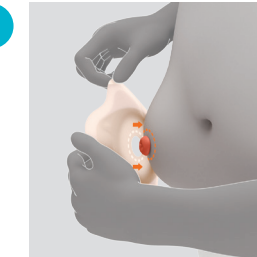

Stomickou podložku držte tak, aby její chlopně byly ohnuté směrem dozadu. Středový otvor v podložce nasadte na stomii.


Přitlačte středovou část opatrně na pokožku. Poté překlopte chlopně dolů přes vnější část.

6

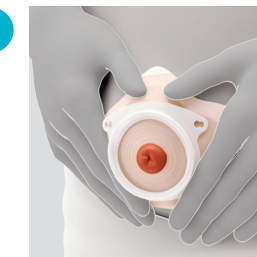


Pevně přitlačte stomickou podložku na pokožku od středu směrem ven.

7

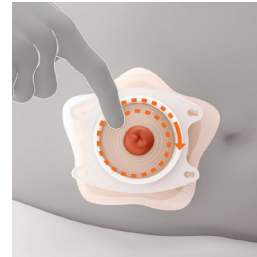


Umístěte ukazováček do spojovacího kroužku, který obklopuje stomii. Opatrně zatlačte na stomickou podložku mezi upínacím kroužkem a stomii, aby střední část stomické podložky neprodyšně přilnula k pokožce.

8

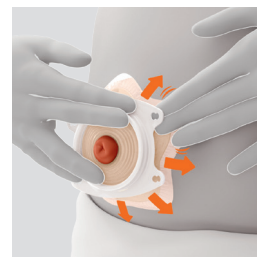

Aplikujte tlak od středu stomické podložky a směrem ven ve více směrech, abyste dosáhli pevného přilnutí stomické podložky k pokožce kolem stomie.


9

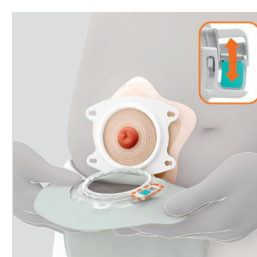

Před použitím sáčku zkontrolujte, že je stomická podložka čistá. Zkontrolujte, že je zámeček na mechanickém kroužku otevřený.

Dolní stranu mechanického kroužku na sáčku nasadte na dolní stranu mechanického kroužku na podložce.

Popis podložky

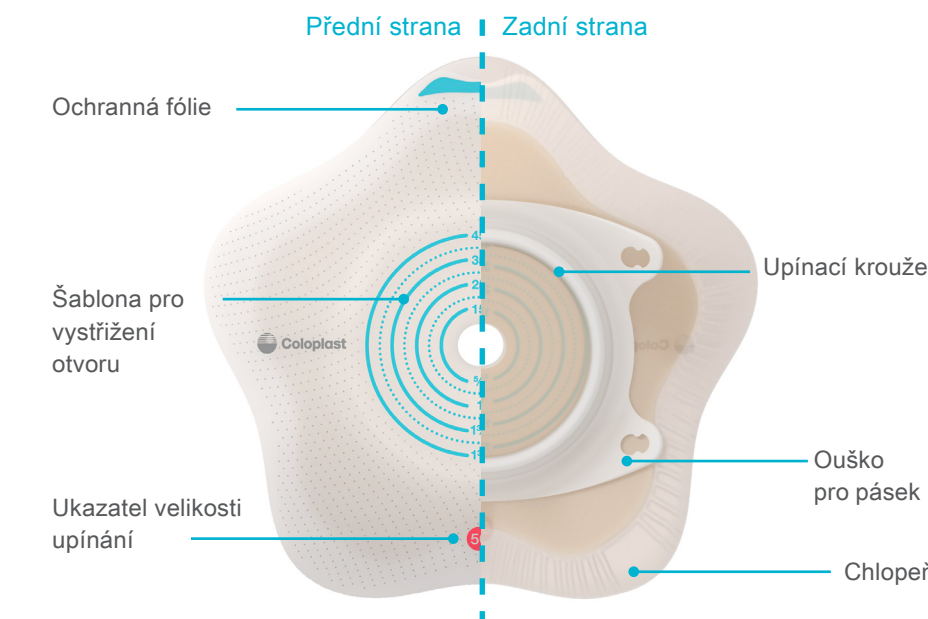

Ochranná fólie

Šablona pro vystřížení otvoru

Ukazatel velikosti upínání

Přední strana | Zadní strana

Upínací kroužek

Ouško pro pásek


Chlopeň

10




Pomocí prostředníčků zacvakněte kroužky na podložce a sáčku do sebe.

11

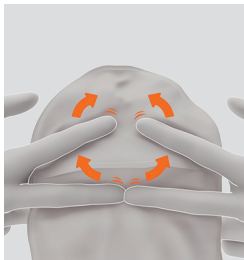

Posouvejte ukazováčky po kroužku směrem nahoru a jemně tlačte na horní stranu upínání, **dokud neucítíte, že je sáček bezpečně připevněn** ke stomické podložce.

12

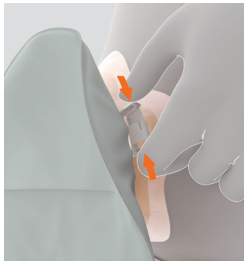


Upínací mechanický kroužek zajistěte. Sáček je ke stomické podložce bezpečně připevněn ve chvíli, kdy uslyšíte "cvaknutí" zámečku.

Jemným zatažením za sáček se ujistěte, že je správně připevněn.


Odstraňování

1

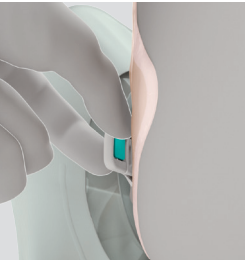


Otevřete mechanický kroužek tím, že konečkem prstu stisknete na zámečku tyrkysovou chlopeň směřující k břichu.

2

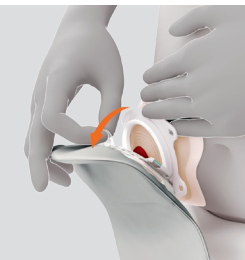

Sáček uchopte za ouško určené pro odstranění sáčku z podložky a **opatrným tahem** odpojte sáček od stomické podložky.

3

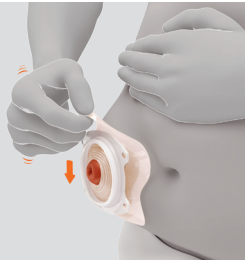

Opatrně odstraňte podložku zatažením za poutko na podložce směrem od břicha a srolujte podložku pomalu směrem dolů.

Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Více informací o sáčku

Další informace o tom, jak sáček používat, najdete v návodu k použití, který je součástí prodejního balení sáčku.



Návod k použití je dostupný i na videu

Chcete-li se podívat na instruktážní video, oskenujte QR kód nebo přejděte na

www.coloplast.cz/concave2d/podl

Řešení opakujících se problémů

?

Stomická podložka na kůži špatně drží

Je nezbytné dodržovat pokyny k použití uvedené v této příbalové informaci a zajistit, aby kůže byla před aplikací zcela čistá a suchá. Je důležité, aby stomická podložka zcela přilnula ke každému záhybu kůže. Při aplikaci na stomickou podložku tlačte, abyste zajistili dostatečné přilnutí.

?

Pokožka je pod stomickou podložkou červená a/nebo podrážděná

Podráždění pokožky může mít mnoho příčin. Může být způsobeno podtékáním, které vzniká proto, že jste použili nesprávnou pomůcku nebo nesprávně zvolenou velikost šablony. Důvodem může však být i nedostatečné čištění nebo rychlé odstranění lepicího materiálu, které může kůži podráždit. Je-li kůže červená, mohlo by pomoci používání odstraňovače adheziv. Takový problém co nejdříve proberte se stomickou sestrou.

?

Podtékání pod stomickou podložkou

Podtékání může mít mnoho příčin. Může vznikat kvůli měnícímu se tvaru nebo výšce těla nebo stomie či kvůli nesprávné aplikaci stomické podložky. Zkuste podstoupit samovyšetření BodyCheck na webových stránkách www.bodycheck.coloplast.com, abyste zjistili, zda se nezměnil váš tělesný profil. Pokud se tak stalo, možná budete potřebovat jinou pomůcku nebo by vám mohla pomoci pomůcka z řady příslušenství pro péči o stomie a o kůži v okolí stomie. Takový problém co nejdříve proberte se stomickou sestrou.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečné při vyšetření MR



Návod k použití

23325248 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti


Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. © 2020-12-07



SenSura[®] Mio Concave

Konkávní stomická podložka

2dílná stomická podložka s mechanickým upínáním

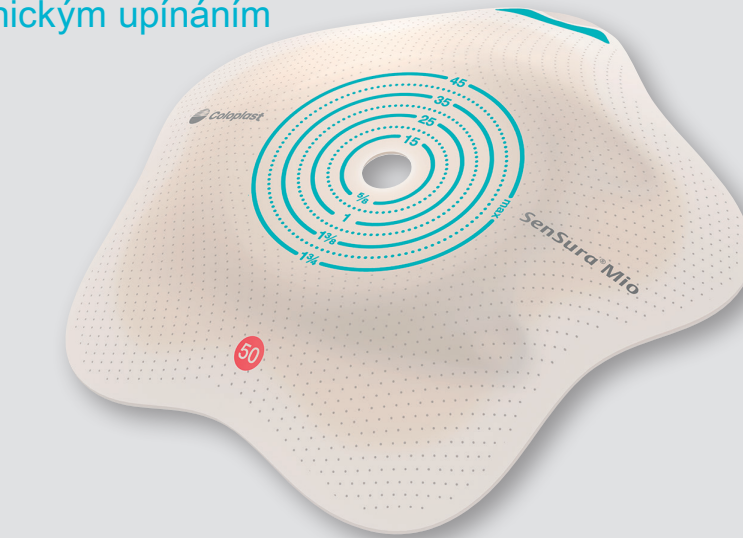

Návod k použití