

# SenSura<sup>®</sup>Mio



## SenSura<sup>®</sup>Mio Convex

Jednodílný výpustný stomický sáček

Péče o stomii



### Návod k použití

23324193 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.

Všechna práva vyhrazena.©

Velcro<sup>®</sup> vlastní společnost Velcro Industries B.V

2020-08-21

### Předpokládaný účel

Ostomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna k ostomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

### Indikace

Prostředek je indikován pro stomiky.

### Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, protože může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, což může mít za následek zvýšené riziko fyzické újmy nebo infekce uživatele.

### Upozornění

Než začnete používat konvexní produkt, poraďte se se svým zdravotnickým pracovníkem o náležitém způsobu používání.

### Informace

Ostomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


### Zvláštní podmínky uchovávání

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávejte mimo sluneční záření.

## Způsob použití


### Příprava

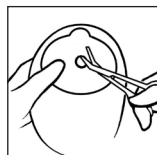


Vystříhnete v lepicím materiálu na podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce.

Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.


Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

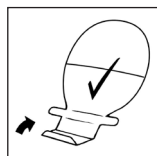


Umístěte sáček na rovný povrch, lepicí stranou směrem dolů. Zavřete výpust trojnásobným složením spodní části výpustě nahoru tak, aby byl viditelný suchý zip Velcro<sup>®</sup>.

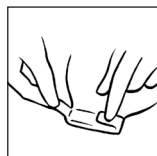


Složte dvě tyrkysové chlopně dovnitř, abyste zajistili suchý zip Velcro<sup>®</sup>.

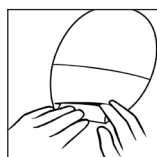

Výpust je možné skrýt pomocí bodu na suchý zip Velcro<sup>®</sup> těsně nad výpustí nebo pomocí Velcro<sup>®</sup> suchého zipu ve střední části sáčku.

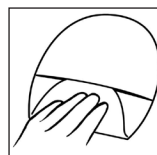

(Toto se netýká průhledných sáčků, kde není žádný suchý zip Velcro<sup>®</sup> ve střední části sáčku.)

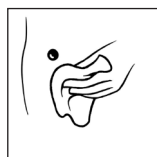


Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací lepicího materiálu na podložce zcela suchá.

### Aplikace



Sejměte ochrannou fólii z lepicího materiálu na podložce.

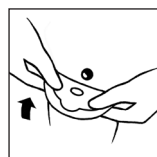


Lepicí materiál nalepte kolem stomie a pevně přitlačte na kůži.

Lepicí materiál musí přesně padnout kolem stomie. Aby nedocházelo k podtékání, je důležité zajistit těsné přilnutí lepicího materiálu kolem stomie. Při nalepování podložky/sáčku přitlačte lepicí materiál na břicho nejprve v oblasti kolem stomie. Přejeďte prsty po lepicím materiálu kolem celé stomie, abyste se ujistili o přilnutí lepicí podložky. Lepicí podložku uhladte počínaje od stomie směrem k vnějším okrajům, abyste se ujistili, že je zcela v kontaktu s pokožkou.



Zatlačte na sáček, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepicího materiálu ke kůži kolem stomie.

## Vyprázdnění sáčku

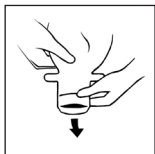

Otevřete výpust a dle potřeby vyprázdněte sáček do toalety.



Očistěte výpust, například toaletním papírem. Složte a znovu zajistěte výpust poté, co jste vyprázdnili sáček.

## Odstraňování



Opatrně odstraňte sáček zatažením za poutko na lepícím materiálu směrem od břicha a srolujte lepící materiál pomalu směrem dolů. Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

## Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.


Výrobek nesplachujte do toalety.

## Štítek filtru



Pokud je třeba zabránit úniku plynu, umístěte jeden z příložených štítků filtru na filtr.

## Přidrzný pásek

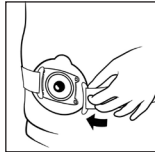

Upravte délku pásku zatažením za řemínky tak, aby dobře obešel tělo. Není nutné odstraňovat látku kryjící přezku. Zahákněte všechny čtyři háčky pásku za odpovídající čtyři ouška na jednotlivých stranách podložky. Začněte zepředu a mírně zatlačte proti břichu. Potom zatáhněte háčky pásku směrem od spoje, až zacvaknou.

(Týká se pouze výrobků s oušky na stomický přídržný pásek.)

## Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobcí a vašemu státnímu orgánu.

## Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečný při vyšetření MR