

Dvoudílný otevřený ostomický sáček s mechanickým upínáním

Stomická podložka

Péče o stomii



Návod k použití

23324285 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.

Všechna práva vyhrazena. © 2020-10-07

Velcro[®] vlastní společnost Velcro Industries B.V

Předpokládaný účel

Ostomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna k ostomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Indikace

Prostředek je indikován pro stomiky.

Varování

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, protože může dojít ke křížové kontaminaci.

Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Upozornění

Než začnete používat konvexní produkt, poraďte se se svým zdravotnickým pracovníkem o náležitém způsobu používání.

Informace

Ostomický sáček na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické rezonanci bezpečná.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.


Zvláštní podmínky uchovávání

Stomickou podložku uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávejte mimo sluneční záření.

Aplikace a odstranění


Příprava

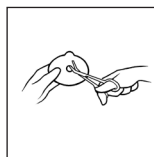

Vystříhnete v podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a stříhací šablony na podložce.


Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

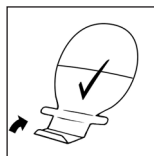


Umístěte sáček na rovný povrch otočený lepícím materiálem směrem dolů.


Zavřete výpusť trojnásobným složením spodní části výpusť nahoru tak, aby byl viditelný suchý zip Velcro[®].

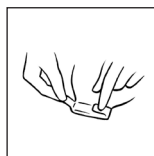

Složte dvě tyrkysové chlopně dovnitř, abyste zajistili suchý zip Velcro[®].

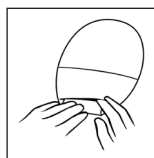

Výpusť je možné skrýt pomocí bodu na suchý zip Velcro[®] těsně nad výpusť nebo pomocí Velcro[®] suchého zipu ve střední části sáčku.

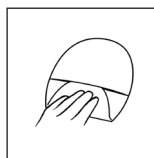

(Toto se netýká průhledných sáčků, kde není žádný suchý zip Velcro[®] ve střední části sáčku).



Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací podložky zcela suchá.


Aplikace



Sejměte ochrannou folii z lepícího materiálu na podložce.




Srovnejte podložku kolem stomie a zatlačte na podložku, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepícího materiálu ke kůži kolem stomie. Lepicí materiál musí přesně padnout kolem stomie. Aby nedocházelo k podtékání, je důležité zajistit těsné přilnutí lepícího materiálu kolem stomie. Při nalepování podložky/sáčku přitlačte lepící materiál na břicho nejprve v oblasti kolem stomie. Přejeďte prsty po lepícím materiálu kolem celé stomie, abyste se ujistili o přilnutí lepící podložky. Lepicí podložku uhladte počínaje od stomie směrem k vnějším okrajům, abyste se ujistili, že je zcela v kontaktu s pokožkou.

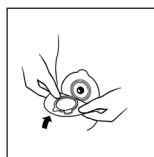


Podložka musí být suchá a čistá (podložku čistěte výhradně vodou).


Ujistěte se, že je upínací kroužek otevřený. Položte spodní hranu upínacího kroužku na sáčku na spodní hranu kroužku na podložce.

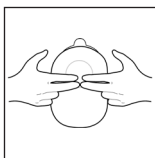

Pomocí prostředníčků přitiskněte dole sáček a stomicou podložku k sobě.

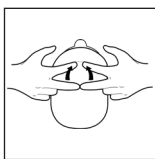


Ukazováčky jemně tlačte na horní stranu upínání, dokud neucítíte, že je sáček ve správné poloze vůči stomické podložce. Pomocí prostředníčků přitiskněte dole sáček a stomicou podložku k sobě.

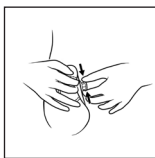

Zavřete upínací kroužek stisknutím pojistky na zámečku. Jakmile uslyšíte cvaknutí, sáček je bezpečně připojen k podložce.

Vyprázdnění sáčku

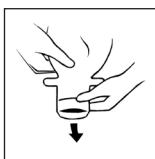

Otevřete výpust a dle potřeby vyprázdňte sáček do toalety.




Očistěte výpust, například toaletním papírem. Složte a znovu zajistěte výpust poté, co jste vyprázdнили sáček.


Odstraňování



Odstraňte sáček tak, že otevřete upínací kroužek. Stiskněte špičkou prstu malou tyrkysovou pojistku na zámečku směřující proti břichu.

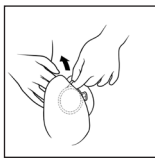

Držte ho za poutko a odstraňte sáček opatrným tažením sáčku směrem od podložky.

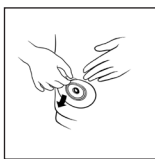

Opatrně odstraňte podložku zatažením za poutko na podložce směrem od břicha a srolujte podložku pomalu směrem dolů. Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.


Produkt nesplachujte do toalety.

Štítek filtru



Pokud je třeba zabránit úniku plynu, umístěte jeden z příložených štítků filtru na filtr.

Přidrzný pásek

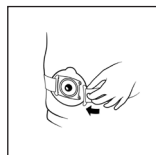

Upravte délku pásku zatažením za řemínky tak, aby dobře obehínil tělo. Není nutné odstraňovat látku kryjící přezku. Zahákněte všechny čtyři háčky pásku za odpovídající čtyři ouška na jednotlivých stranách podložky. Začněte zepředu a mírně zatlačte proti břichu. Potom zatáhněte háčky pásku směrem od spoje, až zacvaknou.

(Týká se pouze výrobků s ouškou na stomický přidrzný pásek).

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek



Označuje, že produkt je v souladu s evropskou legislativou pro zdravotnické prostředky



Katalogové číslo



Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)



Kód šarže



Datum výroby (RRRR-MM-DD)



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Určeno na jedno použití



Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci speciálního zařízení



(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní položky



Uchovávat mimo sluneční záření



Neklopit



Recyklovatelný obal



Bezpečný při vyšetření MR