

1-dílný pooperační sáček

1-dílný výpustný sáček s měkkým ventilem



Nesterilní



Sterilní

23311112 V3 Logo Coloplast je zapsaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © [2011-04.] Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánsko.

Varování

Opakované použití tohoto produktu může představovat potenciální riziko pro uživatele. Nové zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce pacienta.

Upozornění

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je proti platným doporučením společnosti Coloplast.

Toto je sterilní produkt (platné pro 19001, 19010, 19011)
Neprovádějte resterilizaci.
Nepoužívejte, je-li balení poškozené.

Účel použití

Stomický lepicí materiál SenSura/Coloplast a stomický sáček jsou určeny pro sběr výměšků ze stomie. Základní podložka je určena pro přilepení na kůži okolo stomie a používá se pro umístění stomických sáčků.

Informace

1-dílný drenážní sáček SenSura/Coloplast s měkkým ventilem je možné používat jako pooperační sáček a jako standardní sáček.

Způsob použití

1



1. Vystřížení otvoru

Nakreslete si velikost a tvar otvoru na šablonu. Vystříhnete otvor v lepicím materiálu, aby odpovídal velikosti a tvaru vaší stomie. Pro snížení rizika úniku výměšků a kožních problémů je velmi důležité, aby byl otvor v lepicím materiálu přesně stejný jako vaše stomie. Vystřížení je snazší, pokud se použijí zahnuté nůžky. Ujistěte se, že je kůže čistá a suchá předtím, než budete svůj sáček aplikovat. Pokud máte výpustný sáček, nezapomeňte, prosím, zavřít výpust

2



2. Odstranění ochranné vrstvy

Palcem přitlačte štítek lepicího materiálu a zatáhněte za uvolňovací poutko ochranné vrstvy směrem od lepicího materiálu, abyste ochrannou vrstvu odstranili.


3



3. Aplikace

Umístěte lepicí materiál okolo stomie. Zajistěte, že podložka padne perfektně kolem stomie. Poté podložku ohněte, tlačte ji silně proti kůži a prsty uhlazujte ve směru odspodu nahoru.

4

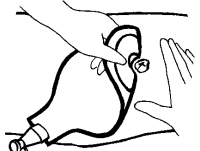

4. Odstraňování

Uchopte poutko na lepicím materiálu a jemně podložku odlepte od kůže. Při odstraňování lepicí vrstvy tlačte volnou rukou lehce na kůži.

5



5. Odstranění výpustě Pouze pro nemocniční použití.

Sáček se dodává s výpustí, kterou je možné používat ve spojení s drenážním sáčkem. Uzávěr výpustě je možné také odstříhnout a výpust zavřít pomocí svorky.

6



6. Zacházení s okénkem – pouze pro sáčky s okénkem.

Zavřete okénko ohnutím víka tak, aby okénko zakrývalo a umístěte svůj palec na víko a ostatní prsty pod ohebnou obrubu/kroužek, kde je okénko přifixováno k sáčku. Posuňte své prsty zespedu nahoru. Okénko se zavře cvaknutím.

Otevřete okénko umístěním svých prstů na poutko okénka a přitom držte flexibilní přírubu/kroužek druhou rukou a jemně odtáhněte okénko od sáčku.

Symbol

WO

Pracovní řád Výrobní číslo označuje obal určitého řádu.
(Číslo šarže – vztahuje se na šarži produktu).