

SpeediCath®

Coloplast

Potažený katétr připravený k použití.
Ženský/ Mužský


Jak se používá katétr SpeediCath

Nová generace potažených hydrofilních katetrů připravených k okamžitému použití balených ve fyziologickém roztoku.

Nový koncept katetru Coloplast, SpeediCath, je tvořen hydrofilní vrstvou na katetru. Katétr s hydrofilní vrstvou je připravený k okamžitému použití, dodávaný ve fyziologickém roztoku. Katétr není vyroben z PVC.

Začněte omytím svých rukou a oblasti kolem ústí močové trubice. Je důležité, abyste se vyhnuli přenosu bakterií ze svých rukou na katétr.

Balení obsahuje potažený hydrofilní katétr ve fyziologickém roztoku. Předtím, než se pokusíte katétr otevřít, se ujistěte, že jste zcela připraveni na katetrizaci.

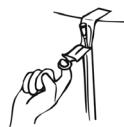

Pokud je katétr uchovávan vertikálně, otočte ho do horizontální polohy, abyste zajistili, že je fyziologický roztok rovnoměrně po celém balení, čímž zajistíte, že je hydrofilní vrstva zcela nasycena. Úplná saturace zajišťuje optimální lubrikaci.

Použijte nálepku na zadní straně k připevnění obalu na hladký suchý horizontální povrch. Otevřete obal zatažením za kroužek směrem k sobě a pak dolů. Vytáhněte katétr SpeediCath, který je nyní připraven k použití.

Muži



Zvedněte penis jednou rukou, abyste narovnali močovou trubici. Použijte druhou ruku pro zavedení katetru do močové trubice po krocích - posouvejte postupně asi po dvou centimetrech. Předtím, než katétr dosáhne do močového měchýře, můžete pociťovat lehký odpor působením svěrače. Penis nemačkejte, můžete tím ztížit zavedení katetru.

Pouze pro katétr Tiemann/Coude (zahnutá špička):
Předtím, než zahájíte zavádění, se ujistěte, že zahnutý hrot katetru směřuje nahoru. Indikátor Tiemann (ryška) na konektoru je navržen tak, aby pomohl ke správné orientaci katetru. Když držíte katétr horizontálně s indikátorem směřujícím nahoru, hrot katetru bude také směřovat nahoru.

Ženy



Roztáhněte stydké pysky jednou rukou, abyste odkryla ústí močové trubice. Použijte druhou ruku pro zasunutí katetru jemně do močové trubice, postupně asi po dvou centimetrech. Předtím, než katétr dosáhne do močového měchýře, můžete pociťovat lehký odpor působením svěrače.

Pokračujte v zavádění katetru do močové trubice, dokud nezačne moč vytékat. Pokud není v blízkosti toaleta, můžete katétr připojit k urinálnímu sáčku nebo jiné sběrné pomůcce.

Jakmile přestane moč vytékat, uvolněte katétr asi 2 až 3 cm. Pokud se proudění moči obnoví, počkejte několik sekund před uvolněním katetru o další 1 až 2 cm.

Jakmile je močový měchýř zcela prázdný, pomalu katétr vytáhněte a hygienickým způsobem zlikvidujte.



Návod k použití

23313917 Version 2

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena. [2013-01]

Indikace

Močový katétr pro intermitentní použití.

Informace

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Katétr může být vystaven extrémním teplotám (pod 0°C a nad 60°C) až na 24 hodin, aniž by došlo k jeho poškození.

Katétr je možné uchovávat stočený po dobu až 3 hodiny, aniž by se poškodil.

Roztok, v němž je katétr uložen, je neškodný. Roztok však může způsobit vznik skvrn.

Katetrizace by měla proběhnout co nejdříve po otevření obalu. Katétr je třeba vždy po vyprázdnění měchýře vyjmout.

Upozornění

Nepoužívejte, je-li balení poškozené.

Obratťe se na svého zdravotníka před provedením první samokatetrizace.

Obratťe se na svého zdravotníka, pokud:

- pokud se u vás vyskytnou příznaky jako je teplota, potíže s vyprazdňováním měchýře, častá potřeba močit nebo krev v moči.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele. Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.