

Potažený katétr připravený k použití.
Mužský
Dospělý



Návod k použití
23321366 Version 1
Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.
Všechna práva vyhrazena. ©
2019-03-25

Indikace

Sterilní močový katétr pro intermitentní použití.

Informace

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Samokatetrizace může být prováděna po proškolení lékařem.

Pokud osoba při provedení katetrizace potřebuje pomoc, může katetrizaci provést pečující osoba, která byla proškolená o správné technice provedení zdravotnickým odborníkem.

Katétr může být bez poškození vystaven extrémním teplotám (od -18 °C až do 50 °C) až po dobu 24 hodin.

Katétr může zůstat přehnutý až 3 hodiny bez poškození.

Katetrizace by měla proběhnout co nejdříve po otevření obalu. Katétr je třeba vždy po vyprázdnění měchýře vyjmout.

Sterilizováno zářením (R).

Upozornění

Nepoužívejte, je-li balení poškozené

Uchovávejte mimo sluneční záření.

Obratě se na svého zdravotníka před provedením první samokatetrizace.


Jestliže na sobě pozorujete příznaky horečky, nepohodlí při vyprázdňování močového měchýře, časté nucení k močení nebo krev v moči, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele. Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Způsob použití

Příprava

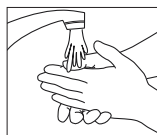


Umyjte si ruce a oblast kolem otvoru do močové trubice mýdlem a vodou. Je důležité, abyste nepřenесли bakterie z rukou na katétr.

Jestliže vám pomáhá ošetřující osoba, musí si umýt a osušit ruce a poté nasadit čisté rukavice.


Balení obsahuje potažený hydrofilní katétr uchovávaný ve fyziologickém roztoku. Otočte katétr o 180° a zkontrolujte, že je fyziologický roztok rovnoměrně rozložen v celém balení, hydrofilní vrstva je plně nasycena a tím je dosaženo optimální lubrikace.

Než balení otevřete, ujistěte se, že jste zcela připraveni zahájit katetrizaci.

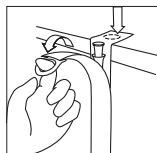

Způsob otevření 1:


Použijte nálepku na zadní straně a připevněte obal na hladký a suchý vodorovný povrch. Obal otevřete tak, že kroužek vytáhnete směrem k sobě a potom dolů.

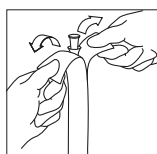


Způsob otevření 2:

Rozloupnutím otevřete horní část obalu.

Pokud není v dosahu toaleta, můžete katétr připojit ke sběrnému močovému sáčku nebo jinému sběrnému zařízení.

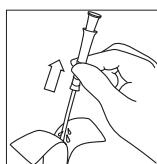

Uchopte tyrkysový úchyt a vyjměte katétr, který je připraven k použití.

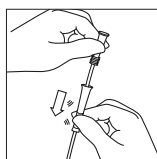


Potáhnutím dolů uvolněte úchyt z konektoru. Uchopte za zvlněnou část úchytu.


Aplikace

Muži/chlapci

Samokatetrizace

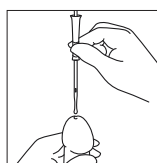


Jednou rukou zvedněte penis, aby se napřímila močová trubice. Pomocí úchytu vložte špičku katétru do otevřené močové trubice, přitom stále držte penis. Katétr budete nejlépe ovládat, když ho uchopíte na zvlněné části úchytu.

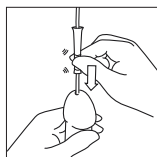

Jakmile je špička zasunuta v močové trubici, uvolněte tlak na úchyt a posuňte ho na katétru směrem nahoru. Pokračujte v opakovaném uvolňování tlaku na úchyt a zavádějte katétr směrem k močovému měchýři, dokud nezačne proudit moč, a pak ještě o kousek dál.

Těsně předtím, než katétr dosáhne močového měchýře, můžete pocítovat slabý odpor svěrače. Nemačkejte penis, zavádění katétru tím může být obtížnější.

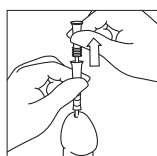

Zatlačte úchyt zpět na konektor.

Katetrizace poskytnutá ošetřující osobou nebo lékařem


Držte penis vzhůru směrem k žaludku. Tato poloha umožní snazší nasměrování katétru do močového měchýře.

Jemně stiskněte žalud penisu po stranách tak, aby se otevřela močová trubice a nechte do ní katétr zlehka vklouznout.

Jakmile je špička zasunuta v močové trubici, uvolněte tlak na úchyt a posuňte ho na katétru směrem nahoru. Pokračujte v opakovaném uvolňování tlaku na úchyt a zavádějte katétr směrem k močovému měchýři, dokud nezačne proudit moč, a pak ještě o kousek dál.


Zatlačte úchyt zpět na konektor.

Odstraňování

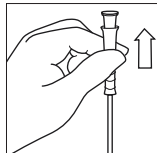

Když moč přestane vytékat, povytáhněte katétr o 3–2 cm. Pokud moč začne vytékat znovu, počkejte několik sekund a poté znovu povytáhněte katétr o 2–1 cm. Po úplném vyprázdnění močového měchýře pomalu vyjměte katétr.

Likvidace

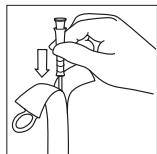

Po použití katétr vraťte do balení a zlikvidujte.

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Pokud máte připojený močový sběrný sáček, zlikvidujte ho společně s katétre, nebo ho odpojte a vyprázdněte podle návodu k použití.

Symbody



Nepoužívejte, je-li balení poškozené



Neobsahuje latex