

SenSura[®] Mio

Coloplast

SenSura[®] Mio Convex

Jednodílný uzavřený stomický sáček
Péče o stomii



Návod k použití

23319519 Version 1

Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna

práva vyhrazena. ©

Velcro[®] vlastní společnost Velcro Industries B.V

2017-03-20

Indikace

Stomický sáček je určen pro sběr výměšků ze stomie. Lepicí materiál na stomickém sáčku je určen k zajištění sáčku a přilepení na intaktní kůži kolem stomie.

Informace

Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze

Uchovávat mimo sluneční záření.

Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Upozornění


Než začnete používat konvexní výrobek, poradte se se svým zdravotnickým pracovníkem.

Varování

Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko pro uživatele. Opětovné zpracování, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekce uživatele.

Způsob použití


Příprava

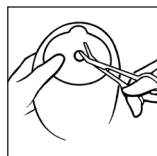

Vystřihněte v lepicím materiálu na podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie pomocí malých zahnutých nůžek a šablony na podložce.

Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření velikosti a tvaru stomie.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.

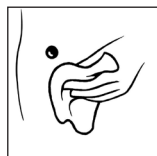


Důkladně stomii a okolní kůži očistěte. Kůže musí být před aplikací lepicího materiálu na podložce zcela suchá.

Aplikace



Sejměte ochrannou folii z lepicího materiálu na podložce.

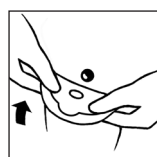


Lepicí materiál nalepte kolem stomie a pevně přitlačte na kůži.

Lepicí materiál musí přesně padnout kolem stomie. Aby nedocházelo k podtékání, je důležité zajistit těsné přilnutí lepicího materiálu kolem stomie. Při nalepování podložky/sáčku přitlačte lepicí materiál na břicho nejprve v oblasti kolem stomie. Přejeďte prsty po lepicím materiálu kolem celé stomie, abyste se ujistili o přilnutí lepicí podložky. Lepicí podložku uhlad'te počínaje od stomie směrem k vnějším okrajům, abyste se ujistili, že je zcela v kontaktu s pokožkou.



Zatlačte na sáček, abyste zajistili rychlé přilepení a perfektní přilnutí lepicího materiálu ke kůži kolem stomie.

Odstraňování

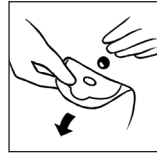

Opatrně odstraňte sáček zatažením za poutko na lepicím materiálu směrem od břicha a srolujte lepicí materiál pomalu směrem dolů.


Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž usnadníte odstraňování.

Likvidace

Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.


Výrobek nesplachujte do toalety.

Štítek filtru

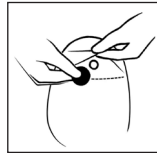

Pokud je třeba zabránit úniku plynu, umístěte jeden z přiložených štítků filtru na filtr.

Přidržený pásek

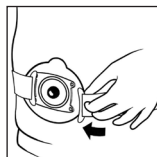

Upravte délku pásku zatažením za řemínky tak, aby dobře obešel tělo. Není nutné odstraňovat látku kryjící přezku. Zahákněte všechny čtyři háčky pásku za odpovídající čtyři ouška na jednotlivých stranách podložky. Začněte zepředu a mírně zatlačte proti břichu. Potom zatáhněte háčky pásku směrem od spoje, až zacvaknou.

(Týká se pouze výrobků s ouškou na stomický přidržený pásek.)