



# Urinální sběrný systém Conveen®

Řešení mužské inkontinence,  
na které se můžete spolehnout

**Conveen®**

## Být kontinentní

znamená vůlí plně kontrolovat proces močení - tj. být schopen zadržet moč po nezbytně nutnou dobu k nalezení toalety a poté se z vlastní vůle přirozeně vymočit.

Pokud vylučovací systém nefunguje správně a dochází k samovolnému úniku moči,

hovoříme o **inkontinenci**.

Inkontinence představuje intimní, hygienický a zároveň společenský problém, proto o něm pacienti nechtějí příliš mluvit a často ho tají. Zejména muži v mladším věku. Potíže s inkontinencí je potřeba vždy řešit především s lékařem.

Trpíte inkontinencí?  
Máme pro vás  
diskrétní řešení!




## Urinální sběrný systém Conveen®

- jednoduché, pohodlné a diskrétní řešení inkontinence
- systém, na který se můžete spolehnout
- zachování kvality společenského života (eliminace zápachu)
- ideální alternativa, pokud nechcete nosit inkontinenční pleny
- lze nosit pod běžným oblečením
- neomezená svoboda pohybu




Sběrný systém představuje spojení:


Urinální kondom

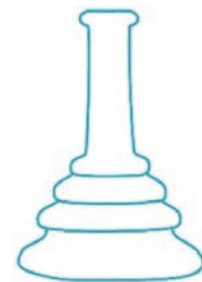

Sběrný sáček

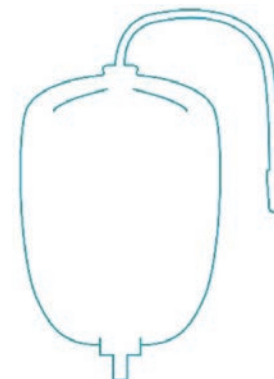

Sběrný systém

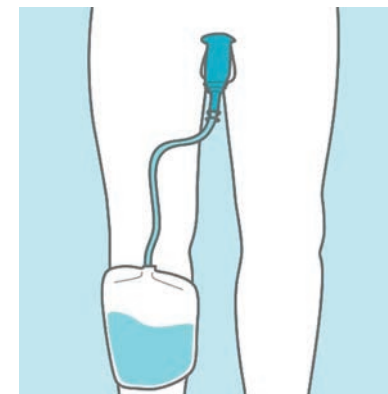


# Jak používat urinální sběrný systém

## První krok Výběr vhodné velikosti urinálního kondomu

Použijte speciální měрку. Pomocí měrky zjistíte, jaký průměr urinálních kondomů potřebujete. Jednotlivé velikosti (průměry) jsou barevně odlišeny. Průměr penisu změřte v nejširším místě. Penis měřte v normálním stavu, ne při erekci!

Měrku si můžete objednat na [bezplatné lince péče o klienty Coloplast](tel:800100416) 800 100 416.

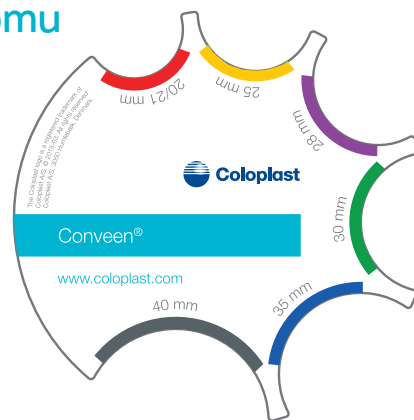

Urinální kondom samolepicí



Urinální kondom s lepicím proužkem

## Druhý krok

## Výběr vhodného typu urinálního kondomu

Urinální kondomy jsou dostupné v široké škále velikostí. Jsou vyrobeny z jemného a pružného materiálu.

### Kondom s lepicím proužkem

Skládá se ze dvou částí. Lepicí materiál je umístěn na odděleném proužku, který přilne ke genitálu v dostatečné vzdálenosti od žaludu.



Po nalepení proužku se kondom navlékne a naroluje na penis. Jeho koncová část se pevně přilepí k lepicímu proužku.




Samolepicí kondom

Lepicí materiál je rozprostřen po celé vnitřní straně.



Pomocí plastového aplikátoru se kondom nasadí na penis a tažením za pásek se rozvine směrem ke kořeni. Aplikátor i pásek se následně vyhodí do běžného odpadu.

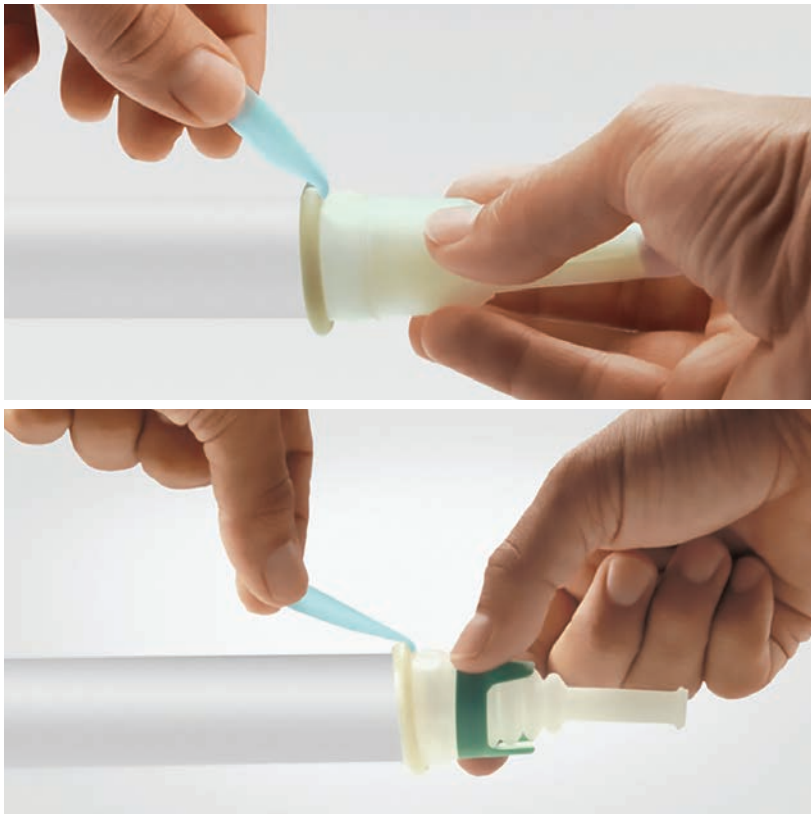

Urinální kondomy – přehled

Conveen® urinální kondom samolepicí

| SÚKL kód | Urinální kondomy Conveen | Typ        | Průměr (mm) | Ks/bal. |
|----------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| 5009017  | Kondom urinální          | samolepicí | 25          | 30      |
| 5009018  | Kondom urinální          | samolepicí | 30          | 30      |
| 5009023  | Kondom urinální          | samolepicí | 35          | 30      |



Conveen® urinální kondom s lepicím proužkem

| SÚKL kód | Urinální kondomy Conveen | Typ        | Průměr (mm) | Ks/bal. |
|----------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| 5008962  | Kondom urinální          | s proužkem | 25          | 30      |
| 5008999  | Kondom urinální          | s proužkem | 30          | 30      |
| 5009012  | Kondom urinální          | s proužkem | 35          | 30      |
| 5009014  | Kondom urinální          | s proužkem | 40          | 30      |





### Třetí krok

## Výběr vhodného sběrného sáčku

Druhou nedílnou součástí sběrného systému je sběrný sáček. Při jeho výběru si položte následující otázky:

Budu sběrný sáček používat ve dne nebo v noci?

Denní sáčky mají menší kapacitu – jejich objem je 500 až 800 ml. Noční sáček, který se používá během spánku, má kapacitu až 2 000 ml.

Jaký objem sáčku je pro mě nejvhodnější?


Objem sáčku závisí na vašem životním stylu, aktivitě a míře inkontinence. Sběrné sáčky Conveen se dodávají v objemech: 500 ml, 600 ml, 800 ml, 1 500 ml a 2 000 ml.



Denní sáček  
Conveen



Noční sáček  
Conveen  
Standard

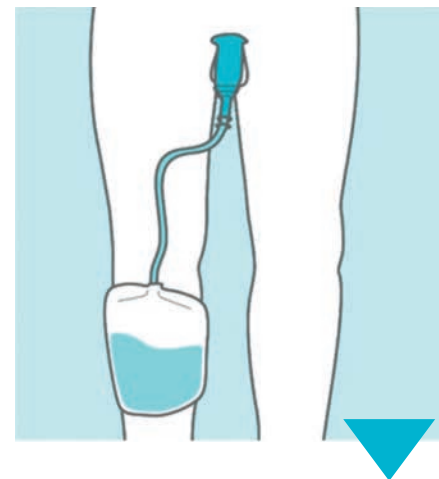

Navlékněte si urinální kondom na penis. Sběrný močový sáček připevněte pomocí suchého zipu na lýtko nebo stehno.



Zasuňte hadici sběrného sáčku do odtokového konce urinálního kondomu. Ujistěte se, že spojení těsní a dobře přiléhá.



Zkontrolujte, jestli je vypouštěcí ventil sběrného sáčku před použitím uzavřený. Plný sběrný sáček opatrně vypusťte pomocí ventilu. Sáček lze použít opakovaně.

Vypouštěcí ventil



Pro vypouštění moči ze sběrného sáčku slouží výpustný ventil opatřený klipem. Před použitím výpust' pomocí klipu uzavřete. **POZOR:** Sáčky se standardně dodávají s otevřeným výpustným ventilem.

Flexibilní hadice



Flexibilní hadice pro připojení sběrného sáčku k urinálnímu kondomu. Její délka je 25 až 50 cm u denních sáčků a 90 až 100 cm u nočních sáčků. Hadici lze podle potřeby zkrátit nůžkami. **POZOR:** Na konci hadičky musí zůstat rovná část, ne vřapovaná.

Konektor



Každé balení obsahuje sadu konektorů, které slouží k propojení s urinálním kondomem.


## Umístění a upevnění sběrného sáčku

U chodících mužů je ideální umístění sběrného sáčku na holeni pod kalhotami.

Pro muže na invalidním vozíku je vhodným řešením umístění sběrného sáčku na vnitřní straně lýtka.

Denní sběrné sáčky se připevňují pomocí upínacích přídržných pásků.


Noční sběrný sáček se zavěsí na postel pomocí speciálního plastového držáku.

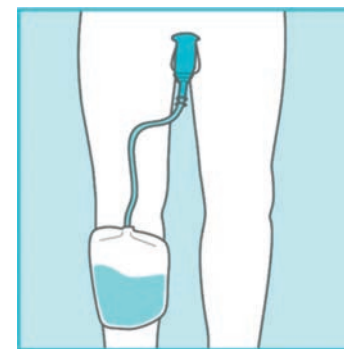

Pro zabezpečení efektivního odtékání moči zajistěte, aby sběrný sáček byl vždy níže než váš močový měchýř.



*Conveen přídržný pásek se suchým zipem k připevnění sběrných sáčků k noze.*

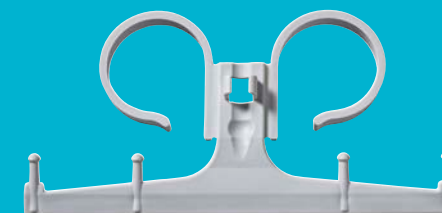

*Conveen držák sáčku k lůžku*

# Urinální sběrné sáčky a příslušenství

## Conveen® urinální sběrné sáčky denní (stehenní a lýtkové)

| SÚKL kód | Conveen® urinální sběrné sáčky | Typ      | Hadice | Objem (ml) | Ks/bal. |
|----------|--------------------------------|----------|--------|------------|---------|
| 5009025  | Sáček (s vrapovanou hadicí)    | stehenní | 25 cm  | 500        | 10      |
| 5009026  | Sáček (s vrapovanou hadicí)    | lýtkový  | 50 cm  | 500        | 10      |
| 5009028  | Sáček diskrétní                | lýtkový  | 45 cm  | 600        | 10      |
| 5009032  | Sáček diskrétní                | lýtkový  | 45 cm  | 800        | 10      |



## Conveen® urinální sběrné sáčky noční

| SÚKL kód | Conveen® urinální sběrné sáčky | Typ           | Hadice | Objem (ml) | Ks/bal. | Doplatek bal. / 10 ks |
|----------|--------------------------------|---------------|--------|------------|---------|-----------------------|
| 5015450  | Conveen Standard               | Sáček k lůžku | 90 cm  | 1500       | 10      | 163,- Kč              |
| 5012584  | Conveen Basic                  | Sáček k lůžku | 100 cm | 2000       | 10      | Plně hrazeno          |



## Conveen® přídržný pásek se suchým zipem k upevnění sběrných sáčků k noze

| SÚKL kód | Přídržné pásky                  | Ks/bal.       |
|----------|---------------------------------|---------------|
| 5009040  | Přídržné pásky k noze (Conveen) | 1 sada = 2 ks |



## Conveen® držák sáčku k lůžku

| SÚKL kód | Držák               | Ks/bal. |
|----------|---------------------|---------|
| 5012583  | Držák sáčku k lůžku | 1       |



# Urinální sběrný systém Často kladené otázky

## Kdo může předepsat urinální kondomy a urinální sběrné sáčky?

Urinální kondomy vám může předepsat praktický nebo dětský lékař; dále také specialista v oboru urologie, geriatric, neurologie, nefrologie, chirurgie a interní medicíny. Urinální sběrné sáčky vám může předepsat také gynekolog a onkolog.

## Jsou tyto pomůcky hrazeny ze zdravotního pojištění?

Urinální kondomy i sběrné sáčky jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění s výjimkou nočního sáčku Conveen Standard (SÚKL kód: 5015450), kde je vyžadována spoluúčast pacienta 163,- Kč na 1 balení o 10 kusech.

## Kolik urinálních kondomů a sběrných sáčků může lékař předepsat na měsíc?

Pro urinální kondomy je stanoven měsíční limit 30 kusů, pro sběrné sáčky 15 kusů (nefrosticki 20 kusů, děti do 6 let bez limitu) a také 8 kusů přídržných pásků ročně a 2 kusy držáků na sběrné sáčky k lůžku. V případě, že uvedené množství zásob nestačí na celý měsíc, kontaktujte [bezplatnou linku péče o klienty Coloplast 800 100 416](#).

## Je použití sběrných sáčků a celého sběrného systému diskretní?

Ano, při správném používání kondomů a sáčků je celý systém velice nenápadný. Vždy se ujistěte, že je systém správně zapojen a těsní, aby nedocházelo k úniku moči na oblečení. Mějte sběrný sáček pevně připevněn k noze. Materiál, z něhož je sběrný sáček vyroben, tlumí zvuky a nezachytává se při pohybu nohy o oděv. Noste dlouhé kalhoty.

## Jak zajistit diskretní doručení pomůcek?

Předepsané pomůcky si můžete vyzvednout v kterémkoliv výdejně zdravotnických potřeb nebo v lékárně, která má v sortimentu i zdravotnické pomůcky. Pokud nechcete, aby vaše okolí vědělo, jaké zdravotnické prostředky používáte, můžete si je nechat zaslat domů. Kurýr vám pomůcky doručí diskretně zabalené, nemusíte si pro ně chodit do lékárny nebo výdejny.

### Jak dlouho mohu nosit urinální kondom?

Urinální kondom je z hygienických důvodů nutné měnit každých 24 hodin. Nikdy nepoužívejte kondom opakovaně! Při výměně dbejte na osobní hygienu a věnujte také dostatečnou pozornost péči o pokožku penisu. Během sprchování nebo umývání může být odstranění kondomu snadnější. Pokud je pokožka poškozená, kontaktujte svého lékaře nebo ošetřující sestru.

### Co může ovlivnit přilnutí kondomu k penisu?

Nejčastější důvody, proč kondom dobře nesedí, nepřilne nebo dokonce sklouzne z penisu, jsou nedostatečná hygiena při aplikaci, ošetřování pokožky mastným krémem nebo zásypem, případně aplikace kondomu na vlhkou neosušenou pokožku. Někdy se může stát, že na penisu zůstane trochu lepidla. Pro optimální přilnavost je důležité, aby byl penis před aplikací nového urinálního kondomu čistý. Někdy může lepivost kondomu nepříznivě ovlivnit i nesprávné skladování pomůcek - v přetopené místnosti, na přímém slunečním světle nebo naopak v chladu či mrazu.

### Co ještě může negativně ovlivnit těsnění kondomu?

Někdy může být problémem také to, že se pod kondom dostane ochlupení. V tomto místě pak může docházet k netěsnostem a úniku moči ze systému. Proto se doporučuje při používání urinálních kondomů ochlupení v oblasti penisu oholit. Další tip jak zabránit přilepení. Použijte papírový ubrousek s vystřiženým otvorem uprostřed na penis, který zabrání, aby se při aplikování kondomu ochlupení přilepilo.

### Nezpůsobuje dlouhodobé nošení urinálního kondomu problémy s nedokrvěním penisu?

Pokud je průměr penisu změřen správně - měřeno v klidu a v nejširším místě, nedochází při nošení k utlačování cév. Pokud byl zvolen menší průměr, můžete pociťovat nepříjemné pocity. Abyste se takovým situacím vyhnuli, doporučujeme vyzkoušet vzorky kondomů podobných velikostí - například 30 mm a 35 mm, a ověřit, která velikost vám vyhovuje. Používat správnou velikost kondomu je velmi důležité, neboť se tím vyhnete možnému problému s únikem moči, bude-li kondom velký nebo naopak se stahováním penisu, bude-li kondom příliš malý. Nezapomeňte, že velikost vašeho penisu se může s věkem a změnami zdravotního stavu měnit.

### Můžou se používat urinální sběrné sáčky opakovaně?

S množstvím limitem 15 kusů sběrných sáčků za měsíc se jejich opakovanému použití nevyhnete. Sběrný sáček stačí po denním nebo nočním použití důkladně vypláchnout vlažnou vodou a můžete ho znovu použít. Můžete to provést tak, že připojíte náhradní urinální kondom na hadičku a použijete jej jako trychtýř k vodovodní baterii. Pak na sběrném sáčku otevřte výpusť a sáček propláchněte. Sběrné sáčky nikdy nevyvařujte ve vroucí vodě, protože by mohlo dojít k jejich poškození a ztrátě funkčnosti. K dezinfekci a čištění sběrných sáčků také nepoužívejte žádné chemické prostředky - mohli byste si při kontaktu s močovými cestami poškodit zdraví!

### Pokud mám přinést lékaři ke kontrole vzorek moči, můžu použít moč ze sběrného sáčku?

Tento postup se nedoporučuje. Sáček není sterilní a při opakovaném použití a případném nedokonalém vypláchnutí se v některých částech sáčku mohou vyskytovat bakterie, jejichž přítomnost by mohla zkreslit výsledky vyšetření.

# Kde můžu požádat o zaslání vzorků a získat další informace?



Zavolejte na **bezplatnou linku péče o klienty Coloplast 800 100 416**. Naše vyškolené zdravotní sestry vám pomůžou s výběrem vhodné pomůcky a poskytnou veškeré informace (např. o úhradách a limitech). Následně vám ZDARMA zašleme vzorky na vyzkoušení.

Veškeré informace a možnost objednání vzorků ZDARMA najdete také na: <https://visit.coloplast.cz/conveen>.

### Kde si můžu vyzvednout předepsané inkontinenční pomůcky?

Předepsané pomůcky si také můžete vyzvednout v kterékoliv výdejně zdravotnických potřeb nebo v lékárně, která má v sortimentu i zdravotnické pomůcky.

Papírový řádně vyplněný poukaz (nezapomeňte na podpis na zadní straně) zašlete na adresu distributora:

**Malkol CZO, Bušovice 4, 338 24 Břasy.**

Pomůcky vám budou diskrétně doručeny na adresu uvedenou na poukazu. Více informací najdete na [www.malkol.cz](http://www.malkol.cz).

V případě, že vám lékař předepsal elektronický poukaz (ePoukaz), zašlete ho distributorovi e-mailem nebo na mobilní telefon.

- Pro klienty z Čech na telefonní číslo 736 352 529 nebo na e-mail [epoukaz@malkol.cz](mailto:epoukaz@malkol.cz).
- Pro klienty z Moravy na telefonní číslo 774 000 240 nebo na e-mail [eolomouc@malkol.cz](mailto:eolomouc@malkol.cz).

### Jak nás můžete kontaktovat?

- Zavolejte na **bezplatnou linku péče o klienty Coloplast 800 100 416** (každý všední den 8-16 hodin).



Příběh společnosti Coloplast se začal psát v Dánsku v roce 1954. Zdravotní sestře Elise Sørensenové dělala starosti výrazná změna kvality života její sestry Thory po operaci, při které jí byl vytvořen umělý vývod ze střeva. Thora si netroufala chodit ven, protože se obávala, že by mohlo dojít k nepříjemné nehodě na veřejnosti.

Elise naslouchala problémům, které její sestra měla a vytvořila první samolepicí stomický sáček na světě. Sáček, který nepodtékal, dal Thoře a tisícovkám lidí se stomií šanci vrátit se k normálnímu životu. Bylo to jednoduché řešení obrovského významu.

Dnes je Coloplast světovým výrobcem a distributorem nejen stomických pomůcek, ale také pomůcek pro urologické a inkontinentní pacienty a výrobků pro péči o kůži a hojení ran vlhkou cestou.

V Coloplastu pracujeme pořád stejně, jako to dělala Elise: nasloucháme, učíme se a na základě toho vytváříme produkty a služby, které usnadňují život lidem s intimními zdravotními potřebami.

<https://visit.coloplast.cz/urinalni-kondomy>



Kam se obrátit v případě dotazů?



**Péče o klienty**  
**800 100 416**  
bezplatná informační linka

v pracovní dny 8.00–16.00 h

Pomůcky řady Conveen jsou zdravotnické prostředky určené pro pacienty trpící močovou inkontinencí. Urinální kondomy jsou určeny k odvodu moči. Sběrné sáčky jsou určeny k pasivnímu shromažďování moči. Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

#### **Ostomy care** **Urology & Continence care** **Wound & Skin care**

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám. Toto my nazýváme intimní zdravotní péči.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © 2024-04  
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko

PM-27108



Coloplast Czech s.r.o.  
Radlická 740/113 c  
158 00 Praha 5  
[info@coloplast.cz](mailto:info@coloplast.cz)  
[www.coloplast.cz](http://www.coloplast.cz)

Informace pro klienty:  
bezplatná telefonní linka **800 100 416**