

SenSura® Mio



„Když najdete
pomůcku pro váš
tělesný profil,
umožní vám to žít
aktivněji.“

Stomik na obrázku používá
sáček SenSura Mio na kolostomii
a SenSura Mio Convex
na urostomii.



**SenSura® Mio - pro každý
tělesný profil a životní styl**



„Od začátku mě mile překvapilo, jak nová pomůcka perfektně padne na moji kýlu.“

Jaroslavovi Velechovskému je 75 let a je velmi aktivní stomik. Hledal bezpečné řešení pro stomii s kýlou a našel konkávní pomůcku SenSura Mio Concave.



Více než 60 let vyvíjí společnost Coloplast pomůcky a služby, které ulehčují život lidem s velmi osobními zdravotními problémy.

Stomické pomůcky Sensura Mio s elastickým lepicím materiálem jsou přelomem ve vývoji stomických pomůcek, protože pomáhají stomikům žít aktivně jako před operací.

Šířka sortimentu pomůcek SenSura Mio umožňuje výběr vhodné pomůcky pro každý tělesný profil.

SenSura Mio pro rovné okolí stomie

SenSura Mio Convex pro vpadlé okolí

SenSura Mio Concave pro vypouklé okolí

Stomiky nejvíce trápí podtékání

91% 
stomiků se obává, že jim pomůcka podteče¹


80% 
stomiků uvádí, že má s podtékáním problémy¹

Nedokonalé přilnutí stomické pomůcky k tělu je hlavní příčinou podtékání pomůcek a poškození kůže. Pevné a těsné přilnutí pomůcky je proto klíčové pro prevenci rizika podtečení a poškození kůže.

Dokonalé přilnutí pomůcky – to je ten rozdíl

Zajištění dobrého přilnutí stomické pomůcky je základním předpokladem pro aktivní život, na jaký jste byli zvyklí. Stomici však mají velmi různé tělesné profily v okolí stomie a vyústění stomie na břišní stěnu se také liší.

Stomiky lze podle tělesných profilů v okolí stomie rozdělit do tří skupin.

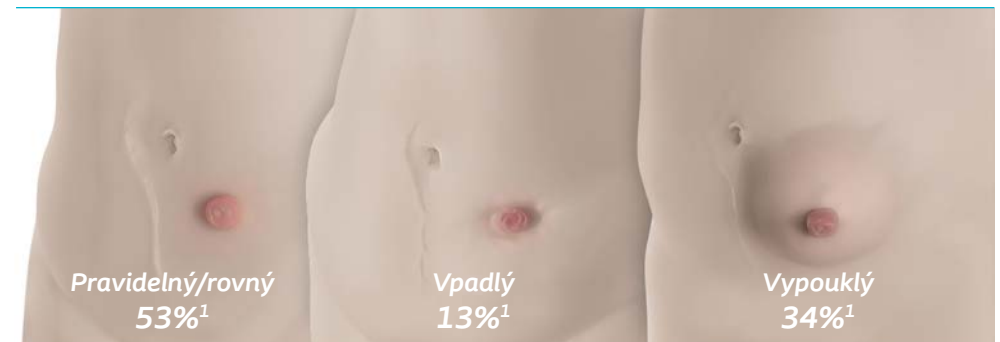

Reference: 1. Claessens et al., The Ostomy Life Study: the everyday challenges faced by people living with a stoma in a snapshot; Gastrointestinal Nursing, 2015; 13: 18-25.

SenSura Mio pro stomiky s rovným okolím stomie



Častým problémem stomiků je zajistit dobré přilnutí pomůcek při aktivitách, práci a pohybu všeobecně, kdy se břišní stěna pohybuje.²

Unikátní elastický lepicí materiál na pomůckách SenSura Mio se přizpůsobí pohybům těla, když se skláníte, ohýbáte anebo zakláníte. Pomůcka bude stále držet na místě.

Při vývoji lepicího materiálu byla použita technologie BodyFit, která zajišťuje dobré přilnutí pomůcky k tělu, bez ohledu na tvar těla a změny tvaru těla při pohybu.

Přizpůsobí se tvaru těla a jeho pohybům



86%
stomiků má zkušenost s dobrým nebo velmi dobrým přilnutím³

Reference: 2. Coloplast průzkum trhu, Ostomy Life Study 2016, data on file PM-05235 • 3. Coloplast produktové hodnocení, SenSura Mio 2014 (VV-0197319)

Elastický lepicí materiál sleduje pohyby vašeho těla

Díky technologii BodyFit se bude lepicí materiál pohybovat spolu s vámi, bude se natahovat, ohýbat a smršťovat s každým pohybem těla.



Natahuje se a ohýbá spolu s pohyby těla

SenSura Mio Convex

pro stomiky s vpadlým okolím stomie



Častou příčinou špatného přilnutí pomůcky je problematické okolí stomie:

- vpadlé okolí stomie
- stomie v úrovni kůže
- nerovnosti v okolí stomie

Lepicí materiál SenSura Mio Convex je založen na technologii BodyFit. Tato technologie zajišťuje dobré přilnutí pomůcky právě v těchto situacích. Konvexní tvar pomůcky lépe utěsní okolí

Konvexní pomůcka SenSura Mio Convex je k dispozici ve 3 variantách pro různé situace:

Soft – měkký konvex, pro nerovné okolí a zvýšení pocitu bezpečí

Light – mírný konvex, pro vpadlé stomie a stomie v úrovni kůže

Deep – hluboký konvex, pro vpadlé stomie a stomie v hlubokých záhybech



86%

stomiků hodnotí pohodlí a komfort při nošení pomůcky dobře nebo velmi dobře⁵

Reference: 5. Coloplast, produktové hodnocení SenSura Mio [Convex 2015, (VV-0197318)]

Pro váš větší pocit jistoty a bezpečí

Pomůcka SenSura Mio Convex vám díky technologii BodyFit zajistí těsné a bezpečné přilnutí ke vpadlému okolí stomie, ke stomii v úrovni kůže anebo ke stomii, v blízkosti níž jsou nerovnosti na kůži.



Umožňuje pohodlné ohýbání lepicího materiálu při zachování jeho stability

SenSura Mio Concave pro vypouklé okolí stomie



Častou komplikací je pro stomiky vypouklé okolí stomie (např. kýla). Pomůcka SenSura Mio Concave je první konkávní pomůcka určená přímo pro stomie ve vypouklém okolí nebo pro stomiky s větším břichem.

Při vývoji lepicího materiálu SenSura Mio Concave byla použita technologie BodyFit. Ta zajišťuje dobré přilnutí pomůcky k vypouklé ploše (např. ke kýle nebo většímu břichu). Lepicí materiál ve tvaru 5cípe hvězdy je zaoblený, takže na vypouklé okolí stomie perfektně padne a těsně jej obejmě.

Dle velikosti vypouklé plochy máte na výběr ze 4 velikostí lepicích materiálů.



První pomůcka speciálně vyvinutá pro stomie **v kýle** nebo pro stomiky **s větším břichem**



Další tři důvody, proč je SenSura Mio tou **správnou pomůckou pro vás**

Diskrétní barva sáčku

Péčlivě vybraná neutrální šedá barva, která není vidět ani pod bílým oblečením.

Tkaná textilie

Materiál sáčku je speciálně vybrán tak, aby nepoutal pozornost okolí a vypadal jako součást oblečení nebo jeho doplněk.

Filtr, kterému můžete věřit

Unikátní kruhový předfiltr vám poskytne ochranu před nadouváním sáčku plyny, takže sáček pod oblečením nebude vidět.

Prokazatelně snížené nadouvání sáčku plyny o

61%⁷



Bezpečné upínání u 2dílného systému

„Click“ upínání má mechanický kroužek se zámečkem pro větší pocit jistoty a bezpečí. Slyšitelné kliknutí (cvaknutí zámečku) vás ujistí, že sáček je správně připojen k podložce.



Reference: 7. Coloplast klinická studie 2010 (V-0009690), pro ileostomiky, porovnání k standardní péči

Nevíte, která pomůcka je pro vás ta pravá?

Označte obrázek, který se nejvíce podobá vaší stomii.

1 Jaké je okolí stomie (pod lepícím materiálem)?



Pravidelné (rovné)

Celé okolí stomie je víceméně na stejné úrovni jako okolní břišní stěna, i když na kůži mohou být nerovnosti.



Vpadlé

Oblast v okolí stomie vytváří prohlubeň. Stomie je tzv. „v dolíku“.



Vypouklé

Oblast v okolí stomie vystupuje nad úroveň okolní břišní stěny. Stomie je tzv. „v bouli“.

2 Kde se nachází ústí stomie?



Nad úrovní kůže

Ústí stomie vystupuje nad úroveň kůže.



V úrovni kůže

Ústí stomie je v úrovni kůže.



Pod úrovní kůže

Ústí stomie je pod úrovní kůže. Stomie je zapadlá.

3 Jaké nerovnosti jsou v okolí vaší stomie?



Povrchové nerovnosti

Kůže je zvrásněná, jsou na ní varhánky.



Hluboké nerovnosti

V okolí stomie jsou hluboké kožní řasy, tukové záhyby.

Vyplňte, prosím, tento dotazník a nahlaste nám Vaše odpovědi na bezplatnou infolinku **800 100 416**

4 Pokud je oblast v okolí vaší stomie vypouklá, do jaké míry?



Používám pomůcky: ☐ 1dílné ☐ 2dílné ☐ uzavřené ☐ výpustné ☐ urostomické

Velikost (průměr) mé stomie je cm

Jméno a příjmení:

Adresa:

Tel. číslo: Datum:

Každá stomie může mít své Mio!

1dílné sáčky

SenSura Mio
pro rovné okolí



SenSura Mio Convex
pro vpadlé okolí



SenSura Mio Concave
pro vypouklé okolí



2dílné sáčky

SenSura Mio
pro rovné okolí



SenSura Mio Convex
pro vpadlé okolí



SenSura Mio Concave
pro vypouklé okolí



1dílné velkoobjemové sáčky

SenSura Mio s možností napojení na sběrný sáček

pro rovné okolí




pro vpadlé okolí



měkký konvex



mírný konvex

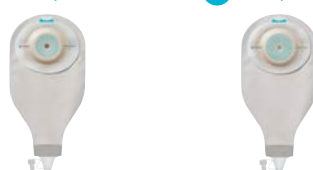

Pomůcky řady SenSura®Mio jsou zdravotnické prostředky určené pro stomiky. Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nepoškozené kůži kolem stomie. Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

Video návody k použití pomůcek SenSura Mio najdete na YouTube kanálu Coloplast Česká republika.

SenSura Mio a logo Coloplast jsou registrované značky společnosti Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena Coloplast A/S, Humlebaek, Dánsko. 2021-02

PM-27001

YouTube kanál:



SenSura Mio:



Coloplast®
Care

 **Coloplast**

Coloplast Czech s.r.o.
Radlická 740/113 c
158 00 Praha 5
tel.: 244 470 212
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz



Péče o klienty
800 100 416
bezplatná informační linka