



Život se stomíí

 Coloplast

Obsah

Úvod	3
Trávící soustava	4
Typy stomie	5-6
- Kolostomie	5
- Ileostomie	6
- Urostomie	6
První kroky po operaci	7
Stomické pomůcky SenSura Mio	7-9
- jednodílné a dvoudílné pomůcky	7
- podložky SenSura Mio	8
- uzavřené, výpustné, urostomické sáčky SenSura Mio	9
- konvexní pomůcky SenSura Mio jednodílné a dvoudílné	10
- konkávní pomůcky SenSura Mio jednodílné a dvoudílné	11
Péče o stomie	12-16
- Brava odstraňovač adheziv	12
- Brava čisticí ubrousky	12
- Čistící roztok Coloplast	12
- Brava bariérový krém	13
- Brava ochranný film, Prep ochranný film	13
- Brava elasticke vyrovnávací pásky	14
- Brava kroužky (vyrovnávací a těsnící)	15
- Adhezivní pasty Brava a Coloplast	16
- destičky stomické Brava	17
- pohlcovač zápachu Brava deodorant, pudr stomický Brava	17
Příprava a výměna pomůcek	18-20
- měření stomie šablonou	18
- čištění kůže v okolí stomie	19
- kontrola kůže v okolí stomie	19
- kontrola průchodnosti stomie	20
Postup při použití jednodílných pomůcek	20-21
- vystřízení otvoru pro stomii	20
- nalepení sáčku na tělo	21
- odstranění jednodílného sáčku	21
Postup při použití dvoudílných pomůcek	22-23
- vystřízení otvoru pro stomii	22
- nalepení podložky na tělo	22
- připojení sáčku k podložce	23
Odstranění pomůcek	23-25
- likvidace uzavřeného sáčku	23
- vyprázdnění výpustného sáčku	24
- vyprázdnění urostomického sáčku	25
- odstranění dvoudílné pomůcky	25
Jak používat filtr	26
Jak používat noční urostomický sáček	27-28
Irigační souprava	29
Stomický přídržný pásek	29
Zátka	29
Role vlákniny ve stravě stomika	30
Sestro, co mohu jíst?	31-33
Sestro, co mohu pit?	34-35
Nejčastější dotazy	36-38
Úhradové limity stomických pomůcek	37
Užitečné kontakty	39

Vážená paní, vážený pane,

prodělal(a) jste operaci, během níž Vám byla dočasně nebo trvale založena stomie.

Slovo "stomie" pochází z řečtiny a znamená vyústění dutého orgánu. Může se jednat o tenké střevo - ileostomii, tlusté střevo - kolostomii nebo vyústění močových cest - urostomii. Všechny tři druhy stomií mají společnou vlastnost - nejsou ovladatelné vůlí. Proto je nutné trvale používat jímací systémy neboli stomické pomůcky. Těchto pomůcek je k dispozici velký výběr a všechny základní jsou hrazeny zdravotními pojíšťovnami.

Stojíte nyní před životně důležitými skutečnostmi, z nichž nejnáročnější je zřejmě vyrovnat se co nejdříve s faktem, že stomii máte. Dále je velmi důležité naučit se používat stomické pomůcky a ošetřovat vývod.


Stomická sestra je specialistkou v ošetřování stomií. Bude s Vámi v kontaktu po celou dobu pobytu v nemocnici a poradí Vám i po propuštění z nemocnice ve specializované poradně. Stomická sestra často spolupracuje s lékařem při označení vhodného místa pro vývod, prakticky Vám ukáže, jak stomii ošetřovat a naučí Vás zacházet s pomůckami. Pomůže Vám s výběrem vhodných pomůcek, takže se budete moci vrátit do běžného života s menšími omezeními. Nikdy neváhejte sestru při jakýchkoliv nejasnostech či problémech kontaktovat.

Cílem práce nás stomických sester je Vaše spokojenost, sebevědomí a minimum problémů. V podobné situaci se ocítá mnoho našich spoluobčanů, kteří stejně jako Vy musí překonat všechny překážky a znova se vrátit ke svým rodinám, práci a zálibám. Pevně věřím, že tato příručka přispěje k tomu, abyste se s novou životní situací vyrovnali a získali optimistický pohled do budoucna.

Olga Tellerová, stomická sestra

Trávicí soustava

Proces trávení začíná v ústech. Potrava dále putuje jícenem do žaludku, kde prostřednictvím žaludečních štáv a enzymů trávení pokračuje. Proces vstřebávání výživných látek a vitamínů začíná v tenkém střevě. Obsah tenkého střeva je tekutý. Délka tenkého střeva je šest až sedm metrů a jeho funkce je pro život člověka nezbytná. Operací lze odstranit pouze jeho část. V tlustém střevě, jehož délka je přibližně jeden a půl metru, dochází ke vstřebávání vody a minerálních látek a tím k zahušťování stolice. Žaludek, tenké i tlusté střevo jsou umístěny v břišní dutině. Tlusté střevo začíná v pravé části podbříšku. Vede nahoru, z pravé strany doleva, opět sestupuje a končí konečníkem.

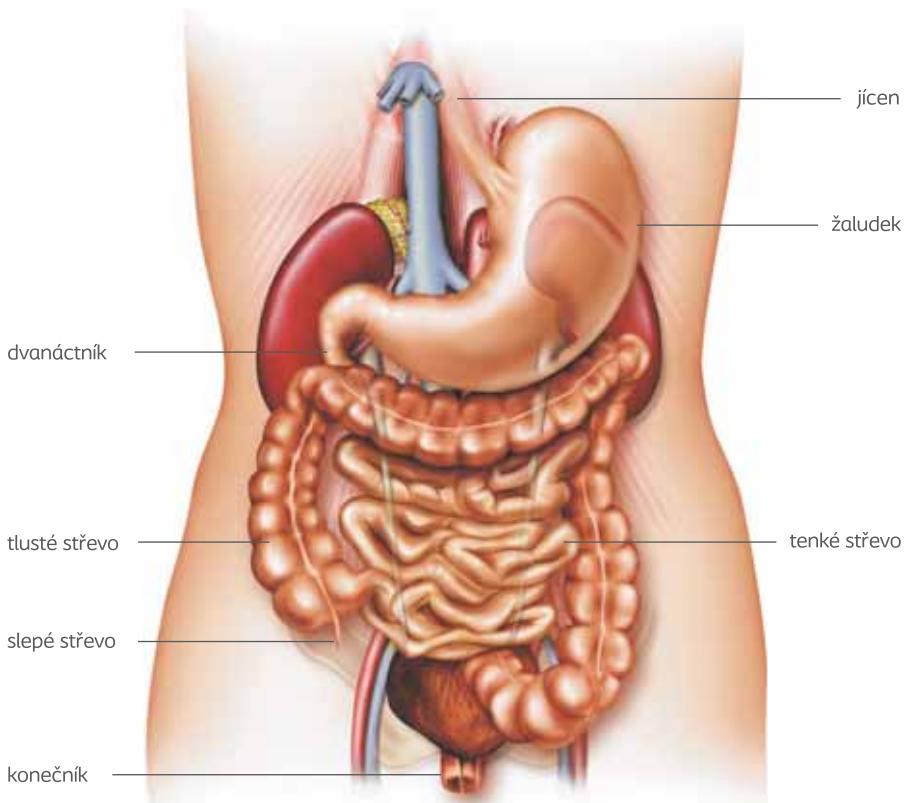

Typy stomie



Stomie může být dočasná nebo trvalá. Má přibližně takovou barvu jako sliznice dutiny ústní a většinou je okrouhlého nebo oválného tvaru. Bezprostředně po operaci je stomie oteklá, ale později procesem hojení otok ustupuje. Velikost bývá v průměru tři až pět centimetrů.

Ve sliznici střeva nejsou nervová zakončení, proto při dotyku nic neucítíte. Zároveň je ale velice dobře cévně zásobena, což může způsobovat mírné krvácení při mechanickém podráždění během ošetřování. Drobnému krvácení není třeba věnovat zvláštní pozornost. Pokud však nepřestává, je nutné neprodleně navštívit lékaře nebo stomickou sestru.

Kolostomie



Vývod tlustého střeva, tzv. kolostomie je nejčastějším typem stomie neboli vývodu. Můžeme se též setkat s odbornými názvy kolostomii odvozenými podle místa vyvedení: sigmoideostomie (vývod na esovité kličce tlustého střeva), transversostomie (vývod na příčném tračníku) a cékostomie (vývod na přechodu tenkého a tlustého střeva).

Stomie se většinou zakládá jako důsledek onemocnění sestupné části tlustého střeva nebo konečníku. Mezi nejčastější příčiny vedoucí k operaci patří: záněty tlustého střeva, nádory a výchlipky (divertikly) tlustého střeva. Kolostomie bývá umístěna v levé části břicha (v levém podbřišku).

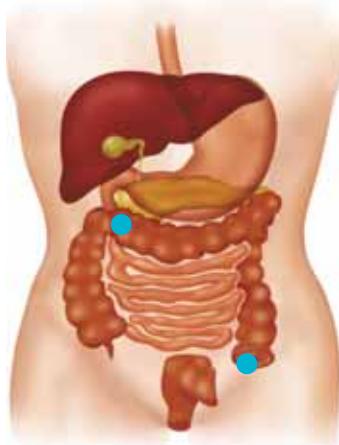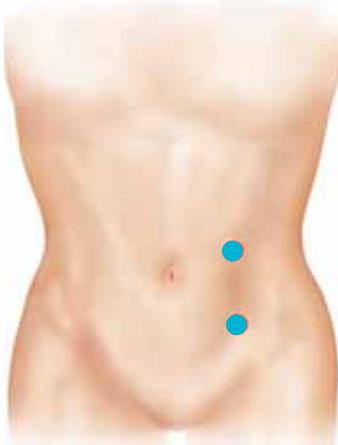



Ileostomie

Vývod tenkého střeva, tzv. ileostomie je trvalým řešením při odstranění poškozeného tlustého střeva. Provádí se méně často než kolostomie. U některých onemocnění se z léčebných důvodů provádí dočasná stomie pro odlehčení tlustého střeva (např. při léčbě zánětů). Po odeznění obtíží může být stomie zrušena. Vlastní vývod tenkého střeva se příliš nelíší od vývodu střeva tlustého. Na rozdíl od kolostomie má však stolice tekutý charakter a odchází neustále. Ileostomie bývá zpravidla vyvedena na pravé straně břicha.

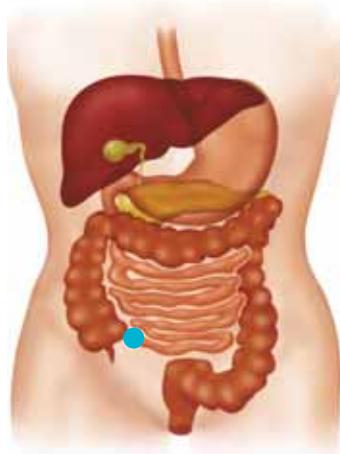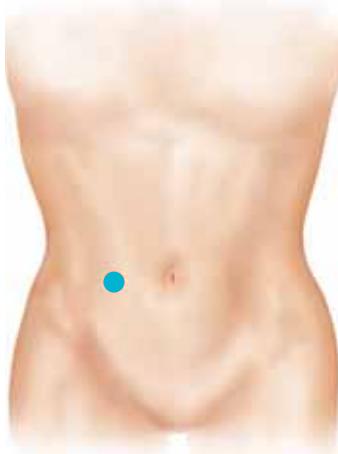

Urostomie

Patří k nejméně častým typům stomií. Důvodem pro založení urostomie bývá zhoubný proces, nejčastěji na močovém měchýři. Dočasné může být řešením vrozených vad u dětí. Umisťuje se v dolní partii břicha.

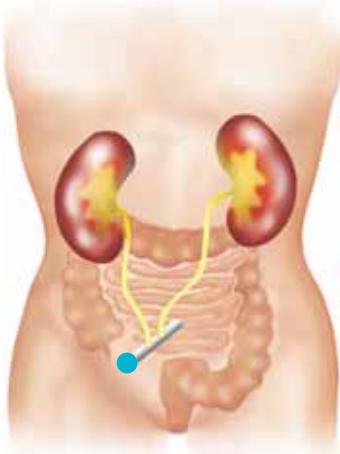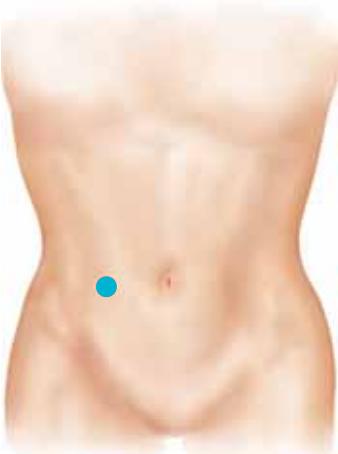

První kroky po operaci

Po operaci vám stomická sestra poradí při výběru nejvhodnějších stomických pomůcek. Naučí vás, jak nalepit podložku, vyměnit a vyprázdnit sáček, jak pečovat o kůži kolem stomie. Vzhledem k tomu, že se budete učit mnoha novým věcem, musíte být trpěliví a počítat s určitými počátečními těžkostmi. Brzy se celý postup naučíte a zvládnete jej.

Pro většinu lidí je velmi těžké si představit, že budou žít se stomickým sáčkem. Po určité době se však přesvědčí, že mohou žít stejně aktivním životem jako před operací. Problémy bývají obvykle psychické povahy a přizpůsobení se nové situaci vyžaduje určitý čas.

Díky diskrétním stomickým pomůckám nebudou lidé ve vašem okolí o stomii vědět, pokud jim to sami neřeknete. O své stomii nemusíte nikomu říkat, informovaný by však měl být přinejmenším váš partner nebo někdo blízký.

O stomii můžete otevřeně hovořit i před vašimi dětmi. Poznají-li, že vy sami tento fakt akceptujete, budou přijímat vaši situaci stejně jako vy.

Stomické pomůcky SenSura®Mio

Společnost Coloplast vyvíjí pro váš komfort ucelený sortiment vysokokvalitních stomických pomůcek. Naši filozofii je dát každému pacientovi možnost vybrat si pomůcky podle individuálních potřeb. Proto máme k dispozici pomůcky pro všechny typy stomí a to v jednodílném i dvoudílném provedení, vždy v několika velikostech.

Základem všech stomických pomůcek je podložka - lepící materiál, který se nalepí na kůži kolem stomie. Podložka chrání okolí stomie a umožňuje uchycení sáčku. Sáček slouží pro jímání odcházející stolice nebo moči.

Sáčky se dělí podle typu stomie na kolostomické (uzavřené), ileostomické (výpustné) a urostomické (s výpustným ventilem).

Existují dva základní typy pomůcek - jednodílné a dvoudílné.

U jednodílných pomůcek je podložka pevně spojena se sáčkem. Pomůcka se vyměňuje celá. Dvoudílné pomůcky se skládají ze samostatné podložky a zvlášť vyměnitelného sáčku.

Jednodílné stomické pomůcky SenSura®Mio

Jsou stomické sáčky opatřené jedinečným lepícím materiálem vyrobeným na základě patentované technologie BodyFit®. Je tak elastický, že se přizpůsobí křivkám vašeho těla a každému pohybu.

Dvoudílné stomické pomůcky SenSura®Mio Click

Dvoudílný systém se skládá z podložky a sáčku. Podložka spolehlivě přilne k tělu a zůstává na kůži několik dní. K podložce se jednoduchým způsobem připevní sáček, který se vyměňuje podle potřeby (maximálně po naplnění do dvou třetin objemu sáčku).

Podložky SenSura® Mio

Elastický lepící materiál dokonale přilne na jakékoliv tělesné křivky včetně záhybů a jizev a zároveň se natahuje a smršťuje při každém pohybu spolu s kůží. U dvoudílného systému doporučujeme měnit podložku každé 3 dny, pokud máte kolostomii a každé 2 dny, pokud máte ileostomii nebo urostomii. Podložky SenSura Mio jsou opatřeny 4 oušky, do kterých lze upevnit přídružný stomický pásek SenSura Mio se 4 oušky a zvýšit tak pocit bezpečí.



Jednoduchost v upínání

Upínací systém dvoudílných pomůcek SenSura Mio Click je velmi spolehlivý a přitom jednoduchý. Zvuk cvaknutí nebo tzv. kliknutí při uzavření zámečku vám poskytne pocit jistoty, že je podložka bezpečně připojena k sáčku. Před uzavřením zámečku lze sáček ještě pootočit do požadované pozice. Zámeček se zavírá bez tlaku na břišní stěnu.

Při odepínání stačí přiložit z jedné strany zámečku palec, z druhé ukazovák a stisknout, uslyšíte kliknutí a zámeček se otevře.



At' oblečete cokoliv, je stále diskrétní SenSura Mio sáček je vyroben z hebké a jemné tkané látky, takže nepůsobí tak zdravotnickým dojmem a stává se spíše oděvním doplňkem nebo samotným kouskem oblečení. Speciálně zvolená neutrální barva je navržena tak, aby si sáčku nikdo nevšiml pod oblečením – dokonce ani pod bílou košílkou.



Uzavřené sáčky SenSura®Mio

Diskrétní sáčky bez výpusti potažené tkanou textilií, která je velmi jemná na kůži a absolutně diskrétní. Textilie odpuzuje vodu, ta po ní jen steče dolů. Umožňuje koupání a sprchování. Sáčky jsou dostupné ve velikostech mini, midi a maxi dle objemu sáčku. Uzavřené sáčky používají především kolostomici s pevnou a formovanou stolicí.



Výpustné sáčky SenSura®Mio

Sáčky s integrovanou výpustí, která se bezpečně přeloží a uzavře. Navíc se dá velmi rychle diskrétně připevnit k bodu na suchý zip do kapsy pod textilí. Výpust je vysoce hygienická, jednoduše se čistí a vypouští. Sáčky jsou dostupné ve velikostech mini, midi a maxi dle objemu sáčku. Výpustné sáčky používají především ileostomici, protože mají řídkou stolicí. Někdy je také mohou používat kolostomici v období po operaci, kdy stolice ještě není dostatečně zformovaná nebo při dočasné změně charakteru stolice z pevné na řídkou. Výpustný sáček se obvykle vyměňuje každý den.



Urostomické sáčky SenSura®Mio

Multikomorový sáček je vyvinutý tak, aby se moč rovnoměrně rozlila do komor. Sáček se nevyboulí a také nejsou slyšet šplouchavé zvuky. To znamená větší pohodlí a diskrétnost. Tkaná textilie odpuzuje vodu, ta po ní jen steče dolů. Umožňuje koupání a sprchování. Sáčky jsou dostupné ve velikostech midi a maxi dle objemu.



Konvexní pomůcky SenSura®Mio Convex

Konvexní pomůcky se používají v případech, kdy to vyžaduje tělesný profil v okolí stomie a je třeba se vždy poradit se stomickou sestrou ohledně jejich správného výběru a použití. SenSura Mio je opatřena přizpůsobivým konvexem a elastickým lepícím materiálem.

Díky této dvěma inovacím pomůcka těsně přilne a pevně drží na místě, i když se člověk ohýbá nebo natahuje, ale přitom je zároveň velmi pohodlná. Konvexní pomůcky jsou opatřeny 4 oušky, do kterých se dá zapojit přídržný stomický pásek a tím zvýšit pocit bezpečí.



Měkké konvexní pomůcky SenSura®Mio Convex Soft

Měkká konvexní pomůcka je dostupná v jednodílném provedení pro kolostomiky, ileostomiky a urostomiky. Je vhodná pro oblast kolem stomie, která je jen mírně zvrásněná, s jemnými kožními záhyby a pro nově operované stomiky s řídkou až tekutou stolicí jako prevence podtekání.



Mírné a hluboké konvexní pomůcky

SenSura®Mio Convex Light



SenSura®Mio Convex Deep



Mírně konvexní a hluboko konvexní pomůcky SenSura Mio Convex jsou dostupné pro kolostomiky, ileostomiky a urostomiky v jednodílném i ve dvoudílném provedení (jako konvexní podložka, na kterou se připojuje sáček). Jsou vhodné pro stomie v kožních záhybech a převisech, mírný konvex se také používá pro stomie v úrovni kůže a hluboký konvex pro zapadlé stomie (ústí stomie je pod úrovní kůže).



Konkávní pomůcky SenSura®Mio Concave

Konkávní pomůcky se používají v případech, kdy to vyžaduje tělesný profil v okolí stomie a je třeba se vždy poradit se stomickou sestrou ohledně jejich správného výběru a použití. Jestliže teď používáte stomickou pomůcku s plochým lepícím materiélem a ten se vám v místech, kde obepíná vypouklé břicho, krabatí a odlepuje, potom by pro vás mohlo být výhodné vyzkoušet novou konkávní pomůcku SenSura Mio Concave. Je to první stomická pomůcka, která byla navržena speciálně pro stomie umístěné ve vypouklém peristomálním okolí a perfektně padne na boule, kýly nebo na větší břicha.

Kýla je častá komplikace, která se objevuje až po uplynutí určité doby po operaci (většinou do 1 roku). Je důležité předcházet možnému vytvoření kýly a řídit se doporučením, které vám dá vaše stomická sestra. Když už se však stane, že se kýla vytvoří nebo např. přiberete na váze a budete mít vypouklé břicho, pak je třeba hledat stomickou pomůcku vhodnější pro takový tělesný profil. Takovou pomůckou je právě SenSura Mio Concave, která je přímo vytvořená pro stomiky s kýlou nebo s větším břichem.

Tyto sáčky jsou dostupné v jednodílném i dvoudílném provedení pro všechny typy stomí (kolostomiky, ileostomiky i urostomiky).



Péče o stomie

Brava odstraňovač adheziv

SÚKL kód sprej 5008108

SÚKL kód ubrousky 5008107

Brava odstraňovač adheziv ve spreji jednoduše odstraní z kůže stomický sáček. Neobsahuje alkohol a proto nedráždí kůži. Odstraňovač nastříkejte podél okraje podložky a po páru vteřinách jemně odlepте podložku odshora dolů. Jednotlivě balené ubrousky se používají na odstranění zbytků lepícího materiálu z kůže. Na 3 měsíce lze předepsat 6 sprejů nebo 3 balení ubrousků po 30 kusech.



Brava čisticí ubrousky

s provitaminem B5

SÚKL kód 5008095

Brava čisticí ubrousky jsou výhodné, protože kůži čistí a zároveň o ni pečují. Ubrousky neobsahují žádné oleje a mohou tak kůži připravit na nalepení stomické pomůcky, která dobře přilne. Provitamin B5 pomáhá udržet kůži zdravou, omezuje zarudnutí kůže a zlepšuje stav irritované kůže. Na poukaz lze předepsat 4 zásobníky ubrousků na 3 měsíce. Zásobník obsahuje 15 ubrousků připravených k použití.



Roztok stomický Coloplast

SÚKL kód lahvička 5008097

SÚKL kód ubrousky 5008096

Roztok stomický Coloplast je vynikající náhradou mýdla, vody a jiných prostředků, které stomici používají na očištění kůže.

Roztok kůži účinně čistí, zjemňuje ji a zabraňuje jejímu vysoušení.

Na 3 měsíce lze předepsat 4 lahvičky nebo 3 balení ubrousků po 30 kusech.



Krém bariérový Brava

SÚKL kód 5008099

Brava bariérový krém je ideálním prostředkem pro stomiky se suchou nebo podrážděnou kůží. Udržuje optimální pH kůže a napomáhá hojení poškozené kůže. Funguje také jako preventivní ochrana před poškozením. Při pravidelném používání krému se zvýší odolnost kůže vůči výměškům.

Bariérový krém je plně hrazený pojišťovnou a lze ho předepsat na poukaz.



Brava ochranný film

SÚKL kód sprej 5008092

SÚKL kód ubrousky 5008091

Brava ochranný film chrání kůži před poškozením způsobeným stolicí nebo močí. Neobsahuje alkohol a proto kůži nedráždí. Sprej nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 10 cm přímo na kůži kolem stomie, ubrousky používejte přímo na kůži. Po několika vteřinách se vytvoří ochranná vrstva a můžete nalepit stomický sáček. Na 1 měsíc lze předepsat 2 spreje nebo 2 balení ubrousků po 30 kusech.



Prep ochranný film Coloplast

SÚKL kód 5008089

Prep ochranný film chrání kůži před neustálým působením lepícího materiálu na stomické podložce, před vlivem tření pomůcky o kůži a před chemickým podrážděním způsobeným výměšky a močí.

Používá se před nalepením stomické pomůcky na kůži. Obsahuje alkohol. Okamžitě po aplikaci na kůži vytváří viditelnou ochrannou vrstvu. Limit umožňuje nechat si předepsat 2 balení měsíčně.



Elastické vyrovnávací pásky Brava

- půlkruh - SÚKL kód 5008129
- rovný tvar - SÚKL kód 5008127
- půlkruh s postranními výběžky - SÚKL kód 5008123
- půlkruh XL - SÚKL kód 5008125

Elastické vyrovnávací pásky Brava brání možnému rolování lepicího materiálu a odlepování od okrajů. Lze je také použít pro zvýšení pocitu bezpečí, protože drží sáček pevně na svém místě. Jsou tak pružné, že se přizpůsobí pohybům a tvaru těla. Neobsahují alkohol a nedráždí kůži. Elastické vyrovnávací pásky Brava lze předepsat na poukaz, jsou plně hrazené pojíšťovnou a lze je předepsat jen s 1D sáčkem nebo 2D podložkou, max. 120 ks měsíčně dle indikací lékaře. Vyberte si, jaký tvar pásky potřebujete, aby se vám hodil k podložce nebo k tělesným křivkám v okolí stomie. Pro ještě vyšší pocit bezpečí nabízíme také rozměrově širší pásky Brava XL.



1) Půlkroužky se hodí k zajištění oválných nebo kulatých podložek. Půlkroužky XL se hodí k zajištění větších konkávních podložek anebo i standardních podložek pro větší pocit bezpečí.

2) Rovný tvar se hodí k zajištění čtvercových podložek.

3) Půlkroužky s postranním výběžkem zvyšují pocit bezpečí, pokud je okolí stomie komplikované, např. stomie v kýle, jizvy, kožní řasy a záhyby.

Jak správně používat elastické vyrovnávací pásky Brava.

Pásy Brava můžete nalepit po celém obvodu podložky a tím zvýšit váš pocit bezpečí nebo je můžete použít jen v některých místech, kde je podložka více namáhaná a hrozí tedy vyšší riziko odlepování okrajů. Část pásky musí vždy překrývat již nalepenou podložku a část je přilepena na kůži, jak ukazují obrázky.

Brava Seal

těsnící vyrovnávací kroužek

SÚKL kód 5008131, tl. 2,5 mm, Ø 18 mm

SÚKL kód 5008133, tl. 2,5 mm, Ø 27 mm

SÚKL kód 5008135, tl. 2,5 mm, Ø 34 mm

SÚKL kód 5008140, tl. 4,2 mm, Ø 18 mm

SÚKL kód 5008141, tl. 4,2 mm, Ø 27mm

SÚKL kód 5008143, tl. 4,2 mm, Ø 34mm

Brava Seal těsnící vyrovnávací kroužek může pomoci s řešením různých problémů v okolí stomie: pokud máte například výrazné jizvy a hluboké kožní řasy nebo máte nepravidelný tvar stomie či vlhké okolí stomie anebo pokud se vám lepící materiál na podložce příliš brzo rozpadá působením agresivních výměšků. Kroužek vytvoří bezpečné těsnění mezi stomií a podložkou. Zároveň udržuje zdravou kůži a chrání ji před podtékáním. Kroužek se vytvaruje prsty a roztáhne na požadovaný tvar. Poté se aplikuje na kůži kolem stomie. Kroužek se může aplikovat také na podložku před nalepením na kůži. Kroužky jsou plně hrazené pojíšťovnou a lze je předepsat jen s 1D sáčkem nebo 2D podložkou v max. množství 60 ks na měsíc dle indikací lékaře.



Brava tvarovatelný těsnící kroužek

SÚKL kód 5008150, tloušťka 2,0 mm

SÚKL kód 5008146, tloušťka 4,2 mm

Brava kroužek vytváří bezpečné utěsnění kolem stomie. Odolává působení stolice co nejdélší dobu, snižuje riziko podtečení na minimum. Kroužek se vytvaruje prsty do požadovaného tvaru a nalepí na kůži kolem stomie. Poté se aplikuje stomický sáček jako obvykle. Kroužky jsou plně hrazené pojíšťovnou a lze je předepsat jen s 1D sáčkem nebo 2D podložkou v max. množství 60 ks na měsíc dle indikací lékaře.



Pasta v tubě Brava

SÚKL kód 5008121

Adhezivní pasta v tubě Brava se používá k vyrovnání jizev, kožních záhybů a jiných nerovností okolo stomie. Používá se také k utěsnění kolem stomie. Pasta se lépe aplikuje navlhčenými prsty, neobsahuje alkohol, proto je velmi šetrná k pokožce. Pastu z kůže odstraníte vlažnou vodou a žínkou. Mastné zbytky pasty lze na kůži před další aplikací pomůcky ponechat. Pasta je plně hrazená pojíšťovnou a měsíčně lze předepsat max. 1 kus.



Pasta v proužcích Brava

SÚKL kód 5008120

Balení pasty v proužcích umožňuje vzít si sebou pouze nezbytně nutné množství pasty, např. při cestování. Pasta v proužcích neobsahuje alkohol a proto při aplikaci nepálí. Pokud vám stačí menší množství, oddělte jen část proužku, pokud potřebujete větší množství, přitlačte pomocí prstů dva proužky k sobě. Pasta v proužcích je plně hrazená pojíšťovnou a měsíčně lze předepsat max. 1 balení.



Coloplast adhezivní pasta

(obsahuje alkohol)

SÚKL kód 5008117

Adhezivní pasta dokonale chrání před účinky střevního obsahu, snižuje riziko podtékání a prodlužuje životnost podložky. Používá se k vyrovnání jizev, kožních záhybů a jiných nerovností okolo stomí a přštělí. Používá se také k utěsnění kolem stomie. Pasta je nutné aplikovat navlhčenými prsty. Měsíčně lze předepsat max. 1 kus.



Destičky stomické Brava
vel. 10x10 cm SÚKL kód 5008109
vel. 15x15 cm SÚKL kód 5008112
vel. 20x20 cm SÚKL kód 5008113
vel. 200x10 cm SÚKL kód 5008115

Destičky stomické se používají tam, kde hrozí riziko nebo již došlo k poškození kůže tělními sekrety. Jsou samolepící, tenké, ohebné, na kůži nezanechávají žádné zbytky a prodlužují životnost podložky. Destičku lze vystříhnout dle velikosti stomie, nalepit na kůži a na ni nalepit podložku nebo rovnou jednodílný sáček. Destičku lze předepsat dle potřeby stomika a rozhodnutí lékaře.



Pohlcovač pachu Brava deodorant (s lubrikačním účinkem) SÚKL kód 5008106

Moderní Brava lubrikační deodorant neutralizuje zápach a zároveň účinkuje jako lubrikant. Tak si můžete být jistí, že výměšky jsou vždy na dně stomického sáčku a nikoliv kolem vašeho vývodu. To také usnadňuje vyprázdnění sáčku. Brava deodorant lze předepsat na poukaz při dodržení limitu maximálně 350,- Kč za měsíc. Na 3 měsíce lze v rámci limitu předepsat 3 lahvičky Brava lubrikačního deodorantu.



Pudr stomický Brava
SÚKL kód 5008102
Pudr se používá na macerovanou kůži v okolí stomie, má vynikající schopnost absorbovat vlhkost. Udržuje kůži v okolí stomie suchou a redukuje další podráždění kůže. Okolí stomie se lehce zapudruje a nadbytečný pudr se poté setře.



Příprava a výměna pomůcek

Pomůcky vyměňujte tak často, jak je třeba, pokud vám to dovolí měsíční limit. Ideální doba je hned ráno. Připravte si předem vše potřebné: šablonu pro změření stomie (je součástí každého balení sáčků), podložku a sáček, buničinu či papírovou utěrku nebo měkký toaletní papír a čtvereček gázy na osušení, příslušenství pro péči o stomie: odstraňovač adheziv a ochranný film Brava, ochranný krém, pohlcovač zápacu (používají pouze kolostomici a ileostomici), sáček na použité pomůcky.



Příprava

Před nalepením lepícího materiálu na tělo je nutné v něm vystríhnout otvor, který musí přesně odpovídat tvaru stomie. Pokud je otvor příliš velký, kůže v okolí stomie je vystavená výměškům ze stomie, které mohou kůži poškodit. Pokud je otvor příliš malý, lepící materiál kolem stomie dobře nepřilne. Příliš malý otvor může také poškodit stomii. Pro vystřízení otvoru v lepícím materiálu budete potřebovat šablonu, propisku a nůžky se zaoblenými konci. Průměr stomie se bude časem měnit, proto vždy pozorně kontrolujte velikost vaší stomie.

Měření šablonou

Pomocí šablony změřte průměr vaší stomie. Abyste našli velikost, která nejlépe vyhovuje vaší stomii, vyzkoušejte různé otvory v šabloně. Otvor musí přesně odpovídat velikosti vaší stomie.

Pokud máte oválnou stomii, změřte průměr pomocí půlkruhů na šabloně.

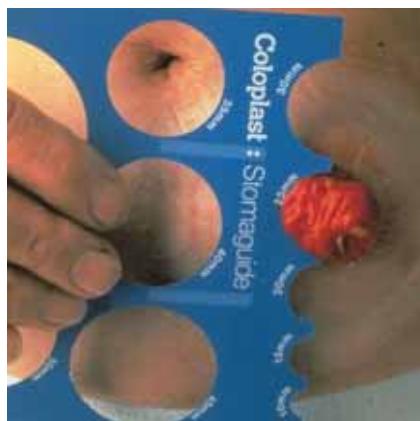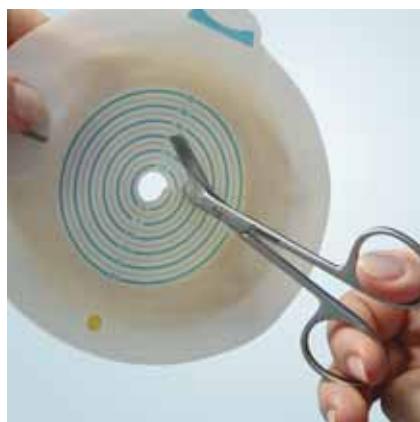

Čištění kůže v okolí stomie

Vyčistěte stomii a kůži v okolí stomie vlažnou tekoucí vodou a bavlněnou utěrkou nebo tamponem z gázy. Každý zbytek lepícího materiálu, který zůstane na kůži i po jemném utření, raději nechte na místě a neodstraňujte ho silou, aby nedošlo k podráždění pokožky. Odstraníte ho při další výměně. Nepoužívejte žádné přípravky, které nejsou určené na kůži, protože můžete pokožku podráždit.



Pokud kůže není v optimálním stavu, použijte Brava příslušenství pro péči o stomie a o kůži v okolí stomie od Coloplastu. Podrobnější informace o těchto přípravcích a jejich použití jsou uvedeny v předcházející kapitole. POZOR! U urostomíků odchází moč nepřetržitě, což znesnadňuje výměnu pomůcek. Také u ileostomíků může odcházet stolice neustále. V tomto případě je vhodné použít čtvereček gázy nebo tampon na dočasné utěsnění stomie.



Kontrola kůže v okolí stomie

Zkontrolujte stomii a kůži v okolí stomie. V případě nutnosti použijte zrcadlo. Kůže v okolí stomie by měla vypadat jako kůže na zbytku těla - zdravá, bez zabarvení nebo známek podráždění. V této oblasti je třeba odstranit chloupky, abyste předešli podráždění vlasových váčků při odlepování pomůcky.



Kontrola průchodnosti stomie
Při výměně pomůcky nezapomínejte občas na kontrolu průchodnosti stomie. Při podezření na neprůchodnost stomie, konzultujte vaše obavy se stomickou sestrou.

Osušení kůže před použitím stomické pomůcky

Kůži jemně a opatrně osušte. Kůžě v okolí stomie musí být osušená a stomii je třeba nechat chvíli na vzduchu oschnout. Před použitím další pomůcky musí být kůžě v okolí stomie úplně suchá. Pokud by tam zůstala jakákoli vlhkost, lepící materiál by se nedostal do úplného kontaktu s kůží. Potom hrozí riziko podtečení a podráždění kůže.



Postup při použití jednodílných pomůcek:

Vystřízení otvoru pro stomii
Poté, co změříte velikost vaší stomie šablonou, položte si změřený otvor na šabloně na zadní stranu lepícího materiálu a vykreslete tvar vaší stomie, který budete vystřihovat. Abyste při stříhání otvoru nepoškodili sáček, odtáhněte ho mírně od lepícího materiálu. Pokud má vaše stomie pravidelný tvar a znáte její průměr, můžete pro vystřihování použít rovnou vhodný průměr nakreslený na zadní straně lepícího materiálu. Pokud neznáte průměr vaší stomie, použijte šablonu. Na vystřihování použijte spíše menší nůžky a pokud možno se zaoblenými konci. Když odstraníte ochrannou fólii, můžete si ji schovat a použít pro přípravu další pomůcky.



Nalepení sáčku na tělo

Odstraňte ochrannou fólii z podložky tak, že přidržíte palcem bílé poutko na podložce a zároveň zatáhněte za modré poutko na fólii.

Po odstranění ochranné fólie byste měli okraje otvoru vyrovnat prsty, aby se zabránilo jakékoli nerovnosti hran.

V případě, že používáte výpustný sáček, nezapomeňte před použitím sáčku uzavřít výpust.

Do připraveného sáčku nakapejte 5 až 10ml Brava deodorantu s lubrikačním účinkem.

Při nalepování sáčku na kůži se přesvědčte, že je lepící materiál v dokonalém kontaktu s kůží. Před nalepením pomůcky vytvarujte prsty otvor v podložce tak, aby se jeho okraje mírně zvedaly a obepínaly stomii. Přilepte sáček od spodní části stomie směrem nahoru. Lepící materiál přilepte nejprve nejprve těsně kolem stomie. Přejedte prsty kolem stomie, abyste měli jistotu, že je lepící materiál všude přilepený. Lepící materiál uhladte prsty směrem od stomie až k okrajům, aby se přizpůsobil tělesné teplotě a pevně držel na kůži.



Odstranění jednodílného sáčku

Nejdříve nastříkejte podél podložky odstraňovač adheziv Brava ve spreji, poté sáček jednoduše odlepíte. Při odlepovali sáčku uchopte bílé poutko a jemně odtáhněte sáček směrem od těla. Při zatažení za sáček směrem dolů, druhou volnou rukou jemně přitlačujte kůži.

Nezapomeňte si vždy, když odcházíte mimo domov, vzít s sebou několik sáčků v taštičce k tomu určené a také sáček na odpad.





Postup při použití dvoudílných pomůcek:

Vystřízení otvoru pro stomii

Poté, co změříte velikost stomie šablounou, položte si změřený otvor na šablouně na zadní stranu podložky a vykreslete tvar stomie, který budete vystříhat. Pokud má vaše stomie pravidelný tvar a znáte její průměr, můžete pro vystříhování použít rovnou vhodný průměr nakreslený na zadní straně podložky. Pokud neznáte průměr vaší stomie, použijte šablonu. Na vystřihování použijte spíše menší nůžky a pokud možno se zaoblenými konci. Když odstraníte ochrannou fólii, můžete si ji schovat a použít pro přípravu další pomůcky.

Nalepení podložky na tělo

Odstraňte ochrannou fólii z podložky tak, že přidržíte palcem bílé poutko na podložce a zároveň zatáhněte za modré poutko na fólii. Po odstranění ochranné fólie byste měli okraje otvoru vyrovnat prsty, aby se zabránilo jakékoli nerovnosti hran. Při nalepování podložky na kůži se přesvědčte, že je podložka v dokonalém kontaktu s kůží. Před nalepením podložky vytvarujte prsty otvor v podložce tak, aby se jeho okraje mírně zvedaly a obepínaly stomii. Podložku přilepte nejprve těsně kolem stomie. Přejedte prsty kolem stomie, abyste měli jistotu, že je podložka všude přilepená. Podložku uhladte prsty směrem od stomie až k okrajům, aby se přizpůsobila tělesné teplotě a pevně držela na kůži.

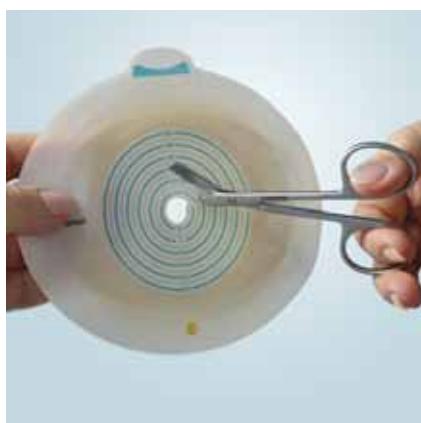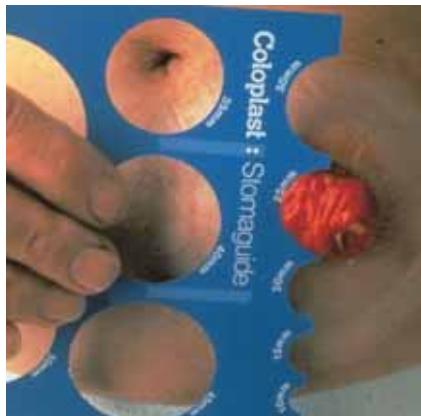

Připojení sáčku k podložce

Než připojíte sáček k podložce, zkontrolujte, že je zámeček na upínacím kroužku otevřený. Zatlačte na něj špičkou prstu. Přitlačte upínací kroužek na sáčku ke kroužku na podložce a začněte odspodu. Přejed'te prsty kolem celého upínacího kroužku po venkovní straně sáčku směrem odspodu nahoru.

Jakmile uslyšíte slabé cvaknutí upínacího kroužku, sáček je bezpečně připojen k podložce. Sáček můžete pootočit do optimální polohy. Poté zamkněte zámeček. Jakmile uslyšíte kliknutí, zámeček je zamčený a zajišťuje bezpečné spojení sáčku s podložkou.



Odstranění pomůcek

Pro odstranění stomické pomůcky budete potřebovat vodu, vatové tampony, papírové utěrky nebo čistou utěrku a igelitový pytel na odpad. Aby se vám sáček snadněji odstraňoval, použijte Brava odstraňovač adheziv ve spreji a nastříkejte na podložku a kůži v okolí. Aby nedošlo k případnému znečištění oděvů, můžete zasunout okraj pytla na odpad za spodní prádlo přímo pod stomií. Nikdy nevyhazujte žádné stomické pomůcky do záchodu, protože by mohly ucpat odtok.



Likvidace uzavřeného sáčku

Většina stomíků, kteří používají uzavřený sáček, ho před likvidací nevyprazdňuje.

Pokud používáte výpustný sáček, můžete ho před likvidací vyprázdit, ale do záchodu ho nesplachujte.



Vyprázdnění výpustného sáčku

Než sáček odstraníte, měli byste ho nejprve vypustit. Tak bude odstranění jednodušší, bude menší zápach a méně nečistot při jeho likvidaci. Na očištění výpusti budete potřebovat toaletní papír. Než začnete s vypouštěním, nejprve otevřete výpust. Uchopte konce suchých zipů. Odlepte oba dva suché zipy od podložky. Dvakrát za sebou rozbalte výpust sáčku. Přitom držte výpust nasměrovanou nahoru, aby nedošlo k vypouštění. Když jste připraveni vypustit sáček do záchodu, obrat'te výpust sáčku směrem dolů. Přehněte uzávěr výpusti směrem dozadu. Pevně uchopte obě dvě strany výpusti a pomalu stiskněte prsty k sobě, aby se výpust otevřela. Nechte vytéct obsah sáčku a vyprazdňování kontrolujte stiskem prstů.

Když je sáček prázdný, očistěte okraj výpusti. Vytřete uzávěr výpusti jedním plynulým pohybem. Nyní je výpust čistá a může být znova uzavřena.

Zavřete uzávěr na konci výpusti přes otvor a potom výpust přeložte dvakrát za sebou, až uvidíte suchý zip. Výpust uzavřete přeložením suchých zipů a pevně je přitiskněte k destičce. Nyní můžete celou výpust diskrétně skrýt pod měkkou tkanou textilií.



Vyprázdnění urostomického sáčku

Než sáček odstraníte, měli byste ho nejprve vypustit. Odstranění bude jednodušší. Než začnete s vypouštěním sáčku, několikrát zakašlete, aby se stomie vyprázdnila. Na očištění výpusti budete potřebovat toaletní papír. Obrat'te výpust směrem nahoru. Než ji otevřete, nejprve ji pevně stiskněte za výpustným ventilem. To vám umožní kontrolovat odtok moči. Otevřete výpustný ventil, ale nepovolujte stisk prstů. Když jste připraveni, nasměrujte výpust do záchodu. Uvolněte stisk prstů a vypust'te sáček, přitom stále držte výpust nasměrovanou do záchodu. Přesvědčte se, že je sáček úplně prázdný. Než výpustný ventil uzavřete, osušte jeho konec kouskem toaletního papíru. Přidržujte toaletní papír kolem výpustného ventilu, dokud neotočíte výpust směrem nahoru. Potom toaletní papír vyhod'te. Nasad'te ventil zpět do uzávěru a pevně ho zatlačte dovnitř.



Odstranění dvoudílné pomůcky

Zatlačte špičkou prstu na tyrkysovou značku na zámečku a tím jej otevřete. Držte sáček za jeho horní část a táhněte zlehka směrem nahoru a od těla. Tím sáček odlepíte. Netahejte přímo za samotný zámeček. Pokud chcete podložku použít opakováně, očistěte upínací kroužek vatovým tamponem a vodou. Podložku odstraníte tak, že uchopíte bílé poutko a zatahněte za něj směrem dolů. Při odlepování podložky směrem dolů druhou volnou rukou jemně přitlačujte kůži.




Jak používat filtr

Váš sáček je vybaven filtrem, který umožňuje průchod plynů ven ze sáčku a zároveň neutralizuje zápací. Filtr je možné zakrývat a odkrývat dle potřeby a jak často si budete přát.

V případě, že se vytvoří v sáčku částečné vakuum, filtr zakryjte.

Vakuum může způsobit nahromadění stolice kolem stomie.

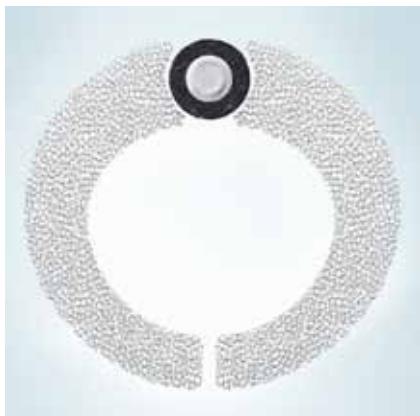

Filtr zakryjte tak, že jeho otvor přelepíte bílou přelepkou dodávanou v balení.

Pokud se sáček nafoukne jako balón, může tlak vzduchu způsobit, že se lepící materiál od kůže odlepí. V tom případě je třeba filtr odkrýt.

Filtr odkryjete tak, že z něj jednoduše odstraníte bílou přelepku.



Filtr zakryjte po dobu koupání, protože voda může filtr poškodit a potom nebude správně fungovat.

Filtr není nutné zakrývat po dobu sprchování.

Můžete se bez obav koupat ve sladké i ve slané vodě. Sáček je voděodolný a rychle schně.



Urostomický noční sáček

Coloplast

SÚKL kód 5009036

Jak používat noční sáček

Na noc si můžete připojit k vašemu urostomickému sáčku velký sběrný sáček. Noční sběrný sáček je připojen k urostomickému dlouhou hadičkou.

Je položen na podlaze nebo zavěšen na speciálním držáku na posteli. Délku hadičky lze upravovat pomocí nůžek.

K očištění budete potřebovat kousek toaletního papíru.



Připojení nočního sáčku

k urostomickému sáčku

Hadičku nočního sáčku můžete zkrátit na délku, která vám nejlépe vyhovuje. To může záviset například na výšce postele nebo podle toho, kam chcete noční sáček v noci umístit. Hadičku tvoří hladké a vlnité úseky. Když budete hadičku zkracovat, ustříhněte ji v jednom z hladkých úseků.

Abyste zachovali bezpečné spojení nočního sáčku a hadičky, je důležité zachovat co nejvíce hladkých úseků na hadičce.

Silným otáčivým pohybem připojte hadičku k nočnímu sáčku.

Silně zatáhněte za hadičku a zkontrolujte, že je bezpečně připojená.

Coloplast noční sáček je plně hrazený pojištovnou a lze předepsat až 15 ks na měsíc.



Příprava urostomického sáčku

Než uvolníte ventil, otočte výpust směrem nahoru. Než ventil otevřete, pevně stiskněte prsty uzávěr za ventilem. To vám umožní kontrolovat odtok moči.

Otevřete ventil, ale výpust držte stále stisknutou mezi prsty. Připojte hadičku nočního sběrného sáčku k urostomickému sáčku. Jestliže byl noční sáček už předtím použity, očistěte spojku na hadičce než ji připojíte k urostomickému sáčku.


Abyste předešli podtlaku v urostomickém sáčku, nevyprázdnějte ho před připojením k nočnímu sběrnému sáčku úplně. Podtlak by mohl způsobit zastavení toku moči.



Vyprázdnění nočního sáčku

Noční sáček vyprázdněte tak, že otočíte jeho výpust směrem dolů. Potom mezi prsty stiskněte výpustní ventil, čímž se uvolní odtok moči.


Když je noční sáček prázdný, výpust uzavřete otočením ventilu nahoru. Pokud je třeba, tak výpust očistěte.

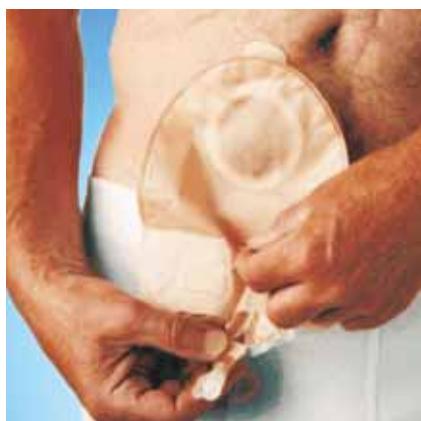

Odpojení nočního sáčku

od urostomického sáčku

Před tím, než odpojíte noční sáček od urostomického, otočte výpust směrem nahoru. Stiskněte výpust mezi prsty. Potom noční sáček odpojte, ale hadičku držte stále stisknutou mezi prsty. Nasad'te uzávěr ventili a pevně zasuňte. Pokud chcete noční sáček znovu použít, očistěte spojku na konci hadičky.

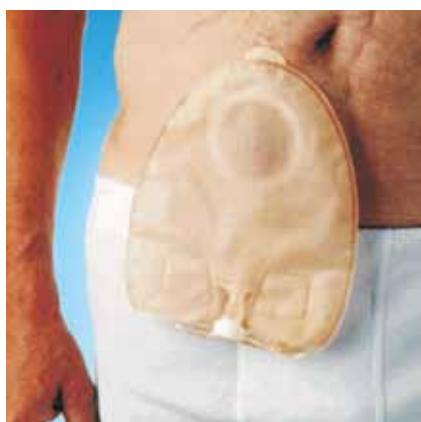

Irigační souprava SÚKL kód 5008154 odvodné sáčky SÚKL kód 5008151

Irigace (výplach střeva) je metoda, jež umožňuje kolostomikům znovu získat kontrolu nad vyprázdrováním střev. Souprava obsahuje vše potřebné pro bezpečnou irigaci. Střivo se vyplachuje vodou jednou za 1 až 3 dny. V období mezi jednotlivými irigacemi se střevo nevyprázduje, takže se používá malý sáček nebo zátka. Irigaci vás naučí stomická sestra. O vhodnosti irigace rozhoduje lékař. Na 1 rok lze předepsat 2 irigační soupravy a k tomu až 300 ks odvodných irigačních sáčků.



Stomické přídržné pásky

Přídržný pásek slouží stomikům, kteří jsou fyzicky aktivní, mají nadváhu nebo nerovný povrch kůže kolem stomie. Coloplast nabízí dva pásky. Pásek se 2 oušky, který se používá s pomůckami SenSura nebo Alterna (SÚKL kód 5009110) a pásek se 4 oušky, který se používá pouze s pomůckami SenSura Mio (SÚKL kód 5008955, délka 100 cm a SÚKL kód 5008954, délka 155 cm). Všechny pásky je možné prát a opakovaně používat. Délku pásku lze jednoduše nastavit. Ročně lze předepsat 2 pásky.



Zátka Alterna Conseal SÚKL kód 5008958

Je diskrétní pomůcka, ideální pro použití v situacích, ve kterých sáček překáží. Zátka má plochý tvar a je podobná náplasti. Mohou ji používat jak kolostomici irigující se, tak ti, kteří se neirigují a mají pravidelnou stolici. Lze ji používat pravidelně i příležitostně. Měsíčně lze předepsat max. 60 kusů zátek.



Role vlákniny ve stravě stomika

Vláknina hraje ve výživě člověka významnou roli. Lidé, kteří konzumují ve stravě dostatečné množství vlákniny (alespoň 25 - 30 g/den) mají méně chronických onemocnění (zejm. srdce a cév), vláknina působí proti zácpě, divertikulóze, snižuje hladinu cukru a tuků v krvi aj. Zdrojem dietní vlákniny jsou potraviny rostlinného původu a její zvláštností je, že se netráví a nevstřebává v tenkém střevě jako ostatní živiny, ale přechází do tlustého střeva v nezměněné podobě. Zde se stává „potravou“ pro prospěšné bakterie tlustého střeva a výživu buněk střeva (kolonocyty). Vlákninu zjednodušeně rozdělujeme na rozpustnou a nerozpustnou. Ropustná vláknina se v tlustém střevě plně zpracuje a využije, naproti tomu při fermentaci nerozpustné vlákniny v tlustém střevě se jako vedlejší produkt vytváří plyny, které mohou způsobit plynatost a nadýmání. Nerozpustná vláknina váže v tlustém střevě vodu a tím zvyšuje objem stolice a působí proti zácpě. Mnoho potravin proto působí jako přirozené projímadlo: zelí, kapusta, celozrnné pečivo a chléb, ovesné vločky, ovoce se slupkami a zrníčky, rebarbora, senný list, med, fíky, sušené švestky, maliny, ostružiny, jahody, kompoty a jiné.

Zdroje v potravě

Potravina většinou není čistým zdrojem rozpustné nebo nerozpustné vlákniny. Následující rozdělení je podle převažující složky nebo záleží na úpravě dané potraviny.

Nerozpustná vláknina: celozrnné pečivo a chléb, luštěniny (čočka, hráč, fazole), citrusové ovoce (dužina), slupky z ovoce a zeleniny, hrušky, zelí, kapusta, květák, brokolice, rajčata, okurky, papriky, pohanka, cizrna, celozrnná rýže, otruby, ořechy a semínka.

Ropustná vláknina: ovesné vločky, loupané vyzrálé ovoce (jablka, broskve), ovocné přesnídávky, banány, ovocné a zeleninové šťávy, rajčatový protlak, brambory, rýže, propasírovaná tepelně upravená kořenová zelenina.

Dietní omezení u ileostomie

Cílem je zabránit podráždění nově založené stomie a předejít její obstrukci („ucpání“). Zejména zpočátku je důležité konzumovat měkkou lehce stravitelnou stravu a omezit velké kousky tuhé nebo špatně rozkousané stravy. Mezi rizikové se řadí i potraviny bohaté na nerozpustnou vlákninu (celozrnné pečivo, slupky z čerstvého ovoce a zeleniny, luštěniny).

Dietní omezení u kolostomie

Strava u kolostomiků není většinou výrazně omezena. Problémy mohou způsobovat potraviny nadýmavé a potraviny, které působí projímat (často individuálně rozdílné) a každý sám jednotlivě si stravu upraví. Nadýmání je rovněž často způsobeno nepravidelností a výrazným omezováním stravy.

Drobné rady ileostomikům

- káva je močopudná, pijte maximálně 1 - 2 šálky denně
- vláknina způsobuje objemnou, řídkou a zapáčhající stolici
- vláknina podporuje zvýšenou plynatost
- sušené ovoce, zelí, čokoláda, alkohol zvětšují objem stolice
- ořechy, mandle, rozinky, kokos, luštěniny mohou způsobit zácpu
- špatně rozkousané citrusové plody (dužina) mohou způsobit střevní neprůchodnost
- červená řepa zbarvuje stolici do červena
- kořeněná jídla mohou způsobovat průjem
- pálivé koření může poškozovat střevní sliznici a peristomální kůži
- vajíčka a ryby způsobují silný zápach stolice
- zralé banány a gumové bonbony tlumí průjem
- fenyklový a mátový čaj snižují nadýmání



- jogurty s živou kulturou omezují zápach a plynatost
- perlivé nápoje zvyšují plynatost
- v horku a při námaze pijte více tekutin a hodně solte
- potažené a tvrdé tablety se mohou objevit celé ve stomickém sáčku, v tom případě informujte ošetřujícího lékaře

Tlusté střevo

Zde dochází ke vstřebávání vody, solí a stolice se zahušťuje.

Kolostomie (vývod na tlustém střevě)

- vyústění tlustého střeva na stěnu břišní
- stolice je kašovitá až formovaná
- k vyprazdňování stolice dochází 1 - 3 x denně

Po operaci zatěžujte trávicí trakt postupně, až dojde k úplné obnově pasáže. Bezprostředně po operaci jezte bezzbytkovou stravu jako ileostomici. Později jezte pravidelně 5 - 7x denně kaloricky vyváženou stravu. Postupně do jídelníčku zařazujte ovoce, zeleninu, celozrnné pečivo a vlákninu. Vyšší obsah bílkovin v potravě urychluje proces hojení. Jezte pomalu, se zavřenými ústy, stravu důkladně rozkousejte, pomůžete lepšímu trávení. Pijte dostatečné množství neperlivých tekutin, minimálně 2 litry denně. Chut' k jídlu Vám zvýší pravidelný pohyb, např. procházky. Přibližně do dvou měsíců po operaci se budete stravovat již jen s malými individuálními omezeními.

Sestro, co mohu jíst?

Tělo potřebuje potravu jako energetický zdroj pro výživu buněk a pro udržení života. Proto musí dieta obsahovat vyvážené množství bílkovin, tuků, cukrů, minerálů i vitamínů. Strava by měla být pestrá, vyvážená a lehce stravitelná.

Musím Vás upozornit, že chut' k jídlu se může vracet pomalu a velmi pozvolna, i několik týdnů po operaci.

Od začátku je vhodné zvykat si jíst v pravidelných intervalech menší porce. Nové druhy potravin si přidávejte postupně, zjistíte tak, jsou-li pro Vás vhodné. Pravidelný příjem potravy pomůže podpořit pravidelné vyprazdňování. Je mylné se domnívat, že omezením stravy omezíme také vyprazdňování. Opak je pravdou. Výsledkem bývá nepravidelná a často bolestivá defekace, hojná plynatost a problematické ošetřování stomie. Typ stomie ovlivňuje skladbu jídelníčku.

Tenké střevo

Zde dochází ke vstřebávání bílkovin, tuků, cukrů, vitamínů a dokončuje se proces trávení.

Ileostomie (vývod na tenkém střevě)

- vyústění koncové části tenkého střeva na břišní stěnu
- řídký a agresivní střevní obsah odchází nepřetržitě
- po operaci může odcházet i několik litrů agresivního obsahu za 24 hodin
- po stabilizaci stavu má střevo produkovat cca 1000 ml řídké stolice

Bezprostředně po operaci se musí trávicí trakt zatěžovat postupně tzv. bezezbytkovou stravou, která neobsahuje žádnou nebo jen malé množství vlákniny. Strava nemá obsahovat kořeněné, pálivé a nadýmavé potraviny. Maso používejte raději bílé (rybí, drůbeží, králičí...) a netučné. Vyvarujte se pití tvrdého alkoholu a většího množství černé kávy. Do jídelníčku pravidelně zařazujte listovou nebo strouhanou zeleninu, ovoce bez slupek, ovocné a zeleninové šťávy, přesnídávky.

Dochází k velkým ztrátám vody a solí z organismu ileostomii, proto je nutné vypít 2,5 - 3 litry tekutin denně. Doporučuje se voda bez bublin, ovocné a bylinkové čaje. Jídlo si můžete dostatečně osolit. Jezte pravidelně 5 - 7x denně menší porce. Stravu dobře rozkousejte a jezte se zavřenými ústy. Jídelníček můžete doplnit kaloricky hodnotným potravinovým doplňkem např. Nutridrinkem. Většina pacientů se postupně naučí vhodnému a relativně normálnímu stravování jen s mírným omezením.

Drobné rady kolostomikům

- syrové ovoce, špenát, kysané zelí, káva, cukr a alkohol mohou být projímatavé
- luštěniny, sušené ovoce, ořechy, čokoláda, převařené mléko mohou způsobovat zácpu
- sýry, vejce, ryby, syrová cibule a česnek zvyšují zápach
- zelný salát, špenát, petržel a jogurty redukují zápach
- aromatické a plísňové sýry se hůře tráví
- luštěniny, tvrdá nebo syrová zelenina, syrový česnek a cibule mohou nadýmat
- některé léky a léčiva ovlivňují barvu a konzistenci stolice
- opiátová analgetika zpomalují peristaltiku a mohou způsobovat chronickou zácpu
- některá antibiotika, tablety železa a projímadla mohou způsobovat průjem
- léky proti nachlazení mají prodloužený účinek vstřebávání



- antikoncepční preparáty mohou mít oslabenou účinnost
- diureтика jsou léky močopudné a mohou způsobit dehydrataci organizmu
- železo, živočišné uhlí a borůvky zbarvují stolici do černa
- léky proti srážení krve zbarvují stolici do červena

Pojedete-li do zahraničí, vždy se informujte o hygienické situaci v dané oblasti. Preventivně používejte na pití, omývání ovoce a ústní hygienu pouze balenou vodu. Nedávejte si led do nápojů a nejezte zmrzlinu u stánků. Objeví-li se průjem, jezte pouze suché bílé pečivo a hodně pijte. Změna prostředí, typ stravování a stres mohou způsobit nepravidelné vyprazdňování a zvýšenou plynatost.

Na závěr mi dovolte poskytnout Vám ještě jednu radu:
Těšte se ze života a mějte radost z jídla.

Mgr. Iva Otradovcová, stomická sestra
Chirurgická klinika
2. LF UK a ÚVN Praha - Střešovice

Mgr. Lucie Kubátová, vrchní sestra
Chirurgická klinika
2. LF UK a ÚVN Praha - Střešovice

Sestro, co mohu pít?

První tři týdny po operaci téměř 16% pacientů s nově založenou ileostomií má problémy s vysokým odpadem ze stomie a až 27% z nich vyžaduje dlouhodobou lékařskou péči, aby se zabránilo komplikacím, jako je dehydratace, porucha vnitřního prostředí (minerálový rozvrat) a **akutní poškození ledvin**.

Při odpadu ze stomie vyšším než 1500 ml za den se objevují první příznaky dehydratace.

Typické známky dehydratace jsou únava, slabost, sucho v ústech, křeče v žaludku, svalové křeče, snížená tvorba moči (méně než 500 ml) nebo tmavá moč, rychlá ztráta hmotnosti, průjem nebo zvýšená produkce stomie, zvýšená žízeň a nízký krevní tlak.

Denně vstupuje do horní části tenkého střeva 7 – 8 litrů tekutin (nápoje, trávicí šťávy, apod.), ale většina je v tenkém střevě vstřebána zpět do krevního oběhu. Asi 1 - 1,5 l dále postupuje do tlustého střeva a pouze 150 - 200 ml se vylučuje stolicí. Ztráta tekutin a elektrolytů (sodík, chlorid,...) stomií tedy závisí na zbyvající délce střeva, tj. typu stomie. Nejvyšší riziko dehydratace je u jejunistomie, nejnižší u kolostomie.

Po období adaptace (3 týdny) se ztráta elektrolytů sníží asi o 70% a odpad z ileostomie klesá na průměrně 750 ml/den.

Zejména pacienti s ileostomií se musí naučit sledovat příjem a výdej tekutin a aktivně podle potřeby příjem tekutin upravovat.

Jak správně vypočítat bilanci tekutin, tj. příjem a výdej tekutin?

Příjem: Množství tekutin v ml nebo l, které denně přijmete ústy.

Výstup: Ztráty tekutin močí a stolicí.

Odpad z ileostomie by měl být minimálně 500 ml a ne více než 1200 ml za den. Běžný objem moči je přibližně 1 000 ml každých den.

Moč by měla být světle žluté barvy; tmavě žlutá (jantarová) barva moči může znamenat, že jste dehydratováni.

Je důležité si zapisovat přesné množství tekutin v ml. Zaznamenávání pouze toho, kolikrát byl vypuštěn stomický sáček, není objektivní informace, protože někdy můžeme vypustit stomický sáček plný pouze z $\frac{1}{2}$ nebo i $\frac{1}{4}$.

Pokud je odpad ze stomie dlouhodobě pod 1200 ml, můžeme měření přerušit a kontrolovat pouze pokud pozorujeme zvýšený výdej v důsledku průjmů nebo při akutním onemocnění (např. chřipce).

U ileostomie je optimální konzistence výměšků jako ovesná kaše. Barva se může lišit, ale pokud by měly barvu krve, je potřeba okamžitě kontaktovat lékaře. V případě, že je stomický obsah příliš tekutý, přidejte do své stravy bílé pečivo, těstoviny, Brambory, banány nebo rýži. Pomůže to obsah zahustit. Pokud je výstup z ileostomie menší než 300 ml za den, může být stolice příliš tvrdá a vylučování do stomického sáčku bolestivé.

Ztráty sodíku a draslíku jsou úměrné objemu tekutin vyloučených stomií. Nízký obsah sodíku (Na +) vede ke ztrátě chuti k jídlu, objevují se křeče v bříše, ospalost, malátnost. Proto v tomto případě doporučujeme nevyhýbat se soleným potravinám a mnohdy doporučujeme si stravu přisolit.

Potraviny bohaté na sodík jsou pekařské výrobky, včetně chleba a snídaňových cereálů. Dále to jsou maso, drůbeží výrobky, zpracované maso, uzeniny, mléčné výrobky zejména sýry, pikantní omáčky či ochucovadla.

Draslík

Nízký obsah draslíku (K +): únava, svalová slabost, pocit plynatosti, nafouklé břicho, dušnost, snížená citlivost paží a nebo nohou.

Potraviny bohaté na draslík: brambory, banány, avokádo, rajčatový protlak, čokoláda, káva, čaj, džusy (pomeranč, mrkev, rajče, zelenina).

Tekutiny

U člověka s plnou funkcí střeva se každý den ztrácí přibližně 2,5 litru tekutiny prostřednictvím plic (dýchání), kůže (pocení), ledvin (močení) a střev. Z tohoto stolicí se ztrácí pouze 100 mililitrů.

V případě ileostomie se potřeba tekutin odvíjí od objemu vyloučených tekutin stomií.

Doporučení:

Pijte o 1500 ml více tekutin než je odpad ze stomie, tj. cca 10 - 12 sklenic tekutiny denně. Vypijte sklenici vody pokaždé, když vyprázdníte stomický sáček. Pokud pijete alkohol nebo kofein, nahradte každou sklenici další sklenicí vody. S konzumací tekutin počkejte 30 - 45 minut po jídle. Pijte více tekutin dopoledne a časně po obědě, méně po 15. hodině.

Důležitým faktorem, který je třeba si uvědomit při udržování dostatečné hydratace je, že pocit žízně se s věkem snižuje. Užitečné je mít v dohledu např. džbán přesného objemu, který máme za úkol vypít dopoledne a následně odpoledne. Pokud jde o doplňování tekutin, je také důležité tekutinu opravdu pravidelně popít. Pokud vypijete rychle velké množství tekutiny, stomie ji i poměrně rychle vyloučí, aniž by se vstřebala.

Alkohol je silně močopudný a zvyšuje ztrátu tekutin z těla. Podobně působí i kofein. Na každý miligram spotřebovaného kofeinu se ztratí přibližně jeden mililitr tekutiny.

Proto, pokud jde o bilanci tekutin v těle, je nejlepší volbou voda. Pro ty, kteří nemají rádi chut' vody, může pomoci přidání malého množství čerstvé ovocné šťávy (limetka, citrón, jablečná, pomerančová nebo ananasová šťáva).

Příjem tekutin lze také zvýšit konzumací potravin s vysokým obsahem vody, jako je meloun, mango, štávnaté broskve a nektarinky a hrozny. Jen je potřeba mít na paměti, že mohou mít projímaté účinky a zvýšit odpad ze stomie.

K celkovému příjmu tekutin za den mohou také přispět mléčné nápoje a polévkы.

Nejčastější dotazy

První informace

Během pobytu v nemocnici vás odborně vyškolená stomická sestra naučí, jak postupovat při výměně sáčků a jak nejlépe pečovat o pokožku v okolí stomie. Před odchodem z nemocnice vám také poradí, kde získáte stomické pomůcky. Po určité době budete pozván(a) na kontrolu do nemocnice.

Kdo mi pomůcky předepřeší?

Pomůcky vám předepřeší v odborné ambulanci, a to na dobu maximálně tří měsíců. Stomická sestra vám ráda poradí při řešení případných problémů. Proto si návštěvu vždy předem dohodněte, aby se vám mohla plně věnovat. V případě, že ve vašem okolí není odborné pracoviště (stomická poradna), může stomické pomůcky předepsat také váš obvodní lékař.

Jak jsou stomické pomůcky hrazeny?

Všechny stomické pomůcky popsané v této brožuře jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami při dodržení kusového a finančního limitu na měsíc. U žádné ze stomických pomůcek není potřeba schválení revizního lékaře, pokud jsou dodrženy množstevní či finanční limity na měsíc.

Spotřeba pomůcek je upravena následujícími limity:

Stomické sáčky a podložky pro dospělé stomiky

	Jednodílný systém		Dvoudílný systém
	Sáčky / měsíc	Podložky / měsíc	Sáčky / měsíc
kolostomik	60 ks	10 ks	60 ks
ileostomik	30 ks	15 ks	30 ks
urostomik	30 ks	15 ks	30 ks

Stomické sáčky a podložky pro děti

Stomické sáčky a podložky s malou lepící plochou lze předepsat pro všechny typy stomí, stomíkům do 18 let ve stejném množství na měsíc jako u dospělých stomíků a dětem do 6 let v indikovaných případech až ve dvojnásobném množství oproti limitům pro dospělé. Od 19 let lze stomické sáčky a podložky s malou lepící plochou předepsat jen pokud tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou.

Úhradové limity platné od 1. 12. 2019

(Limity jsou uvedené v úhradových cenách včetně DPH 15%).

Kategorie	Pomůcky	Množstevní limit / měsíc v ks	Finanční limit / měsíc v úhrad. cenách v Kč	Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
03.08.01.01	Vkládací kroužky	60 ks - lze předepsat pouze s podložkou	5 382,00	Brava tvarovatelné kroužky, Brava Seal těsnící kroužky
03.08.01.02	Pásy vyrovnávací	120 ks - lze předepsat pouze s podložkou	9 660,00	Brava elastické vyrovnávací pásky
03.08.01.03	Adhezivní pasty a gely	1	8,97Kč/gram/výrobek	Brava adhezivní pasta, tuba, proužky, Coloplast adhezivní pasta
03.08.01.04	Destičky a roušky	není stanoven	0,46Kč/cm ² /výrobek	Brava ochranné strom. destičky
03.08.02.01	Stomické pásky přídržné	2/rok	200,10/kus	Brava pásek pro SenSura Mio, Coloplast pásek pro SenSura, Alterna
03.08.04.02	Odstraňovače stom. podložky silikonové [rouška nebo sprej]	není stanoven	500,25	Brava odstraňovač ve spreji a v ubrouscích
03.08.05.01	Pohlcovače pachu	není stanoven	349,60	Brava pohlcovač zápacu s lubrikačním účinkem
03.09.01.01	Ochranné (pudry, krémy, filmy, přídržné proužky)	není stanoven	1 000,50	Brava pudr, Brava ochranný krém, Brava ochranný film ve spreji a v ubrouscích, Coloplast ochranný krém, Prep ochranný film
03.09.02.01	Čisticí (roztoky, pěny, ubrousky)	není stanoven	300,15	Brava čisticí ubrousky, Coloplast roztok v lahvičce a v ubrouscích

Všechny pomůcky jsou plně hrazené v rámci množstevního a finančního limitu.

Co mám dělat v případě zvýšené spotřeby pomůcek?

V případě zvýšené spotřeby pomůcek (např. při průjmu apod.) je možné požádat revizního lékaře pojišťovny o navýšení limitu.

Pomůcky lze předepsat až na dobu tří měsíců.

Kde pomůcky získám?

Můžete využít bezplatnou zásilkovou službu, jejíž adresu najdete na konci této brožury. Stačí pouze zaslat rádně vyplněný poukaz (nezapomeňte, prosím, na váš podpis na jeho zadní straně) na uvedenou adresu a pomůcky obdržíte bezplatně obratem poštou. Můžete se též obrátit na lékárnu nebo výdejnu zdravotnických potřeb ve svém okolí.

Mohu se kupat se stomii?

Se stomií se můžete mýt, sprchovat a kupat ve vaně se sáčkem nebo bez něj. Unikátní lepící systém podložek SenSura Mio vám dovoluje kupat se i ve volné přírodě, ať už ve sladké nebo slané vodě. Aby nedošlo při koupání ke znehodnocení filtru na sáčku (u kolostomiků a ileostomiků), nezapomeňte ho vždy přelepit samolepkou, kterou najdete v balení.

Jak se mám oblekat?

Těsně po operaci noste raději volnější oděv. Později sami zjistíte, že díky diskrétním pomůckám SenSura Mio můžete nosit stejné oblečení jako před operací, protože sáček je pod oděvem takřka neznatelný.

Překáží stomie při tělesných aktivitách?

Se stomií můžete cvičit a aktivně se pohybovat jako před operací. Vyvarujte se však některých sportů, při kterých by mohlo dojít k poranění stomie (box, zápas, bojové sporty) a nadmernému namáhání břišní stěny (posilování ve fitness centrech).

Mohu se stomií cestovat?

Stomie není překážkou cestování. Abyste měli pocit jistoty, vezměte si vždy s sebou na cesty dostatečné množství sáčků a podložek, raději o něco více, než normálně potřebujete doma. Pokud cestujete do teplejších oblastí, počítejte s větší spotřebou. Stomické pomůcky mějte během cesty u sebe, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Mohu se stomií žít intimním životem?

Není třeba se intimního života vzdávat. Lidé si obyčejně myslí, že stomie je překážkou normálního pohlavního života. Možná, že právě vy jste jedním z nich. Stydíte se nebo se cítíte rozpačité, přestože váš partner stomii akceptuje a snaží se, abyste na ni zapomněli.

Před pohlavním stykem se doporučuje vyměnit sáček za rozměrově menší nebo použít speciální krytku, popřípadě změnit intimní polohu.



Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

Kdykoliv budete potřebovat nějakou informaci o výrobcích firmy Coloplast nebo o námi poskytovaných službách, jsme připraveni vám pomoci na následujících telefonních linkách:

Informace pro pacienty: bezplatná telefonní linka 800 100 416

Bezplatná informační linka funguje každý pracovní den od 8 do 16 hodin.



www.coloplast.cz

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba:

MALKOL CZO spol. s r.o., Bušovice 4, 338 24 Břasy 1

tel. 371 781 294

malkol@malkol.cz

Coloplast A/S, odštěpný závod, Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5

tel. 244 470 212

info@coloplast.cz, www.coloplast.cz

Zastoupení Praha:

MALKOL CZO spol. s r.o., Petržílkova 2706/30, 158 00 Praha 13

tel. 603 820 424

praha@malkol.cz

Zastoupení Brno:

MALKOL CZO spol. s r.o., Cejl 58, 602 00 Brno

tel. 543 215 769

brno@malkol.cz

Zastoupení Ostrava:

MALKOL CZO spol. s r.o., Domov sester při FNsP

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

tel. 597 374 166

Zastoupení Olomouc:

Zdravotní prodejna Komenského, Komenského 20, 772 00 Olomouc

tel. 585 242 082

olomouc@malkol.cz

Společnost Coloplast A/S děkuje za pomoc při přípravě tohoto materiálu sestrám, které se zabývají péčí o stomiky nebo nutričním poradenstvím: Mgr. Ivě Otradovcové, Mgr. Lucii Kubátové, Mgr. Petře Hýskové, Olze Tellerové a všem členkám poradního výboru Coloplast Ostomy Forum v České republice.



V roce 1954 se začal psát příběh společnosti Coloplast. Elise Sørensen je zdravotní sestrou. Její sestra Thora právě prodělala operaci, při níž jí byl vytvořen umělý vývod - stomie. Se stomí se Thora neodvažuje chodit ven, protože má strach, že se jí na veřejnosti stane nehoda a stomie podteče.

Elise naslouchá problémům, které její sestra má a vytvoří první samolepící stomický sáček na světě. Sáček, který nepodtéká, dává Thoře a tisícovkám lidí se stejným problémem šanci vrátit se k normálnímu životu.

Jednoduché řešení obrovského významu.

Dnes se zabýváme výrobou a distribucí nejen stomických pomůcek, ale také pomůcek pro urologické a inkontinentní pacienty a výrobků pro péči o kůži a hojení ran vlhkou cestou.

Způsob, kterým pracujeme, je však stále stejný jako to dělala Elise: nasloucháme, učíme se a na základě toho vytváříme produkty a služby, které usnadňují život lidem s intimními zdravotními potřebami.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám. Toto my nazýváme intimní zdravotní péčí.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © 2019-11
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko.

 **Coloplast**

Coloplast A/S
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
tel.: 244 470 212
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Informace pro pacienty:
bezplatná telefonní linka 800 100 416