

Pomůcky pro péči o kůži a další příslušenství



Coloplast

Brava®



Úvod

Kůžě v okolí stomie je velmi citlivá, protože je vystavena působení agresivních výměšků ze stomie a je vysoce zatížená neustálým nalepováním a odlepováním stomické pomůcky. Pro všechny stomiky je tedy péče o kůži velice důležitá, protože jedině na zdravé kůži drží stomická pomůcka dobře nalepená a stomik tak nemusí mít neustálé obavy z podtečení.

Coloplast nabízí řadu stomických pomůcek, které byly navrženy tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám stomiků. Tato nabídka zahrnuje také širokou škálu pomůcek a přípravků určených pro péči o kůži v okolí stomie, které čistí, zvlhčují a chrání kůži nebo poskytnou úlevu již poškozené kůži. Jsou vhodné pro všechny stomiky, kteří si chtějí udržet zdravou kůži v okolí stomie a používají se preventivně jako ochrana pro namáhanou kůži.

Do této skupiny pomůcek patří následující produkty pro péči o kůži v okolí stomie:

• Brava odstraňovač adheziv	str. 3
• Brava čisticí ubrousky s provitaminem B5 a roztok stomický	str. 4
• Brava ochranný film a Prep ochranný film	str. 5
• Brava bariérový krém	str. 6

Dále existují pomůcky pro stomiky, které jsou určeny pro všechny stomiky, kteří potřebují mimořádnou pomoc v okolí stomie a také pro ty, kteří chtějí prodloužit funkčnost stomické pomůcky.

Do této skupiny pomůcek patří následující příslušenství pro péči o stomie:

• Brava elasticke vyrovnávací pásky	str. 6
• Brava Seal těsnící vyrovnávací kroužky a Brava tvarovatelné kroužky	str. 7
• Brava pasta v tubě a proužcích, Coloplast pasta v tubě	str. 8
• Brava destičky stomické	str. 9
• Pohlcovač pachu Brava s lubrikačním účinkem	str. 9
• Brava pudr stomický	str. 10

Tyto pomůcky vám může předepsat váš ošetřující lékař nebo stomická sestra.

V případě nejasnosti se podívejte na:

• Limity pomůcek pro péči o kůži a příslušenství	str. 10 a 11
--	--------------

Tato brožura vám přináší přehled těchto pomůcek a popisuje, jak každou správně používat. Je velice důležité, abyste se informovali u stomické sestry nebo u vašeho ošetřujícího lékaře, které pomůcky jsou pro vás vhodné a mohou vám péci o stomii usnadnit. Tyto pomůcky vám může předepsat váš ošetřující lékař.

S dotazy ohledně správného použití těchto pomůcek se můžete obracet také na bezplatnou informační linku Péče o zákazníky společnosti Coloplast 800 100 416, kde vám poradí dvě vyškolené zdravotní sestry. Bezplatná telefonní linka funguje každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.



Péče o zákazníky
800 100 416
bezplatná informační linka

Pomůcky pro péči o kůži v okolí stomie

Brava odstraňovač adheziv

SÚKL kód sprej 5008108

SÚKL kód ubrousksy 5008107

Brava odstraňovač adheziv jednoduše odstraní z kůže stomickou podložku nebo stomický sáček a zbytky lepícího materiálu. Navíc tento přípravek nepálí, na kůži zaschně během pár vteřin a jeho použití nijak neovlivní bezpečné přilnutí dalšího stomického sáčku. Pro uživatele stomických pomůcek je Brava odstraňovač adheziv perfektním řešením velmi jemného odstranění pomůcky z kůže.

Výrobek je k dispozici ve spreji nebo v jednotlivě balených vlhčených ubrouscích na cesty.

Jak správně používat odstraňovač adheziv ve spreji Brava?

Nastříkejte odstraňovač podél okraje stomického lepícího materiálu. Nejlépe je začít u horního okraje. Sprej používejte ve svíslé poloze! Počkejte pár sekund a poté jemně odlepte stomický sáček nebo podložku směrem odshora dolů a druhou rukou přidržujte kůži.



Jak správně používat odstraňovač adheziv Brava v ubrouscích?

Pokud před sprejem dáte přednost použití odstraňovače Brava v ubrouscích, postup je následující: palcem a ukazovákem jedné ruky přichyt'te sáček za nelepivé ouško nahore a druhou rukou pomocí ubrousku shora postupně odlepujte sáček nebo podložku. Nebo můžete ubrousky také použít k docíštění kůže od případných zbytků lepícího materiálu.



Na poukaz je možné předepsat 2 kusy ve spreji na měsíc nebo 1 balení ubrousků po 30 ks na měsíc.

Odstraňovače na bázi silikonu jsou plně hrazené pojišt'ovnou do výše 500,- Kč za měsíc.

Brava čistící ubrousky s provitaminem B5 SÚKL kód 5008095

Brava čistící ubrousky jsou výhodné, protože kůži čistí a zároveň o ni pečují. Ubrousky jsou navrženy speciálně pro kůži kolem stomie, kterou očistí a připraví ji na nalepení nového sáčku. Navíc každý ubrousek obsahuje provitamin B5. Ten kůži zjemňuje a zvlhčuje. Tím pomáhá udržet kůži zdravou, omezuje začervenání a zlepšuje stav irritované kůže.



Jak správně používat Brava čistící ubrousky

Ubrousek vyjměte ze zásobníku a jemně s ním očistěte kůži kolem stomie. Zásobník opět dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly. Ubrousky lze používat místo mýdla a vody doma anebo je lze s výhodou použít na cestách mimo domov, kde není přístup ke zdroji vody a mýdla.

Na poukaz lze předepsat 4 zásobníky ubrousků na 3 měsíce. V každém zásobníku je 15 kusů ubrousků.

Čistící ubrousky Brava jsou plně hrazené pojišťovnou do výše 300,- Kč za měsíc.

Roztok stomický Coloplast

SÚKL kód lahvička 5008097

SÚKL kód ubrousky 5008096

Roztok stomický Coloplast je vynikající náhradou mýdla, vody nebo jiných prostředků, které používají stomici na očištění kůže.

Pomocí čistícího roztoku lze odstranit zbytky lepícího materiálu po použití odstraňovače adheziv. Navíc kůži dokonale očistí od různých nečistot před nalepením nové pomůcky.

Roztok stomický Coloplast je k dispozici v lahvičce nebo v jednotlivě balených ubrouscích. Po použití roztoku není nutné již oplachovat kůži vodou.



Jak správně používat roztok stomický?

Roztok v lahvičce nanášejte na jednorázový papírový ubrousek nebo kosmetický tampon. Jednotlivě balené ubrousky jsou připravené k okamžitému použití po vybalení.

Na poukaz lze na 3 měsíce předepsat 4 lahvičky roztoku nebo 3 balení ubrousků do maximální výše 900,- Kč na 3 měsíce.

Brava ochranný film (bez alkoholu)

SÚKL kód sprej 5008092

SÚKL kód ubrousky 5008091

Brava ochranný film účinně chrání kůži před působením agresivních výměšků nebo moči a neustálým nalepováním stomického sáčku. Vytvoří ochrannou bariéru na kůži a nevyvolává pocit pálení. Zaschně během pář vteřin a zanechá po sobě jemnou tenkou vrstvu, která umožňuje kůži dýchat.

Jak správně používat ochranný film

Brava ve spreji?

Před aplikací filmu musí být kůže kolem stomie čistá a suchá.

Sprej nastríkejte rovnomořně na kůži kolem stomie ze vzdálenosti cca 10 cm. Po několika vteřinách se vytvoří ochranná vrstva. Poté můžete nalepit stomický sáček jako obvykle. Ochranný film je třeba aplikovat při každé výměně sáčku. Před použitím obsah protřepejte.

Jak správně používat ochranný film

Brava v ubrouscích?

Před nalepením nové pomůcky potřete kůži ubrouskem, který během pář vteřin vytvoří ochrannou vrstvu na kůži.

Na pouzaz lze na jeden měsíc předepsat 2 kusy ochranného filmu ve spreji nebo 2 balení ubrousků po 30 ks. Ochranné pomůcky lze předepsat až do výše 3000,- Kč na 3 měsíce.



Prep ochranný film (obsahuje alkohol)

SÚKL kód 5008089

Prep ochranný film chrání kůži před podrážděním způsobeným výměšky a močí. Na kůži se vytvoří viditelná ochranná vrstva, která zvyšuje přilnavost sáčku a snižuje riziko podtečení.

Jak správně používat Prep film?

Po očištění čisticím roztokem potřete kůži Prep ubrouskem. Až se vytvoří viditelná ochranná vrstva, nalepte pomůcku.

Ochranné pomůcky lze předepsat až do výše 3000 Kč na 3 měsíce.



Krém bariérový Brava

SÚKL kód 5008099

Brava bariérový krém je ideálním prostředkem pro stomiky se suchou nebo podrážděnou kůží. Udržuje optimální pH kůže a zároveň ji zjemnuje, čímž napomáhá hojení poškozené kůže. Hodí se zároveň pro všechny stomiky, kteří ho mohou používat preventivně a předejít tak možnému poškození kůže. Při pravidelném používání ochranného krému je kůže vláčná a zvýší se její odolnost vůči výměškům ze stomie.



Jak správně používat ochranný bariérový krém Brava?

Bariérový krém nanášejte vždy na suchou a stomickým roztokem očištěnou kůži. Ideálně jej nechte několik minut působit a poté odsajte případnou přebytečnou vlhkost papírovým kapesníčkem. Protože je tento krém vyroben na bázi gelu, nezanechává na kůži mastný film a nalepená pomůcka tedy dobře drží.

Bariérový krém lze předepsat dle potřeby, je plně hrazený pojíšťovnou v rámci limitu na ochranné pomůcky, který je maximálně 1000 Kč na měsíc.

Příslušenství pro péči o stomie

Elastické vyrovnávací pásky Brava

- půlkruh SÚKL kód 5008129
- rovný tvar SÚKL kód 5008127
- půlkruh s postranními výběžky SÚKL kód 5008123
- půlkruh XL SÚKL kód 5008125

Elastické vyrovnávací pásky Brava brání možnému rolování lepícího materiálu a odlepování od okrajů. Lze je také použít pro zvýšení pocitu bezpečí, protože drží sáček pevně na svém místě, například při sportovních aktivitách apod. Jsou tak pružné, že se přizpůsobí pohybům a tvaru těla. Neobsahují alkohol a nedráždí kůži.

Jsou plně hrazené pojíšťovnou, lze je předepsat na poukaz pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem do max. výše 120 ks na měsíc dle indikací ošetřujícího lékaře. Vyberte si, jaký tvar pásky potřebujete, aby se vám hodil k podložce nebo k tělesným křivkám v okolí stomie.



Brava Seal těsnící vyrovnávací kroužek

SÚKL kód 5008131 - tloušťka 2,5mm, Ø 18mm
SÚKL kód 5008133 - tloušťka 2,5mm, Ø 27mm
SÚKL kód 5008135 - tloušťka 2,5mm, Ø 34mm
SÚKL kód 5008140 - tloušťka 4,2mm, Ø 18mm
SÚKL kód 5008141 - tloušťka 4,2mm, Ø 27mm
SÚKL kód 5008143 - tloušťka 4,2mm, Ø 34mm

Brava Seal těsnící vyrovnávací kroužek pomáhá pokud máte výrazné jizvy a hluboké kožní řasy, nepravidelný tvar stomie, vlhké okolí stomie nebo pokud se podložka vlivem kontaktu s výměšky příliš brzo rozpadá. Kroužek se snadno tvaruje, vytvoří bezpečné těsnění mezi stomií a podložkou, chrání před nalepáním a udržuje kůži zdravou.



Jak správně používat těsnící vyrovnávací kroužky Brava Seal?

Kroužek se vytvaruje prsty a roztáhne na požadovaný tvar. Poté se aplikuje na kůži kolem stomie. Kroužek se může aplikovat také na podložku před nalepením na kůži.

Kroužky jsou plně hrazené pojíšťovnou, lze je předepsat pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem v maximálním množství 60 ks na měsíc.



Brava tvarovatelné těsnící kroužky

SÚKL kód 5008150 - tloušťka 2,0 mm

SÚKL kód 5008146 - tloušťka 4,2 mm

Brava kroužek vytváří bezpečné utěsnění kolem stomie. Chrání nejbližší okolí stomie před podtečením.

Jak správně používat Brava těsnící tvarovatelný kroužek?

Kroužek se vytvaruje prsty do požadovaného tvaru a nalepí na kůži kolem stomie. Poté se aplikuje stomický sáček jako obvykle.

Kroužky jsou plně hrazené pojíšťovnou, lze je předepsat pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem v maximálním množství 60 ks na měsíc.



Adhezivní pasta Brava

Adhezivní pasta dokonale chrání před účinky střevního obsahu, snižuje riziko podtékání a prodlužuje životnost podložky. Používá se k vyrovnání jizev, kožních záhybů a jiných nerovností okolo stomí a pštělí. Používá se také k utěsnění kolem stomie. Pasta se lépe aplikuje navlhčenými prsty. Adhezivní pasty v tubě i proužcích jsou plně hrazené a lze předepsat maximálně 1 balení na 1 měsíc.



Brava adhezivní pasta v tubě

SÚKL kód 5008121

Brava pasta v tubě neobsahuje alkohol, proto je velmi šetrná k pokožce v okolí stomie, nevyvolává pálení ani svědění.

Jak správně používat pastu v tubě?

Po vystrížení otvoru do sáčku nebo podložky, vytlačte pastu po celém vnitřním obvodu otvoru na sáčku nebo podložce a poté nalepte na tělo. Pasta dokonale utěsní okolí stomie a tím sníží riziko podtékání. Dále je možné nanést pastu přímo na tělo před nalepením.



Brava pasta v proužcích

SÚKL kód 5008120

Balení Brava pasty v proužcích umožňuje mít u sebe pouze nezbytné nutné množství pasty. Pasta v proužcích také neobsahuje alkohol a proto kůži nedráždí.

Coloplast adhezivní pasta v tubě

(obsahuje alkohol)

SÚKL kód 5008117

Adhezivní pasta dokonale chrání před účinky střevního obsahu, snižuje riziko podtékání a prodlužuje životnost podložky. Používá se k vyrovnání jizev, kožních záhybů a jiných nerovností okolo stomí a pštělí. Používá se také k utěsnění kolem stomie. Pasta se lépe aplikuje navlhčenými prsty.



Destičky stomické Brava

vel. 10x10 cm SÚKL kód 5008109
vel. 15x15 cm SÚKL kód 5008112
vel. 20x20 cm SÚKL kód 5008113
vel. 200x10 cm SÚKL kód 5008115

Destičky stomické se používají tam, kde hrozí riziko nebo již došlo k poškození kůže tělními sekrety. Jedná se především o okolí stomí zvláště vpadlých nebo na úrovni kůže, pštělí a drenáží. Jsou samolepící, tenké, ohebné, na kůži nezanechávají zbytky a prodlužují životnost podložky. Destičku lze vystríhnout dle velikosti stomie, nalepit na kůži a na ni nalepit podložku nebo rovnou sáček u jednodílného systému.



Jak správně používat stomickou destičku?

Odstraňte papír z nelepivé strany destičky. Nejprve ohněte růžek, uchopte ochranný papír a tahem ho odstraňte. Vyznačte požadovanou velikost otvoru pro stomii (pomocí tužky). Nůžkami vystríhněte požadovanou velikost otvoru pro stomii podle vámi vyznačené šablony. Odstraňte ochranný papír z lepící strany destičky. Je velmi důležité předem odstranit všechny chloupky z místa, kam destičku budete chtít nalepit. Poté nalepte destičku kolem stomie lepící stranou. Teprve na destičku nalepte stomickou pomůcku.

Destička stomická je plně hrazená pojišťovnou a lze ji předepsat dle potřeb stomika a rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Pohlcovač pachu Brava deodorant (s lubrikačním účinkem) SÚKL kód 5008106

Moderní Brava lubrikační deodorant neutralizuje zápach a zároveň účinkuje jako lubrikant. Tak si můžete být jistí, že výměšky jsou vždy na dně stomického sáčku a nikoliv kolem vašeho vývodu. To také usnadňuje vyprázdnění sáčku.

Brava lubrikační deodorant je plně hrazený pojišťovnou a v rámci měsíčního limitu 349,60 Kč lze předepsat jednu lahvičku.



Jak správně používat Brava deodorant?

Nakapejte 5 - 10 ml do stomického sáčku a sáček jemně promněte mezi prsty, aby se Brava lubrikační deodorant rovnoměrně rozšířil v sáčku. Používáte-li výpustný sáček, můžete přidat deodorant také přes výpust. Po vyprázdnění sáčku proces opakujte.

Brava stomický pudr SÚKL kód 5008102

Pudr stomický Brava se používá na macerovanou kůži v okolí stomie.

Macerovaná kůže potřebuje čas pro zhojení a je velmi nutné, aby před aplikací lepícího materiálu na stomické pomůcky byla kůže suchá. Jen tak lze předejít další maceraci.

Brava stomický pudr má vynikající schopnost absorbovat vlhkost, efektivně absorbuje exsudát. Udržuje kůži v okolí stomie suchou a redukuje další podráždění kůže. Lehké zapudrování vsákne nadměrnou vlhkost, která by mohla ovlivnit účinnost přilnutí lepícího materiálu na stomické pomůcky ke kůži. Nadbytečný pudr se poté setře.



Jak správně používat stomický pudr Brava?

Pudr se nanáší na očištěnou kůži před nalepením nové pomůcky. Po aplikaci je nutné několik minut počkat, aby pudr absorboval vlhkost a poté odstranit nadbytečné množství, jinak pomůcka nepřilne ke kůži. Na pokožku není možné použít zároveň pudr a ochranný film. Přes ochrannou vrstvu, kterou vytváří ochranný film, se pudr nedostane ke kůži a proto nemá žádný účinek.

Pudr stomický Brava je plně hrazen pojišťovnou a patří do skupiny ochranných pomůcek, kde je měsíční limit max. do výše 1000,- Kč.

Úhradové limity platné od 1. 12. 2019

(Limity jsou uvedené v úhradových cenách včetně DPH 15%).

Kategorie	Pomůcky	Množstevní limit / měsíc v ks	Finanční limit/měsíc v úhrad. cenách v Kč	Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
03.08.01.01	Vkládací kroužky	60 ks - lze předepsat pouze s podložkou	5 382,00	Brava tvarovatelné kroužky, Brava Seal těsnící kroužky
03.08.01.02	Pásy vyrovnávací	120 ks - lze předepsat pouze s podložkou	9 660,00	Brava elastické vyrovnávací pásky
03.08.01.03	Adhezivní pasty a gely	1	8,97Kč/gram/výrobek	Brava adhezivní pasta, tuba, proužky, Coloplast adhezivní pasta
03.08.01.04	Destičky a roušky	není stanoven	0,46Kč/cm ² /výrobek	Brava ochranné strom. destičky
03.08.02.01	Stomické pásky přídržné	2/rok	200,10/kus	Brava pásek pro SenSura Mio, Coloplast pásek pro SenSura, Alterna
03.08.04.02	Odstraňovače strom. podložky silikonové [rouška nebo sprej]	není stanoven	500,25	Brava odstraňovač ve spreji a v ubrouscích
03.08.05.01	Pohlcovače pachu	není stanoven	349,60	Brava pohlcovač zápacu s lubrikačním účinkem
03.09.01.01	Ochranné [pudry, krémy, filmy, přídržné proužky]	není stanoven	1 000,50	Brava pudr, Brava ochranný krém, Brava ochranný film ve spreji a v ubrouscích, Coloplast ochranný krém, Prep ochranný film
03.09.02.01	Čistící [roztoky, pěny, ubrousky]	není stanoven	300,15	Brava čisticí ubrousky, Coloplast roztok v lahvičce a v ubrouscích

Všechny pomůcky jsou plně hrazené v rámci množstevního a finančního limitu.

Péče o stomie a ostatní příslušenství

Prostředky ochranné / Destičky a roušky

Počet balení jednotlivých produktů se určuje dle cen produktů, které se scítají do max. limitu 3001,50 Kč / 3 měsíce.

SÚKL kód	Prostředky stomické - ochranné a destičky stomické	Úhrada pojištoven	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Trimestrový limit v Kč
5008092	Film ochranný Brava, sprej, 50 ml, 1 ks/bal.	P	6	484,60	
5008091	Film ochranný Brava, ubrousny, 30 ks/bal.	P	6	500,00	
5008089	Prep ochranný film Coloplast, ubrousny, 30 ks/bal.	P	6	500,00	
5008099	Krém bariérový Brava, tuba, 60 ml, 1 ks/bal.	P	14	201,30	3001,50
5008098	Krém bariérový Coloplast, tuba, 60 ml, 1 ks/bal.	P	16	180,25	
5008102	Pudr Brava 25 g, 1 ks/bal.	P	5	556,46	
5008109	Destička stomická Brava, 10 x 10 cm, 10 ks/bal.	P	dle potřeby	460,00	není stanoven cena za 1cm ² nesmí být vyšší než 0,46 Kč
5008112	Destička stomická Brava, 15 x 15 cm, 5 ks/bal.	P	dle potřeby	517,50	
5008113	Destička stomická Brava, 20 x 20 cm, 5 ks/bal.	P	dle potřeby	920,00	
5008115	Destička stomická Brava, 200 x 10 cm, 1 ks/bal.	P	dle potřeby	920,00	

Odstraňovače stomické podložky silikonové / Prostředky čisticí

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištoven	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Trimestrový limit v Kč
5008108	Odstraňovač adheziv Brava, sprej, 50 ml, 1 ks/bal.	P	6	249,41	
5008107	Odstraňovač adheziv Brava, ubrousny, 30 ks/bal.	P	3	495,94	1 500,75
5008095	Ubrousny čisticí Brava, s provitaminem B5, 15 ks v zásobníku	P	4	208,05	
5008097	Roztok stomický Coloplast, lahvička, 180 ml, 1 ks/bal.	P	4	198,08	900,45
5008096	Roztok stomický Coloplast, ubrousny, 30 ks/bal.	P	3	299,72	

Adhezivní pasty / Vkládací kroužky / Vyrovnávací pásky

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištoven	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Trimestrový limit v ks
5008121	Pasta adhezivní Brava, tuba, 60 g, 1 ks/bal.	P	3	459,00	
5008120	Pasta adhezivní Brava, proužky, 60 g, 10 ks/bal.	P	3	442,67	3
5008117	Pasta adhezivní Coloplast, tuba, 60 g, 1 ks/bal.	P	3	227,30	
5008131	Kroužek Brava tvarovatelný, tloušťka 2 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 691,00	
5008133	Kroužek Brava tvarovatelný, tloušťka 4,2 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 691,00	
5008135	Kroužek těsnící Brava Seal, tloušťka 2,5 mm, ø18 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 691,00	max. 180 ks, lze předepsat pouze s podložkou (podložka=1D nebo 2D systém)
5008140	Kroužek těsnící Brava Seal, tloušťka 2,5 mm, ø27 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 691,00	
5008141	Kroužek těsnící Brava Seal, tloušťka 2,5 mm, ø34 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 691,00	
5008143	Kroužek těsnící Brava Seal, tloušťka 4,2 mm, ø18 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 691,00	
5008150	Kroužek těsnící Brava Seal, tloušťka 4,2 mm, ø27 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 518,14	
5008146	Kroužek těsnící Brava Seal, tloušťka 4,2 mm, ø34 mm, 30 ks/bal.	P	6	2 518,14	
5008129	Pásek vyrovnávací elastický Brava, 20 ks/bal.	P	18	1 158,65	max. 360 ks, lze předepsat pouze s podložkou (podložka=1D nebo 2D systém)
5008123	Pásek Brava, půlkruh s postranními výběžky, 20 ks	P	18	1 610,00	
5008127	Pásek vyrovnávací elastický Brava, rovný tvar, 20 ks	P	18	1 157,84	
5008125	Pásek vyrovnávací Brava XL, 20 ks	P	18	1 599,49	

Pohlcovače

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištoven	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Trimestrový limit v Kč
5008106	Brava lubrikační deodorant, 240 ml, 1 ks/bal.	P	3	349,60	1 048,80



V roce 1954 se začal psát příběh společnosti Coloplast. Elise Sørensen je zdravotní sestrou. Její sestra Thora právě prodělala operaci, při níž jí byl vytvořen umělý vývod - stomie. Se stomií se Thora neodvážuje chodit ven, protože má strach, že se jí na veřejnosti stane nehoda a stomie podteče.

Elise naslouchá problémům, které její sestra má a vytvoří první samolepící stomický sáček na světě. Sáček, který nepodteká, dává Thoře a tisícovkám lidí se stejným problémem šanci vrátit se k normálnímu životu.

Jednoduché řešení obrovského významu.

Dnes se zabýváme výrobou a distribucí nejen stomických pomůcek, ale také pomůcek pro urologické a inkontinentní pacienty a výrobků pro péči o kůži a hojení ran vlnhou cestou.

Způsob, kterým pracujeme, je však stále stejný jako to dělala Elise: nasloucháme, učíme se a na základě toho vytváříme produkty a služby, které usnadňují život lidem s intimními zdravotními potřebami.

Péče o zákazníky
800 100 416
bezplatná informační linka

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám. Toto my nazýváme intimní zdravotní péčí.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © 2019-12
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko.



Coloplast A/S
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
tel. 244 470 212
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Péče o zákazníky:
bezplatná informační linka **800 100 416**