

Pomůcky pro péči o kůži a další příslušenství

 Coloplast

Brava®



Úvod

Kůže v okolí stomie je velmi citlivá, protože je vystavena působení agresivních výměšků ze stomie a je vysoce zatížená neustálým nalepováním a odlepováním stomické pomůcky. Pro všechny stomiky je tedy péče o kůži velice důležitá, protože jedině na zdravé kůži drží stomická pomůcka dobře nalepená a stomik tak nemusí mít neustálé obavy z podtečení.

Coloplast nabízí řadu stomických pomůcek, které byly navrženy tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám stomiků. Tato nabídka zahrnuje také širokou škálu pomůcek a přípravků určených pro péči o kůži v okolí stomie, které čistí, zvlhčují a chrání kůži nebo poskytnou úlevu již poškozené kůži. Jsou vhodné pro všechny stomiky, kteří si chtějí udržet zdravou kůži v okolí stomie.

Do této skupiny pomůcek patří následující produkty pro péči o kůži v okolí stomie:

- Brava® odstraňovač adheziv str. 3
- Brava® čistící ubrousky s provitaminem B5 a Comfeel™ čistící roztok str. 4
- Brava® ochranný film a Prep ochranný film str. 5
- Brava® bariérový krém a Comfeel bariérový krém str. 6

Dále existují pomůcky pro stomiky, které jsou určeny všem, kteří potřebují mimořádnou pomoc v okolí stomie a také pro ty, kteří chtějí prodloužit funkčnost stomické pomůcky.

Do této skupiny pomůcek patří následující příslušenství pro péči o stomie:

- Brava® stomický pudr str. 6
- Brava® elastické vyrovnávací pásy str. 7
- Brava® Seal těsnící vyrovnávací kroužky a Brava® tvarovatelné kroužky str. 8
- Brava® Protective Seal Convex, konvexní kroužky str. 9
- Brava® pasta v tubě a proužcích, Coloplast pasta v tubě str. 10
- Coloplast stomické ochranné destičky str. 11
- Brava® lubrikační deodorant str. 11

V případě nejasností ohledně předpisu pomůcek pro péči o kůži a příslušenství se podívejte na:

- Limity pomůcek pro péči o kůži a příslušenství str. 14 - 15

Tato brožura vám přináší přehled těchto pomůcek a popisuje, jak každou správně používat. Je velice důležité, abyste se informovali u stomické sestry nebo u vašeho ošetřujícího lékaře, které pomůcky jsou pro vás vhodné a mohou vám péči o stomii usnadnit. Tyto pomůcky vám může předepsat váš ošetřující lékař.

S dotazy ohledně správného použití těchto pomůcek se můžete obracet také na bezplatnou informační linku Péče o klienty společnosti Coloplast 800 100 416, kde vám poradí vyškolené zdravotní sestry. Bezplatná telefonní linka funguje každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.



Pomůcky řady Brava, Coloplast, Comfeel a Prep jsou zdravotnické prostředky určené k péči o stomie.

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

Video návody k použití naleznete na YouTube kanálu Coloplast Česká republika.

Pomůcky pro péči o kůži v okolí stomie

Brava® odstraňovač adheziv

SÚKL kód sprej 5008108

SÚKL kód ubrousky 5008107

Brava® odstraňovač adheziv jednoduše odstraní z kůže stomickou podložku nebo stomický sáček a zbytky lepicího materiálu. Navíc tento přípravek nepálí, na kůži zaschne během pár vteřin a jeho použití nijak neovlivní bezpečné přilnutí dalšího stomického sáčku. Pro uživatele stomických pomůcek je Brava® odstraňovač adheziv perfektním řešením velmi jemného odstranění pomůcky z kůže.

Výrobek je k dispozici ve spreji nebo v jednotlivě balených vlhčených ubrouscích na cesty.

Jak správně používat odstraňovač adheziv ve spreji Brava®?

Nastříkejte odstraňovač podél okraje stomického lepicího materiálu. Nejlépe je začít u horního okraje. Sprej používejte ve svislé poloze! Počkejte pár sekund a poté jemně odlepte stomický sáček nebo podložku směrem odshora dolů a druhou rukou přidržíte kůži.

Jak správně používat odstraňovač adheziv Brava® v ubrouscích?

Pokud před sprejem dáte přednost použití odstraňovače Brava® v ubrouscích, postup je následující: palcem a ukazovákem jedné ruky přichytíte sáček za nelepivé ouško nahoře a druhou rukou pomocí ubrousku shora postupně odlepujete sáček nebo podložku. Nebo můžete ubrousky také použít k dočištění kůže od případných zbytků lepicího materiálu.

Na poukaz je možné předeepsat 2 kusy ve spreji na měsíc nebo 1 balení ubrousků po 30 ks na měsíc. Odstraňovače na bázi silikonu jsou plně hrazené pojišťovnou do výše 487,20 Kč za měsíc.



Brava® čistící ubrousky s provitaminem B5 SÚKL kód 5008095

Brava® čistící ubrousky jsou výhodné, protože kůži čistí a zároveň o ni pečují. Ubrousky jsou navrženy speciálně pro kůži kolem stomie, kterou očistí a připraví ji na nalepení nového sáčku. Navíc každý ubrousek obsahuje provitamin B5. Ten kůži zjemňuje a zvlhčuje. Tím pomáhá udržet kůži zdravou, omezuje začervenání a zlepšuje stav iritované kůže.



Jak správně používat Brava® čistící ubrousky

Ubrousek vyjměte ze zásobníku a jemně s ním očistěte kůži kolem stomie. Zásobník opět dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly. Ubrousky lze používat místo mýdla a vody doma anebo je lze s výhodou použít na cestách mimo domov, kde není přístup ke zdroji vody a mýdla.

Na poukaz lze předepsat 4 zásobníky ubrousků na 3 měsíce. V každém zásobníku je 15 kusů ubrousků.

Čistící ubrousky Brava® jsou plně hrazené pojišťovnou do výše 292,32 Kč za měsíc.

Comfeel™ čistící roztok SÚKL kód lahvička 5008097 SÚKL kód ubrousky 5008096

Comfeel™ čistící roztok je vynikající náhradou mýdla, vody nebo jiných prostředků, které používají stomici na očistění kůže.

Pomocí čistícího roztoku lze odstranit zbytky lepicího materiálu po použití odstraňovače adheziv. Navíc kůži dokonale očistí od různých nečistot před nalepením nové pomůcky. Comfeel™ čistící roztok je k dispozici v lahvičce nebo v jednotlivě balených ubrouscích. Po použití roztoku není nutné již oplachovat kůži vodou.



Jak správně používat čistící roztok?

Roztok v lahvičce nanášejte na jednorázový papírový ubrousek nebo kosmetický tampon. Jednotlivě balené ubrousky jsou připravené k okamžitému použití po vybalení.

Na poukaz lze na 3 měsíce předepsat 4 lahvičky roztoku nebo 3 balení ubrousků do maximální výše 876,96 Kč na 3 měsíce.

Brava® ochranný film (bez alkoholu)

SÚKL kód sprej 5008092

SÚKL kód ubrousky 5008091

Brava® ochranný film účinně chrání kůži před působením agresivních výměšků nebo moči a neustálým nalepováním stomického sáčku. Vytvoří ochrannou bariéru na kůži a nevyvolává pocit pálení. Zaschne během pár vteřin a zanechá po sobě jemnou tenkou vrstvu, která umožňuje kůži dýchat.

Jak správně používat ochranný film Brava® ve spreji?

Před aplikací filmu musí být kůže kolem stomie čistá a suchá.

Sprej nastříkejte rovnoměrně na kůži kolem stomie ze vzdálenosti cca 10 cm. Po několika vteřinách se vytvoří ochranná vrstva. Poté můžete nalepit stomický sáček jako obvykle. Ochranný film je třeba aplikovat při každé výměně sáčku. Před použitím obsah protřepejte.

Jak správně používat ochranný film Brava® v ubrouscích?

Před nalepením nové pomůcky potřete kůži ubrouskem, který během pár vteřin vytvoří ochrannou vrstvu na kůži.

Na poukaz lze na jeden měsíc předepsat 2 kusy ochranného filmu ve spreji nebo 2 balení ubrousků po 30 ks. Ochranné pomůcky lze předepsat až do výše 2923,20 Kč na 3 měsíce.



Prep film (obsahuje alkohol)

SÚKL kód 5008089

Prep ochranný film chrání kůži před podrážděním způsobeným výměšky a močí. Na kůži se vytvoří viditelná ochranná vrstva, která zvyšuje přilnavost sáčku a snižuje riziko podtečení.

Jak správně používat Prep film?

Po očištění čistícím roztokem potřete kůži Prep ubrouskem. Až se vytvoří viditelná ochranná vrstva, nalepte pomůcku.

Ochranné pomůcky lze předepsat až do výše 2923,20 Kč na 3 měsíce.



Brava® bariérový krém
SÚKL kód 5008099
Comfeel™ bariérový krém
SÚKL kód 5008098

Bariérový krém je ideálním prostředkem pro stomiky se suchou nebo podrážděnou kůží. Udržuje optimální pH kůže a zároveň ji zjemňuje, čímž napomáhá hojení poškozené kůže. Hodí se zároveň pro všechny stomiky, kteří ho mohou používat preventivně a předejít tak možnému poškození kůže. Při pravidelném používání ochranného krému je kůže vládná a zvýší se její odolnost vůči výměškům ze stomie.



Jak správně používat ochranný bariérový krém?

Bariérový krém nanášejte vždy na suchou a stomickým roztokem očištěnou kůži. Ideálně jej nechte několik minut působit a poté odsajte případnou přebytečnou vlhkost papírovým kapesníčkem.

Bariérový krém lze předepsat dle potřeby, je plně hrazený pojišťovnou v rámci limitu na ochranné pomůcky, který je maximálně 974,40 Kč na měsíc.

Brava® stomický pudr
SÚKL kód 5008102

Brava® stomický pudr se používá na macerovanou kůži v okolí stomie. Macerovaná kůže potřebuje čas pro zhojení a je velmi nutné, aby před aplikací lepicího materiálu na stomické pomůcce byla kůže suchá. Jen tak lze předejít další maceraci. Brava stomický pudr má vynikající schopnost absorbovat vlhkost, efektivně absorbuje exsudát. Udržuje kůži v okolí stomie suchou a redukuje další podráždění kůže. Lehké zapudrování vsákne nadměrnou vlhkost, která by mohla ovlivnit účinnost přilnutí lepicího materiálu na stomické pomůcce ke kůži. Nadbytečný pudr se poté setře.



Jak správně používat stomický pudr Brava®?


Pudr se nanáší na očištěnou kůži před nalepením nové pomůcky. Po aplikaci je nutné několik minut počkat, aby pudr absorboval vlhkost a poté odstranit nadbytečné množství, jinak pomůcka nepřilne ke kůži. Na pokožku není možné použít zároveň pudr a ochranný film. Přes ochrannou vrstvu, kterou vytváří ochranný film, se pudr nedostane ke kůži a proto nemá žádný účinek.

Brava® stomický pudr je plně hrazen pojišťovnou a patří do skupiny ochranných pomůcek, kde je měsíční limit max. do výše 974,40 Kč.

Elastické vyrovnávací pásky Brava®

- půlkruh - SÚKL kód 5008129
- I rovný tvar - SÚKL kód 5008127
- půlkruh s postranními výběžky - SÚKL kód 5008123
- půlkruh XL - SÚKL kód 5008125

Elastické vyrovnávací pásky Brava brání možnému rolování lepicího materiálu a odlepování od okrajů. Lze je také použít pro zvýšení pocitu bezpečí, protože drží sáček pevně na svém místě. Jsou tak pružné, že se přizpůsobí pohybům a tvaru těla. Neobsahují alkohol a nedráždí kůži. Elastické vyrovnávací pásky Brava lze předepsat na poukaz, jsou plně hrazené pojišťovnou a lze je předepsat jen s 1D sáčkem nebo 2D podložkou, max. 120 ks měsíčně dle indikací lékaře. Vyberte si, jaký tvar pásky potřebujete, aby se vám hodil k podložce nebo k tělesným křivkám v okolí stomie. Pro ještě vyšší pocit bezpečí nabízíme také rozměrově širší pásky Brava XL.

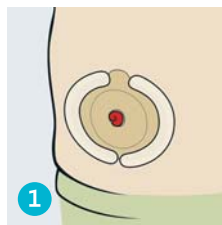


1) Půlkroužky se hodí k zajištění oválných nebo kulatých podložek. Půlkroužky XL se hodí k zajištění větších konkávních podložek anebo i standardních podložek pro větší pocit bezpečí.

2) Rovný tvar se hodí k zajištění čtvercových podložek.



3) Půlkroužky s postranním výběžkem zvyšují pocit bezpečí, pokud je okolí stomie komplikované, např. stomie v kýle, jizvy, kožní řasy a záhyby.

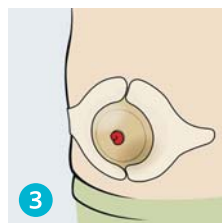

Jak správně používat elastické vyrovnávací pásky Brava®.

Pásky Brava můžete nalepit po celém obvodu podložky a tím zvýšit váš pocit bezpečí nebo je můžete použít jen v některých místech, kde je podložka více namáhaná a hrozí tedy vyšší riziko odlepování okrajů. Část pásky musí vždy překrývat již nalepenou podložku a část je přilepena na kůži, jak ukazují obrázky.

Brava® Seal těsnící vyrovnávací kroužek
 SÚKL kód 5008131 - tloušťka 2,5mm, Ø 18mm
 SÚKL kód 5008133 - tloušťka 2,5mm, Ø 27mm
 SÚKL kód 5008135 - tloušťka 2,5mm, Ø 34mm
 SÚKL kód 5008140 - tloušťka 4,2mm, Ø 18mm
 SÚKL kód 5008141 - tloušťka 4,2mm, Ø 27mm
 SÚKL kód 5008143 - tloušťka 4,2mm, Ø 34mm

Brava® Seal těsnící vyrovnávací kroužek pomáhá pokud máte výrazné jizvy a hluboké kožní řasy, nepravidelný tvar stomie, vlhké okolí stomie nebo pokud se podložka vlivem kontaktu s výměškou příliš brzo rozpadá. Kroužek se snadno tvaruje, vytvoří bezpečné těsnění mezi stomií a podložkou, chrání před podtékáním a udržuje kůži zdravou.

Jak správně používat těsnící vyrovnávací kroužky Brava® Seal?

Kroužek se vytvaruje prsty a roztáhne na požadovaný tvar. Poté se aplikuje na kůži kolem stomie. Kroužek se může aplikovat také na podložku před nalepením na kůži.

Kroužky jsou plně hrazené pojišťovnou, lze je předepsat pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem v maximálním množství 60 ks na měsíc.



Brava® tvarovatelné kroužky

SÚKL kód 5008150 - tloušťka 2,0 mm
 SÚKL kód 5008146 - tloušťka 4,2 mm

Brava® kroužek vytváří bezpečné utěsnění kolem stomie. Chrání nejbližší okolí stomie před podtečením.

Jak správně používat Brava® tvarovatelný kroužek?

Kroužek se vytvaruje prsty do požadovaného tvaru a nalepí na kůži kolem stomie. Poté se aplikuje stomický sáček jako obvykle.

Kroužky jsou plně hrazené pojišťovnou, lze je předepsat pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem v maximálním množství 60 ks na měsíc.



Brava® Protective Seal Convex, konvexní kroužek

SÚKL kód 5014371 - Ø 20mm

SÚKL kód 5014370 - Ø 25mm

SÚKL kód 5014369 - Ø 30mm

SÚKL kód 5014368 - Ø 35mm

SÚKL kód 5014367 - Ø 40mm

SÚKL kód 5014366 - Ø 45mm

Brava® Protective Seal konvexní kroužek pomáhá, pokud máte ústí stomie v úrovni kůže nebo pokud máte vpadlou stomii, protože dokáže ústí stomie vysunout nad úroveň kůže a výměšky tak padají lépe do sáčku. Pokud máte výrazné jizvy nebo hluboké kožní řasy, může konvexní kroužek tyto nerovnosti kolem stomie vyplnit a stomická pomůcka pak lépe přilne ke kůži.


Kombinace konvexního kroužku a konkávní pomůcky

Velmi vhodný je konvexní kroužek v kombinaci s konkávním stomickým sáčkem SenSura Mio Concave pro stomiky, kteří mají vypouklé okolí stomie a zároveň ústí stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže. Kroužek vytlačí ústí stomie nad povrch kůže a konkávní podložka perfektně svým tvarem přilne na vypouklé okolí stomie a vytvoří tak ideální těsnění kolem stomie. Kroužek lze dobře vymodelovat podle požadovaného tvaru stomie do kulatého nebo oválného tvaru.

Jak správně používat konvexní kroužek Brava Protective Seal Convex?

Kroužek se vytvaruje prsty a roztáhne na požadovaný tvar. Poté se aplikuje na kůži kolem stomie. Kroužek se také může aplikovat na stomickou podložku před nalepením na kůži.

Kroužky jsou plně hrazené pojišťovnou, lze je předepsat pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem v maximálním množství 60 ks na měsíc.

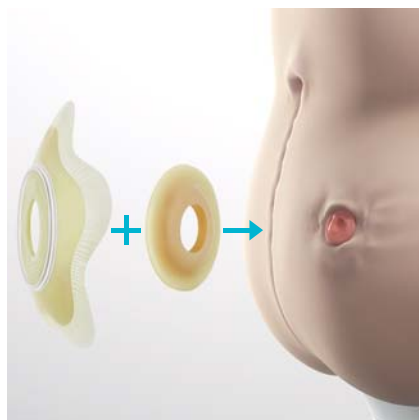

Brava® pasta

Adhezivní pasta dokonale chrání před účinky střevního obsahu, snižuje riziko podtékání a prodlužuje životnost podložky. Používá se k vyrovnání jizev, kožních záhybů a jiných nerovností okolo stomií a píštělí. Používá se také k utěsnění kolem stomie. Pasta se lépe aplikuje navlhčenými prsty. Adhezivní pasty v tubě i prouzcích jsou plně hrazené a lze předepsat maximálně 1 balení na 1 měsíc.

Brava® pasta v tubě **SÚKL kód 5008121**

Brava® pasta v tubě neobsahuje alkohol, proto je velmi šetrná k pokožce v okolí stomie, nevyvolává pálení ani svědění.

Jak správně používat pastu v tubě?

Po vystřížení otvoru do sáčku nebo podložky, vytlačte pastu po celém vnitřním obvodu otvoru na sáčku nebo podložce a poté nalepte na tělo. Pasta dokonale utěsní okolí stomie a tím sníží riziko podtečení. Dále je možné nanést pastu přímo na tělo před nalepením.

Brava® pasta v prouzcích **SÚKL kód 5008120**

Balení Brava® pasty v prouzcích umožňuje mít u sebe pouze nezbytně nutné množství pasty. Pasta v prouzcích také neobsahuje alkohol a proto kůži nedráždí.

Coloplast pasta v tubě **(obsahuje alkohol)** **SÚKL kód 5008117**

Adhezivní pasta dokonale chrání před účinky střevního obsahu, snižuje riziko podtékání a prodlužuje životnost podložky. Používá se k vyrovnání jizev, kožních záhybů a jiných nerovností okolo stomií a píštělí. Používá se také k utěsnění kolem stomie. Pasta se lépe aplikuje navlhčenými prsty.



Coloplast stomické ochranné destičky
vel. 10x10 cm SÚKL kód 5008109
vel. 15x15 cm SÚKL kód 5008112
vel. 20x20 cm SÚKL kód 5008113

Destičky stomické se používají tam, kde hrozí riziko nebo již došlo k poškození kůže tělními sekrety. Jedná se především o okolí stomii zvláště vpadlých nebo na úrovni kůže, píštělí a drenáží. Jsou samolepící, tenké, ohebné, na kůži nezanechávají zbytky a prodlužují životnost podložky. Destičku lze vystříhnout dle velikosti stomie, nalepit na kůži a na ni nalepit podložku nebo rovnou sáček u jednodílného systému.



Jak správně používat stomickou destičku?

Odstraňte papír z nelepivé strany destičky. Nejprve ohněte růžek, uchopte ochranný papír a tahem ho odstraňte. Vyznačte požadovanou velikost otvoru pro stomii (pomocí tužky). Nůžkami vystříhnete požadovanou velikost otvoru pro stomii podle vámi vyznačené šablony. Odstraňte ochranný papír z lepicí strany destičky. Je velmi důležité předem odstranit všechny chloupky z místa, kam destičku budete chtít nalepit. Poté nalepte destičku kolem stomie lepicí stranou. Teprve na destičku nalepte stomickou pomůcku.

Destička stomická je plně hrazená pojišťovnou a lze ji předepsat dle potřeb stomika a rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Brava® lubrikační deodorant **SÚKL kód 5008106**

Moderní Brava® lubrikační deodorant neutralizuje zápach a zároveň účinkuje jako lubrikant. Tak si můžete být jistí, že výměšky jsou vždy na dně stomického sáčku a nikoliv kolem vašeho vývodu. To také usnadňuje vyprázdnění sáčku.

Brava® lubrikační deodorant je plně hrazený pojišťovnou a v rámci měsíčního limitu 340,48 Kč lze předepsat jednu lahvičku.



Jak správně používat Brava® deodorant?

Nakapejte 5 - 10 ml do stomického sáčku a sáček jemně promněte mezi prsty, aby se Brava® lubrikační deodorant rovnoměrně rozšířil v sáčku. Používáte-li výpustný sáček, můžete přidat deodorant také přes výpust. Po vyprázdnění sáčku proces opakujte.

Irigační souprava SÚKL kód 5008154 odvodné sáčky SÚKL kód 5008151

Irigace (výplach střeva) je metoda, jež umožňuje kolostomikům znovu získat kontrolu nad vyprazdňováním střev. Souprava obsahuje vše potřebné pro bezpečnou irigaci. Střevo se vyplachuje vodou jednou za 1 až 3 dny. V období mezi jednotlivými irigacemi se střevo nevyprazdňuje, takže se používá malý sáček nebo zátka. Irigaci vás naučí stomická sestra. O vhodnosti irigace rozhoduje lékař. Na 1 rok lze předepsat 2 irigační soupravy a k tomu až 300 ks odvodných irigačních sáčků.

Stomické přídržné pásy

Přídržný pásek slouží stomikům, kteří jsou fyzicky aktivní, mají nadváhu nebo nerovný povrch kůže kolem stomie. Coloplast nabízí dva pásy. Pásek se 2 oušky, který se používá s pomůckami SenSura nebo Alterna (SÚKL kód 5009110) a pásek se 4 oušky, který se používá pouze s pomůckami SenSura Mio (SÚKL kód 5008955, délka 100 cm a SÚKL kód 5008954, délka 155 cm). Všechny pásy je možné prát a opakovaně používat. Délku pásku lze jednoduše nastavit. Ročně lze předepsat 2 pásy.



Irigační souprava Alterna, a přídržný pásek jsou zdravotnické prostředky určené k péči o stomie. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

Každá stomie může mít své Mio.



SenSura® Mio

SenSura® Mio používá technologii BodyFit. Ta zaručí perfektní přilnutí kolem stomie i během pohybu. Lepicí materiál je 2x pružnější, než tradiční stomické pomůcky, proto je tak elastický, že se přizpůsobí každému pohybu.*



*plochá podložka
pro rovné břicho
v okolí stomie*



*konvexní podložka
pro vpadlé okolí
stomie*



*konkávní podložka
pro vypouklé okolí
stomie*

**Pro vzorky zdarma volejte
Po – Pá, 8:00 – 16:00
bezplatnou linku**



**Péče o klienty
800 100 416**
bezplatná informační linka

nebo se podívejte na www.coloplast.cz

Pomůcky řady SenSura Mio jsou zdravotnické prostředky určené pro stomiky. Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nepoškozené kůži kolem stomie. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání.

*Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

Úhradové limity platné od 1. 1. 2024

(Limity jsou uvedené v úhradových cenách včetně DPH 12%.)

Kategorie	Pomůcky	Množstevní limit / měsíc v ks	Finanční limit / měsíc v úhrad. cenách v Kč	Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
03.08.01.01	Vkládací kroužky	60 ks - lze předepsat pouze s podložkou (1D, 2D)	5 241,60	Brava® tvarovatelné kroužky, Brava® Seal těsnící kroužky, Brava® Protective Seal Convex kroužky
03.08.01.02	Pásky vyrovnávací	120 ks - lze předepsat pouze s podložkou (1D, 2D)	9 408,00	Brava® elastické vyrovnávací pásky
03.08.01.03	Adhezivní pasty a gely	1	8,736 Kč/gram/výrobek	Brava® pasta v tubě a v prouzcích, Coloplast pasta
03.08.01.04	Destičky a roušky	není stanoven	0,448 Kč/cm ² /výrobek	Coloplast stomické ochranné destičky
03.08.02.01	Stomické pásky přídržné	2/rok	194,88/kus	Brava® pásek pro SenSura Mio, Coloplast pásek pro SenSura, Alterna
03.08.04.02	Odstraňovače stom. podložky silikonové (rouška nebo sprej)	není stanoven	487,20	Brava® odstraňovač adheziv ve spreji a v ubrouscích
03.08.05.01	Pohlčovače pachu	není stanoven	340,48	Brava® lubrikační deodorant
03.09.01.01	Ochranné (pudry, krémy, filmy, přídržné proužky)	není stanoven	974,40	Brava® stomický pudr, Brava® bariérový krém, Brava® ochranný film ve spreji a v ubrouscích, Comfeel™ bariérový krém, Prep film
03.09.02.01	Čistící (roztoky, pěny, ubrousky)	není stanoven	292,32	Brava® čistící ubrousky, Comfeel™ čistící roztok v lahvici a v ubrouscích

Všechny pomůcky jsou plně hrazené v rámci množství a finančního limitu.

Péče o stomie a ostatní příslušenství

Prostředky ochranné		Počet balení jednotlivých produktů se určuje dle cen produktů, které se počítají do max. limitu 2923,20 Kč / 3 měsíce.			
SÚKL kód	Prostředky stomické - ochranné a destičky stomické	Úhrada pojištěn	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Tríměsíční limit v Kč
5008092	Brava® ochranný film ve spreji, 50 ml, 1 ks/bal.	P	6	486,58	2923,20
5008091	Brava® ochranný film v ubrouscích, 30 ks/bal.	P	6	486,78	
5008089	Prep film, ubrousky, 30 ks/bal.	P	6	486,78	
5008099	Brava® bariérový krém, tuba, 60 ml, 1 ks/bal.	P	14	208,56	
5008098	Comfeel™ bariérový krém, tuba, 60 ml, 1 ks/bal.	P	16	182,56	
5008102	Brava® stomický pudr, 25 g, 1 ks/bal.	P	5	541,94	

Destičky a roušky

SÚKL kód	Prostředky stomické - ochranné a destičky stomické	Úhrada pojištěn	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Tríměsíční limit v Kč
5008109	Coloplast stomická ochranná destička, 10 x 10 cm, 10 ks/bal.	P	dle potřeby	448,00	není stanoven cena za 1cm nesmí být vyšší než 0,448 Kč
5008112	Coloplast stomická ochranná destička, 15 x 15 cm, 5 ks/bal.	P	dle potřeby	504,00	
5008113	Coloplast stomická ochranná destička, 20 x 20 cm, 5 ks/bal.	P	dle potřeby	896,00	

Odstraňovače stomické podložky silikonové a prostředky čisticí

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištěn	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Tríměsíční limit v Kč
5008108	Brava® odstraňovač adheziv ve spreji, 50 ml, 1 ks/bal.	P	6	242,90	1 461,60
5008107	Brava® odstraňovač adheziv v ubrouscích, 30 ks/bal.	P	3	483,00	
5008095	Brava® čisticí ubrousky s provitaminem B5, 15 ks v zásobníku	P	4	217,81	876,96
5008097	Comfeel™ čisticí roztok, lahvička, 180 ml, 1 ks/bal.	P	4	218,53	
5008096	Comfeel™ čisticí roztok, ubrousky, 30 ks/bal.	P	3	291,90	

Adhezivní pasty

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištěn	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Tríměsíční limit v ks
5008121	Brava® pasta, tuba, 60 g, 1 ks/bal.	P	3	523,17	3
5008120	Brava® pasta v proužcích, 60 g, 10 ks/bal.	P	3	510,72	
5008117	Coloplast pasta, tuba, 60 g, 1 ks/bal.	P	3	262,00	

Vkládací kroužky

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištěn	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Tríměsíční limit v ks
5008131	Brava® Seal těsn. vyrov. kroužek, tl. 2,5 mm, ø18 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	max. 180 ks, lze předepsat pouze s podložkou (podložka=1D nebo 2D systém)
5008133	Brava® Seal těsn. vyrov. kroužek, tl. 2,5 mm, ø27 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5008135	Brava® Seal těsn. vyrov. kroužek, tl. 2,5 mm, ø34 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5008140	Brava® Seal těsn. vyrov. kroužek, tl. 4,2 mm, ø18 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5008141	Brava® Seal těsn. vyrov. kroužek, tl. 4,2 mm, ø27 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5008143	Brava® Seal těsn. vyrov. kroužek, tl. 4,2 mm, ø34 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5014371	Brava® Protective Seal Convex konvexní kroužek, ø20 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5014370	Brava® Protective Seal Convex konvexní kroužek, ø25 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5014369	Brava® Protective Seal Convex konvexní kroužek, ø30 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5014368	Brava® Protective Seal Convex konvexní kroužek, ø35 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5014367	Brava® Protective Seal Convex konvexní kroužek, ø40 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5014366	Brava® Protective Seal Convex konvexní kroužek, ø45 mm, 30 ks	P	6	2 620,80	
5008150	Brava® tvarovatelný kroužek, tloušťka 2 mm, 30 ks	P	6	2 617,86	
5008146	Brava® tvarovatelný kroužek, tloušťka 4,2 mm, 30 ks	P	6	2 617,86	

Vyrovňovací pásy

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištěn	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Tríměsíční limit v ks
5008129	Brava® elastické vyrovnávací pásy, 20 ks	P	18	1 336,72	max. 360 ks, lze předepsat pouze s podložkou (podložka=1D nebo 2D systém)
5008123	Brava® pásy, půlkruh s postranními výběžky, 20 ks	P	18	1 568,00	
5008127	Brava® pásy, rovný tvar, 20 ks	P	18	1 336,12	
5008125	Brava® elastické vyrovnávací pásy XL, 20 ks	P	18	1 567,72	

Pohlčovače

SÚKL kód	Výrobek	Úhrada pojištěn	Počet bal. na 3 měsíce	Cena Kč	Tríměsíční limit v Kč
5008106	Brava® lubrikační deodorant, 240 ml, 1 ks/bal.	P	3	340,48	1 021,44



V roce 1954 se začal psát příběh společnosti Coloplast. Elise Sørensen je zdravotní sestrou. Její sestra Thora právě prodělala operaci, při níž jí byl vytvořen umělý vývod - stomie. Se stomií se Thora neodvažuje chodit ven, protože má strach, že se jí na veřejnosti stane nehoda a stomie podteče.

Elise naslouchá problémům, které její sestra má a vytvoří první samolepící stomický sáček na světě. Sáček, který nepodtéká, dává Thoře a tisícovkám lidí se stejným problémem šanci vrátit se k normálnímu životu.

Jednoduché řešení obrovského významu.

Dnes se zabýváme výrobou a distribucí nejen stomických pomůcek, ale také pomůcek pro urologické a inkontinentní pacienty a výrobků pro péči o kůži a hojení ran vlhkou cestou.

Způsob, kterým pracujeme, je však stále stejný jako to dělala Elise: nasloucháme, učíme se a na základě toho vytváříme produkty a služby, které usnadňují život lidem s intimními zdravotními potřebami.



Péče o klienty
800 100 416
bezplatná informační linka

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám. Toto my nazýváme intimní zdravotní péči.

Coloplast je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. © 2024-01
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko. PM-20123



Coloplast

Coloplast Czech s.r.o.
Radlická 740/113c
158 00 Praha 5
tel. 244 470 212
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Péče o klienty:
bezplatná informační linka 800 100 416